

# SenseView Light

Die elektronische Lupe im  
Taschenformat für mobile  
Menschen.



## Bedienungsanleitung

# Inhalt

<b>Lieferumfang .....</b>	<b>5</b>
<b>Hinweise .....</b>	<b>5</b>
<b>Gerätebeschreibung und Bedienung.....</b>	<b>6</b>
Bedienelemente.....	6
Ein/Ausschalter.....	7
Standfüße .....	8
Kamera.....	8
Vergrößerung .....	8
Helligkeit.....	9
Farbwahl .....	9
Beleuchtung .....	9
Standbild .....	10
Ladeanzeige .....	10
Bildschirm.....	11
Ladebuchse .....	11
<b>Handhabung .....</b>	<b>11</b>
Ohne Aufstellbügel.....	12
Mit Aufstellbügel .....	12
Stromsparfunktion.....	12
Akkuanzeige.....	13
Quittungstöne .....	14
<b>Vorsichtsmaßnahmen .....</b>	<b>14</b>
<b>Wartung und Pflege .....</b>	<b>15</b>
<b>Hilfe bei Fragen – Kundendienst .....</b>	<b>16</b>
<b>Reparatur .....</b>	<b>16</b>
<b>Garantieinformation .....</b>	<b>16</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>17</b>

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von SenseView Light, der universellen elektronischen Lupe im Taschenformat für den mobilen Menschen von heute! Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen SenseView Light, das mit seinem zukunftsweisenden Design bald Ihr ständiger Begleiter sein wird.

Mit SenseView Light können Sie wieder das Kleingedruckte lesen, wenn Brille und Lupe längst nicht mehr reichen. Entdecken Sie die farbige Welt mit SenseView Light neu. Das sehr kompakte, akkubetriebene und handliche Lesegerät wurde speziell für die Bedürfnisse von Menschen mit geringer Sehkraft entwickelt.

Verwenden Sie Ihr SenseView Light wo immer Sie wollen:

- Lesen Sie die Speisekarte im Restaurant,
- Etiketten und Preisschilder auf Verpackungen oder Kassenbons
- Fahrpläne, Stadtpläne und Landkarten
- Füllen Sie Schecks, Überweisungen und Formulare wieder selbst aus
- informieren Sie sich über Medikamentenbeipackzettel oder Bedienerhinweise auf Flaschen und Dosen
- genießen Sie Zeitschriften und Bücher auch unterwegs und vieles mehr...

SenseView Light ist Ihr kleiner Helfer in zahlreichen Situationen des täglichen Lebens. Er vergrößert Gedrucktes, Handschrift, oder Bilder und erlaubt sogar das Lesen hinter Glas. Halten Sie ihn wie eine Lupe in einer Hand oder mit

beiden Händen oder setzen Sie SenseView Light ganz bequem auf ein Blatt Papier auf und führen ihn über die Vorlage, ganz so wie Sie es am liebsten haben.

Betrachten Sie Fotos in Farbe oder lesen Sie Schrift wahlweise schwarz/weiß oder mit verstärktem Kontrast in Negativ-Darstellung, also weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund (invertiert). Zum Notieren z.B. einer Telefonnummer können Sie den Bildschirm sogar „einfrieren“.

SenseView Light hat eine universelle Stromversorgung. Sie können SenseView Light auch benutzen, während Sie ihn aufladen. Einmal aufgeladen können Sie bis zu 3 Stunden netzunabhängig lesen. Das universelle Ladegerät hat einen Eurostecker, der den Anschluss an alle gängigen europäischen Stromnetze erlaubt.

## **Über dieses Handbuch**

Das folgende Handbuch beschreibt zuerst den Lieferumfang und die ersten Schritte mit Ihrem neuen Gerät. Danach gehen wir gemeinsam die Bedienelemente einzeln durch und lernen so das Gerät besser kennen. Danach kommen einige weitere Informationen zur Handhabung. Zum Schluss die technischen Daten und Kontaktadressen.

## **Lieferumfang**

bevor Sie SenseView Light zum ersten Mal einschalten, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Teile vollständig und unbeschadet in der Packung enthalten sind.

### **Im Lieferumfang sind enthalten:**

- SenseView Light (P350), elektronische Lupe mit eingebauter wieder aufladbarer Batterie (Akku)
- Transporttasche
- Trageschlaufe
- Universalladegerät mit Eurostecker
- Handbuch

## **Hinweise**

Vor der ersten Inbetriebnahme von SenseView Light sollten Sie den eingebauten Akku voll aufladen. Das kann bis zu 3 Stunden dauern.

Im Auslieferungszustand befindet sich auf dem Bildschirm eine dünne Schutzfolie. Für optimale Bildqualität sollten Sie diese entfernen, spätestens aber wenn sie zerkratzt ist.

Um einen elektrischen Defekt zu vermeiden, benutzen Sie bitte nur das mitgelieferte Universalladegerät.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.


Nach 6 Monaten Gebrauch, kann die sich die Betriebszeit des Akkus verkürzen.



# Gerätebeschreibung und Bedienung

## Voreinstellungen

SenseView merkt sich alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen. Beim nächsten Einschalten sind also alle Einstellungen wieder so wie vor dem letzten Ausschalten. Auf diese Weise müssen Sie nicht jedes Mal die von Ihnen bevorzugten Einstellungen wie Vergrößerung, Farbdarstellung und Helligkeit erneut vornehmen.

## Bedienelemente von SenseView Light

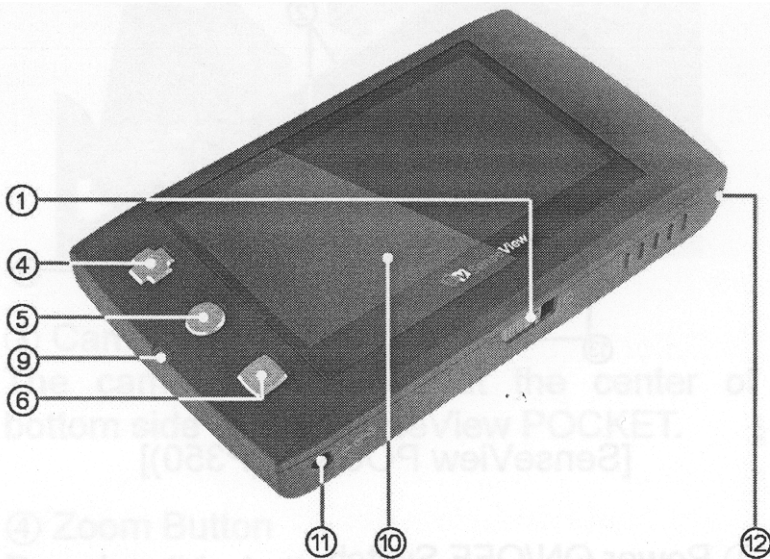

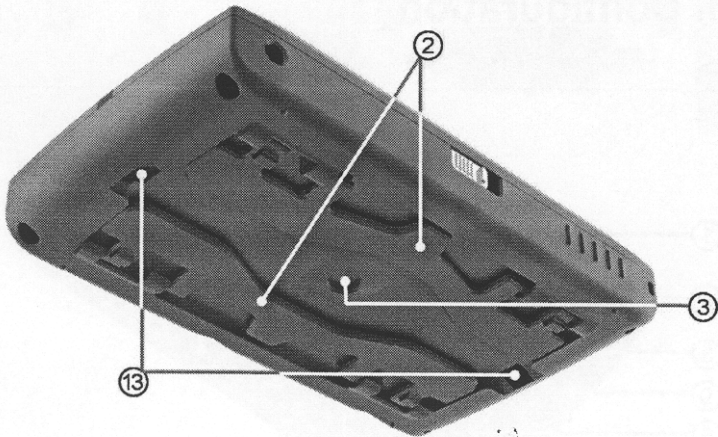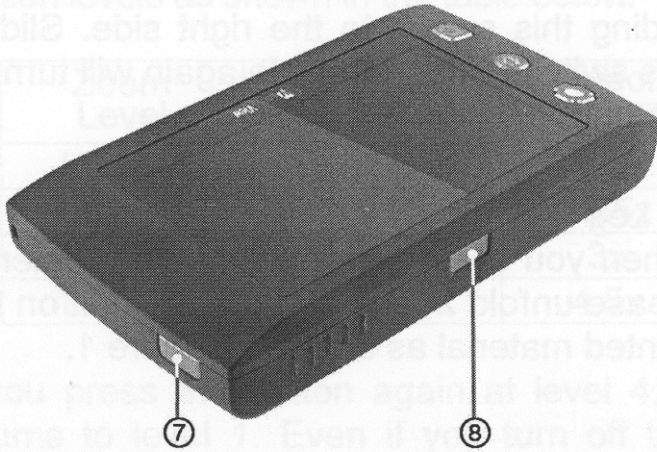

### **1 Ein/Ausschalter** (Vorderkante, Mitte)

Schieben Sie den Schalter kurz nach rechts und lassen ihn dann wieder los, um SenseView Light einzuschalten.

Schieben Sie den Schalter erneut kurz nach rechts und

lassen ihn dann wieder los, um SenseView Light auszuschalten.

## **2 Aufstellbügel**

Wenn Sie gedruckten Text lesen, klappen Sie die beiden Aufstell-bügel aus und legen das Gerät wie in Bild 1 gezeigt auf den Text

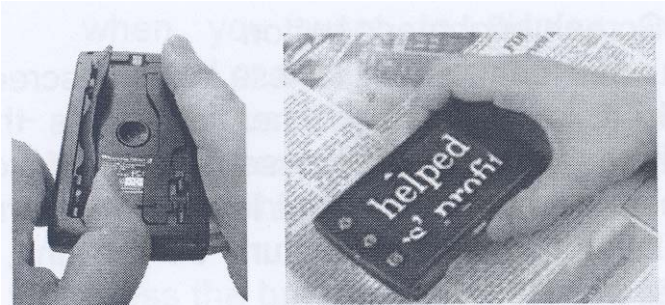


Bild 1

## **3 Kamera**

Die Kamera befindet sich auf Unterseite genau unter der Mitte des Bildschirms. So können Sie SenseView Light wie eine Glaslupe benutzen.

## **4 Vergrößerung (Oberseite, links hinten)**

Bei jedem Druck auf diese Taste wechseln Sie zur nächsten Vergrößerungsstufe. Es stehen insgesamt 4 Stufen zur Verfügung.

Wenn Sie in Stufe 4 erneut die Vergrößerungstaste drücken, wird wieder die Stufe 1 gewählt. Die Einstellung wird auch nach dem Ausschalten gespeichert.

## **Vergrößerungsstufen:**

Vergrößerung	Abstand vom Objekt	
	2 cm	4,5 cm
Stufe 1	3,5 x	1,5 x
Stufe 2	5,25 x	2,25 x
Stufe 3	7 x	3 x
Stufe 4	10,5 x	4,5 x

### **5 Helligkeit** (Oberseite, links Mitte)

Damit wählen Sie eine der vier

Bildschirmhelligkeitseinstellungen aus. Stellen Sie die Helligkeit durch mehrmaliges Drücken nach Ihren Bedürfnissen von Stufe 1 bis 4 ein. Nach Stufe 4 kommt beim nächsten Drücken wieder Stufe 1.

Wählen Sie für dunkle Vorlagen oder in heller Umgebung eine hohe Bildschirmhelligkeit.

### **6 Farbwahl** (Oberseite, links vorne)

Wählen Sie durch Druck auf diese Taste nacheinander eine der folgenden fünf Darstellungsarten:

- **Echtfarben**, für Fotos, Landkarten, farbig gedruckten Text.
- **Schwarz auf weißem Hintergrund**
- **Schwarz auf weißem Hintergrund mit erhöhtem Kontrast**
- **Weiß auf schwarzem Hintergrund**

- **Weiß auf schwarzem Hintergrund mit erhöhtem Kontrast**

Durch nochmaliges Drücken, beginnen Sie wieder von vorn. SenseView merkt sich diese Einstellung auch nach dem Ausschalten.

### **7 Beleuchtung** (*rechte Seitenkante, hinten*)

Die Helligkeit der Beleuchtung kann mit dieser Taste in drei Stufen eingestellt werden

- **Aus**
- **Mittel**
- **Maximal**

Wenn Sie nun noch mal drücken, beginnen Sie wieder von vorn.

### **8 Standbild/Einfrieren** (*Hinterkante, Mitte*)

SenseView Light besitzt eine Standbildtaste. Wenn Sie diese Taste drücken, wird das gerade auf dem Schirm angezeigte Bild „eingefroren“. Das ist ganz praktisch, wenn Sie zum Beispiel eine Telefon-nummer herausgesucht haben und diese notieren wollen. Ein erneuter Druck auf die „Einfrieren“ Taste bringt Sie wieder zurück in den normalen Modus.

### **9 Ladeanzeige** (*links Kante, Mitte*)

Während des Ladevorgangs leuchtet diese Anzeige rot. Ist der Ladevorgang beendet wechselt die Anzeige auf grün.

Befindet sich das Gerät im Stromsparmmodus, dann blinkt diese Anzeige.

## **10 Bildschirm**

**Achtung:** Der Bildschirm kann während des Ladevorgangs oder bei langer Benutzungszeit warm werden.

## **11 Ladebuchse (Vorderkante, links)**

Schließen Sie hier nur das Originalladegerät an.

Achtung: Bitte stecken oder ziehen Sie den Stecker nicht mit Gewalt. Dies kann zu einem Defekt an der Ladebuchse führen

## **12 Loch für die Trageschlaufe (Vorderkante, rechts)**

## **13 Beleuchtung**

## **Handhabung**

Sie können SenseView Light wie eine Lupe in einer Hand halten und mit etwas Abstand über die Vorlage führen. Ebenso können Sie SenseView Light auch mit beiden Händen halten. Bequemer lesen Sie, wenn Sie die beiden Aufstellbügel ausklappen und SenseView Light direkt auf die Vorlage aufsetzen.

## **Halten mit einer oder beiden Händen, beide Aufstellbügel eingeklappt**

Halten Sie SenseView Light wie eine Lupe mit einer oder beiden Händen etwa 2 bis 4,5 cm Zentimeter über der

Vorlage (Bild 2). Je näher Sie der Vorlage kommen, umso höher ist die Vergrößerung.



Bild 2

### ***Aufstellbügel ausgeklappt***

Wenn Sie einen oder beide Aufstellbügel ausklappen (Bild 3, 4), können Sie den SenseView Light bequem auf die Vorlage stellen



Bild 3



Bild 4

### ***Stromsparfunktion***

Wird das Gerät für mehr als 2 Minuten nicht benutzt, wird auto-matisch die Stromsparfunktion aktiviert. Der Bildschirm schaltet sich aus und die Ladeanzeige beginnt zu blinken. Nach weiteren 3 Minuten schaltet sich das Gerät aus.

Die Stromsparfunktion können Sie wieder beenden, wenn sie eine beliebige Taste drücken oder das Gerät bewegen. Hat sich das Gerät nach 5 Minuten automatisch abgeschaltet, können Sie es mit dem Ein-/Ausschalter wieder einschalten.

Achtung: In der Standbildfunktion ist die Stromsparfunktion nicht aktiv, das Gerät schaltet nach drei Minuten ganz ab, wenn Sie keine Taste drücken.

### **Akkuanzeige**

Der Ladezustand des Akkus wird Ihnen angezeigt, wenn Sie die Tasten **4 Vergrößerung** und **7 Beleuchtung** gleichzeitig drücken.

Der Ladezustand wird auf dem Bildschirm (Bild 5) in blauer Farbe angezeigt, wenn SenseView Light nicht mit dem Ladegerät verbunden ist.

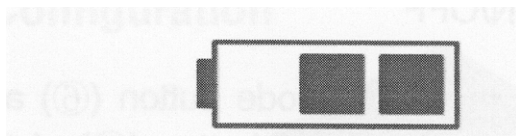


Bild 5

Bitte laden Sie den Akku auf, wenn die Ladestandanzeige auf dem Bildschirm blau blinkt (Bild6).


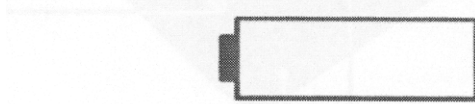


Bild 6

Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige rot (Bild 7). Ist der Akku vollständig geladen, wechselt die Anzeige nach grün (Bild 8).

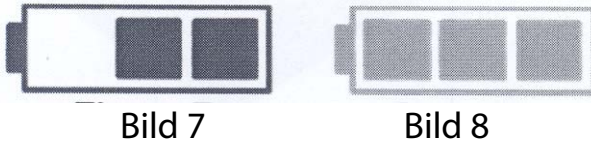

## Quittungstöne

Die Quittungstöne können Sie Ein- und Ausschalten, wenn Sie die Tasten **6 Farbwahl** und **7 Beleuchtung** gleichzeitig drücken.

## Vorsichtsmaßnahmen

Um sich selbst und SenseView Light zu schützen, sollten Sie einige Sicherheitshinweise beachten.

- verwenden Sie SenseView Light nicht im Regen.
- setzen Sie SenseView Light nicht längere Zeit direkter starker Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie extreme Hitze und große Temperaturschwankungen. Lassen Sie SenseView Light nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos in der prallen Sonne liegen.
- Wenn SenseView Light nicht mehr richtig funktioniert oder beschädigt ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Öffnen Sie keinesfalls die Gehäuse von SenseView Light oder Netzteil. SenseView Light besitzt keine Teile, die der Wartung durch den Anwender bedürfen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Händler vor Ort.

- Laden und betreiben Sie SenseView Light nur mit dem originalen Netzteil und Ladegerät. Sie könnten das Gerät sonst beschädigen.
- SenseView Light hat eine eingebaute Lithium Ionen Batterie. Beachten Sie die Entsorgungsvorschriften Ihrer örtlichen Müllentsorgungsbehörde. Werfen Sie SenseView Light nicht in den Hausmüll.
- Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus. Bei Verwendung der falschen Batterie besteht Brandgefahr.

## **Wartung und Pflege**

SenseView Light ist zwar sehr robust, aber nicht unzerstörbar. Beachten Sie daher bitte die nachfolgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Lesegerät haben.

- Vermeiden Sie Berührungen des Bildschirms, er wird es Ihnen danken.
- Wir empfehlen, das Gerät bei Nichtgebrauch in der Tasche aufzubewahren, um ein Verkratzen des Bildschirms zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.
- Reinigen Sie das Gehäuse oder den Bildschirm nur mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch. (keine Tücher aus synthetischen Fasern verwenden!)

- Setzen Sie das Gerät keiner großen Hitze aus, z.B. auf einer Heizung, im heißen Auto, in der Nähe eines sonnigen Fensters, usw.

## **Hilfe bei Fragen - Kundendienst**

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen BAUM Händler, wenn Sie Hilfe benötigen. Die Zentrale der BAUM Retec AG in Deutschland erreichen Sie telefonisch unter 06223-4909-0

## **Reparatur**

SenseView Light darf nur von BAUM Retec AG selbst oder autorisierten Betrieben repariert werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler. Die Zentrale der BAUM Retec AG in Deutschland erreichen Sie telefonisch unter 0 6223 - 4909 0.

**Bitte setzen Sie sich telefonisch mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn Sie ein Problem mit Ihrem SenseView Light haben. Schicken Sie nicht unaufgefordert Ihr Gerät an die Werkstatt. Verschicken Sie SenseView Light nur in der Originalverpackung, um weitere Schäden durch unsachgemäße Verpackung zu vermeiden.**

## **Garantieinformation**

SenseView Light unterliegt selbstverständlich den gesetzlichen Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen.

SenseView Light hat eine eingeschränkte zweijährige Gewährleistung. Die SenseView Light Batterie hat eine dreimonatige Herstellergarantie.

BAUM Retec AG garantiert, dass SenseView Light zum Zeitpunkt der Herstellung und Lieferung frei von Schäden in Material und Verarbeitung ist. BAUM Retec AG erweitert diese Garantie nur für eine Partei, die SenseView Light von einem autorisierten Fachhändler erworben hat.

# Technische Daten SenseView Light

**Vergrößerung:** ca. 1,5 bis 10,5-fach

**Objektabstand:** ca. 2 bis 4,5 cm

**Bildschirmeinstellungen:**

- echtfarben Darstellung
- schwarz/weiß Darstellung
- schwarz/weiß Darstellung

kontrastverstärkt

- weiß/schwarz Darstellung
- weiß/schwarz Darstellung

kontrastverstärkt

**Bildschirmabmessungen:** 3,4" im 16:10 Breitformat

**Gewicht:** 151g

**Abmessungen:** Breite:115 mm, Tiefe: 67 mm, Höhe: 18 mm

**Lithium Ionen Polymer Batterie:** (wieder aufladbar)

Hinweis: die Batterie kann nicht von Benutzer gewechselt werden. Beachten Sie die Entsorgungsvorschriften. Kein Hausmüll!

**Betriebszeit:** nach Vollladung: ca. 3 Stunden

**Ladedauer:** ca. 3 Stunden (bei völlig entladener Batterie).

**Prüfzeichen, Konformität mit Normen:**

**SenseView Light:** CE, FCC

**Universalnetzteil:** CE, FCC, TÜV GS, UL

## **Kontakt**

Vertrieb exklusiv durch:

BAUM Retec AG  
In der Au 22  
D-69257 Wiesenbach

Telefon: 0 62 23 - 49 09 0  
Fax: 06223-4909-99  
Email: [info@baum.de](mailto:info@baum.de)  
Internet: <http://www.baum.de>