

mit anderen Augen sehen...

Hilfsmittel für Sehgeschädigte - Entwicklung - Produktion - Vertrieb

Visio
Braille



VarioUltra

Bedienungsanleitung

Software 1.4, OS 1.0.76, BIOS 1.2.0

Handbuchversion 3.1

Deutsch 07/2020

VisioBraille – mit anderen Augen sehen

Wir führen die Produkte der BAUM Retec AG weiter!

Die Fa. VisioBraille GmbH ist überzeugt von den Bildschirmlesegeräten der VISIO-Familie, den VARIO-Braillezeilen und Poet Vorlesegeräten!

Bestärkt durch die überwältigenden positiven Reaktionen der Kunden und Distributoren hat VisioBraille beschlossen, die Produkte der ehemaligen Fa. BAUM Retec AG weiter zu produzieren und auch den Service sicher zu stellen.

Auf dieser Basis werden den Nutzerinnen und Nutzer zukünftig auch neuentwickelte Geräte zur Verfügung stehen.

Mit diesen innovativen Hilfsmitteln wollen wir die Einschränkungen blinder und sehbehinderter Menschen bestmöglich ausgleichen, Ihre Unabhängigkeit stärken und Hilfestellung geben, auf dem Weg in einen selbständig gestalteten Alltag.

Dieses Ziel wird erreicht, durch unser hohes Engagement in der Entwicklung hochwertiger Produkte, durch langjährige Erfahrung in diesem Bereich, durch exzellentes Know-how und bewährte Kompetenz unter Zuhilfenahme modernster Technologien, die die Lebensqualität unserer Kunden deutlich spürbar verbessern.

Ergonomie, Design und Qualität der in Deutschland entwickelten und produzierten Produkte erfüllen höchste Ansprüche.

Sowohl im privaten Bereich, als auch in Ausbildung und Beruf können Sie durch die Verwendung unserer hochwertigen Produkte Barrieren abbauen, und Ihren Erfolg weiter vorantreiben.

Inhalt

1	ÜBER DIESES HANDBUCH	10
2	ÜBER VARIOULTRA	12
3	VOR DEM ERSTEN EINSCHALTEN	13
3.1	LIEFERUMFANG:	13
4	VARIOULTRA: EIN ERSTER BLICK AUF DAS GERÄT	14
4.1	OBERSEITE	14
4.1.1	Brailletastatur	14
4.1.2	Daumentasten	15
4.1.3	Navistick.....	15
4.1.4	Systemtasten.....	15
4.1.5	Braillezeile und Displaytasten	16
4.2	LINKE GERÄTESEITE	16
4.3	RECHTE GERÄTESEITE	17
5	ERSTE SCHRITTE	18
5.1	SCHLAFMODUS (STANDBY) UND AUSSCHALTEN.....	18
5.2	AKKU VON VARIOULTRA LADEN.....	19
5.3	KURZBEFEHLE, ANWAHLBUCHSTABEN UND MENÜELEMENTE	20
5.3.1	Mehr zu den Kurzbefehlen.....	20
5.3.2	Mehr zu den Anwahlbuchstaben.....	21
5.3.3	Mehr zu den Segmenten	21
5.4	WIE SIE EINEN BEFEHL, EINE AUSWAHL ODER EINE FUNKTION BESTÄTIGEN	22
5.5	HILFE UND KONTEXTHILFE	22
5.6	UPDATES FÜR VARIOULTRA	23
5.6.1	Anleitung zum Update von VarioUltra:	23
6	DIE BRAILLEZEILENFUNKTION	25
6.1	EINFÜHRUNG IN DIE BRAILLEZEILENFUNKTION	25
6.2	VARIOULTRA ALS USB BRAILLEZEILE VERWENDEN.....	25
6.2.1	VarioUltra mit COBRA (USB HID)	26
6.2.2	VarioUltra mit JAWS (USB HID)	26
6.2.3	VarioUltra mit Window-Eyes (USB HID)	28
6.2.4	VarioUltra mit NVDA (USB HID)	28
6.2.5	VarioUltra mit Dolphin SuperNova (USB HID)	29
6.2.6	VarioUltra mit Apple MAC OS und VoiceOver	29
6.3	VARIOULTRA ALS BLUETOOTH BRAILLEZEILE VERWENDEN	30
6.3.1	Eine Emulation einstellen	30
6.3.2	Zwei Methoden der Bluetoothpaarung	32
6.3.3	Gepaarte Geräte verbinden und iOS oder Android Geräte aufwecken..	34
6.3.4	VarioUltra über Bluetooth mit einem Windows PC paaren	35
6.3.5	VarioUltra mit COBRA (Bluetooth).....	36
6.3.6	VarioUltra mit JAWS (Bluetooth).....	37
6.3.7	VarioUltra mit Window-Eyes (Bluetooth).....	38
6.3.8	VarioUltra mit NVDA (Bluetooth).....	38
6.3.9	VarioUltra mit einem MAC OS X paaren.....	39

6.3.10	VarioUltra mit einem iOS Gerät paaren	42
6.3.11	VarioUltra mit einem Android Gerät paaren	44
6.4	ZWISCHEN VERBUNDENEN GERÄTEN HIN UND HER SCHALTEN	48
6.5	BLUETOOTHKANÄLE ZUWEISEN.....	49
6.6	TEXT AUS DER ZWISCHENABLAGE AUF DAS VERBUNDENE GERÄT ÜBERTRAGEN	50
6.6.1	Brailletastensimulation.....	50
6.6.2	HID Tastensimulation	52
6.7	VARIOULTRA UND LINUX	53
7	DIE NOTIZGERÄTFUNKTION	57
7.1	BRILLE ZEICHENCODS: COMPUTERBRILLE, KURZSCHRIFT UND VOLLSCHRIFT	57
7.1.1	Brilleschriftarten.....	57
7.1.2	Hauptschalter Computerbraille: Wechsel zwischen Computerbraille und Anwendereinstellung	59
7.1.3	Braille in BRF und RTF Dokumenten.....	60
7.1.4	Braille in Menüs, Meldungen, Eingabefeldern usw.....	61
7.2	EINFÜHRUNG IN DIE NOTIZGERÄTFUNKTION	62
8	TEXTVERARBEITUNG	64
8.1	TEXT SCHREIBEN.....	64
8.2	TEXT LESEN	65
8.3	DOKUMENT ÖFFNEN	65
8.4	ZWISCHEN GEÖFFNETEN DOKUMENTEN WECHSELN.....	67
8.5	LISTE GEÖFFNETER DATEIEN	67
8.6	DOKUMENT SCHLIEßEN	67
8.7	DOKUMENT SPEICHERN	68
8.8	BEARBEITUNGSFUNKTIONEN	69
8.8.1	Markieren	69
8.8.2	Ausschneiden, Kopieren und Einfügen	70
8.8.3	Löschen.....	71
8.8.4	Suchen und Weitersuchen.....	72
8.8.5	Elemente im Suchendialog	72
8.8.6	Ersetzen	73
8.8.7	Dokumente Speichern	74
8.8.8	Speichern	75
8.8.9	Speichern unter	76
8.8.10	Der Durchsuchen-Dialog	77
8.9	NEUES LEERES DOKUMENT ERZEUGEN.....	78
8.10	KONTEXTHILFE.....	78
8.11	TEXTVERARBEITUNG VERLASSEN	79
9	PDF DOKUMENTBETRACHTER	80
9.1	PDF DOKUMENTBETRACHTER STARTEN UND DOKUMENT ÖFFNEN	80
9.2	PASSWORTGESCHÜTZTE PDF-DATEI ÖFFNEN.....	81
9.3	DOKUMENTE MIT TEXT IN SPALTEN.....	81
9.4	LESE- UND NAVIGATIONSBEFEHLE IN EINEM PDF DOKUMENT.....	82
9.5	SEITENNAVIGATION	83
9.6	LINKS IM DOKUMENT ERREICHEN.....	83
9.7	LESEZEICHEN.....	84
9.8	LESEPOSITION UND ANDERE DOKUMENTINFORMATIONEN ABFRAGEN	84

9.9	PDF DOKUMENT ALS TEXTDATEI SPEICHERN	85
9.10	TEXT IN EINEM PDF DOKUMENT MARKIEREN UND KOPIEREN	85
9.11	SUCHEN	86
9.12	PDF DOKUMENTBETRACHTER BEENDEN	87
10	EXCEL BETRACHTER	88
10.1	EXCELDATEI ÖFFNEN UND SCHLIEßEN	88
10.2	EXCELDATEI ALS TEXTDATEI SPEICHERN.....	89
10.3	DEN INHALT VON ZELLEN IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN	89
10.4	DOKUMENTINFORMATION ZUR EXCELDATEI	90
10.5	LESEN VON ZELLEN, REIHEN, ODER SPALTEN	90
10.6	EINZELNE ZELLEN LESEN	90
10.7	TABELLENREIHE LESEN.....	91
10.8	TABELLENSPALTE LESEN.....	91
10.9	MEHRERE TABELLENBLÄTTER IN EINER ARBEITSMAPPE	92
10.10	SUCHEN UND WEITERSUCHEN.....	93
10.11	SPALTENKOPF FESTLEGEN.....	93
10.12	REIHENKOPF FESTLEGEN	94
10.13	ZUORDNUNG DES SPALTEN- ODER REIHENKOPFS ÄNDERN ODER LÖSCHEN.....	94
10.14	ZELLENKOMMENTAR LESEN.....	94
10.15	EXCEL BETRACHTER BEENDEN.....	95
11	TIMER, STOPPUHR UND WECKER	96
11.1	TIMER (EIERUHR)	96
11.2	STOPPUHR.....	97
11.3	WECKER.....	99
11.4	TIMER, STOPPUHR UND WECKER VERLASSEN	100
12	RECHNER.....	101
12.1	ZAHLEN UND RECHENZEICHEN EINGEBEN	101
12.2	BERECHNUNGEN EINGEBEN	102
12.3	RECHNUNGEN BEARBEITEN.....	103
12.4	BEWEGUNGEN IN RECHNUNGEN UND ERGEBNISSEN.....	103
12.5	ZWISCHENABLAGE NUTZEN	104
12.6	EINSTELLUNGEN.....	104
12.7	SPEICHERLISTE UND SPEICHERFUNKTIONEN (MEMORY)	104
12.8	WISSENSCHAFTLICHE MATHEMATISCHE FUNKTIONEN	106
12.9	GRUNDRECHENARTEN	106
12.10	POTENZEN, LOGARITHMEN UND MEHR	106
12.11	WINKELFUNKTIONEN.....	107
12.12	ANWENDERKONSTANTEN	107
12.13	UMRECHNUNGEN	108
12.14	RECHNER VERLASSEN	108
13	DATEIVERWALTUNG	109
13.1	EINFÜHRUNG	109
13.2	ORDNER UND DATEIEN IN DER DATEIVERWALTUNG ERREICHEN.....	109
13.3	ZUSATZINFORMATIONEN ZU DATEIEN UND ORDNERN.....	110
13.4	DATEIEN AUF EINEM USB STICK IN DER DATEIVERWALTUNG	111
13.5	VARIOULTRA ALS EXTERNES LAUFWERK AM COMPUTER VERWENDEN	111

13.6	DATEIVERWALTUNG VERLASSEN.....	112
14	EINSTELLUNGEN	113
14.1	TON- UND VIBRATIONSSIGNALE	113
14.1.1	Einstellungen zur Vibration	113
14.1.2	Gerätelautstärke.....	113
14.2	BRAILLE.....	114
14.2.1	Darstellung	114
14.2.2	Cursor	116
14.2.3	Braille Schriftart	117
14.2.4	Standard Brailletabellen.....	118
14.2.5	Braillepunkte 7 und 8 verbergen oder zeigen.....	119
14.3	DARSTELLUNG	119
14.3.1	Menükurzbefehle	119
14.3.2	Anwahlbuchstaben	120
14.3.3	Vorlagen.....	120
14.3.4	Passworteinstellungen.....	127
14.3.5	Meldungen.....	127
14.4	TASTATUR	128
14.5	DATUM UND UHRZEIT	129
14.6	ENERGIEVERSORGUNG.....	130
14.6.1	Automatische Selbstabschaltung.....	131
14.6.2	Akku	131
14.7	EIN- / AUSGABEPROFILE	133
14.7.1	Neues Ein- / Ausgabeprofil einrichten.....	134
14.7.2	Profil laden	134
14.7.3	Profil und Hauptschalter Computerbraille	135
14.8	EINSTELLUNGEN FÜR DIE BRAILLEZEILENFUNKTION	135
14.8.1	Emulationen in der Braillezeilenfunktion	135
14.8.2	Bluetooth automatisch aktivieren	136
14.8.3	Verbindungsänderung durch Vibration angeben.....	136
14.8.4	Verbindungsänderung durch Meldung angeben	137
14.8.5	Einstellungen für Braille- und HID Tastensimulation	137
14.9	BLUETOOTH.....	139
14.10	DAS MENÜ „SYSTEM“	140
14.10.1	Speicher bereinigen.....	140
14.10.2	Werkseinstellungen wiederherstellen.....	141
14.10.3	Software Update durchführen	141
14.11	EINSTELLUNGEN VERLASSEN	143
15	HILFE.....	144
15.1	HILFE VERLASSEN	144
16	DAS BEFEHLEMENÜ.....	145
16.1	BEFEHLEMENÜ > EINTRAG „DATEI“	145
16.1.1	Neuen Ordner erzeugen	145
16.1.2	Datei oder Ordner öffnen	146
16.1.3	Datei oder Ordner Löschen	147
16.1.4	Datei oder Ordner umbenennen	148
16.1.5	Neues leeres Dokument erzeugen	149

16.1.6	Dokumente in der Textverarbeitung öffnen	150
16.1.7	Dokumente im Lesemodus oder Bearbeitungsmodus öffnen	150
16.1.8	Zwischen geöffneten Dokumenten wechseln	152
16.1.9	Liste geöffneter Dateien	152
16.1.10	Dokumente schließen	152
16.1.11	Dokumente Speichern	153
16.1.12	Speichern	154
16.1.13	Speichern unter	155
16.1.14	Eigenschaften	156
16.2	BEFEHLEMENÜ > EINTRAG "BEARBEITEN"	157
16.2.1	Ausschneiden	157
16.2.2	Kopieren	157
16.2.3	Einfügen	158
16.2.4	Markierungen	159
16.2.5	Suchen	159
16.2.6	Zip Archiv	161
16.2.7	Zip Archiv entpacken	161
16.2.8	Ankerposition	162
16.2.9	Ankerposition setzen und zur Ankerposition springen	162
16.2.10	Zwischen letzter Position und Ankerposition wechseln	163
16.3	BEFEHLEMENÜ > EINTRAG "ANSICHT"	163
16.3.1	Filter	163
16.3.2	Anordnen nach (Sortierung)	164
16.4	BEFEHLEMENÜ > EINTRAG "EXTRAS"	165
16.4.1	Was bedeutet ZIP Archiv?	165
16.4.2	Zip Status	166
16.4.3	Zip Archiv Funktionen	166
16.4.4	Zip-Datei erzeugen	166
16.4.5	Elemente im Dialog „Durchsuchen“ beim Packen	167
16.4.6	Zip Datei entpacken	168
16.4.7	Elemente im Dialog „Durchsuchen“ beim Entpacken	169
16.4.8	Informationen zum Vorgang im Dialog „Status“	170
16.4.9	Zip-Datei öffnen ohne zu entpacken	170
16.4.10	Einzelne Dateien oder Ordner aus einem zip Archiv kopieren	171
16.5	KONVERTIERUNG VON BRF ZU RTF ODER VON RTF ZU BRF	172
16.6	BEFEHLEMENÜ VERLASSEN	172
17	FEHLERBEHEBUNG	173
17.1	GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN	173
18	DEFEKT UND REPARATUR	174
19	EINHALTUNG VON VORSCHRIFTEN	175
19.1	ART DES PRODUKTES	175
19.2	CE KONFORMITÄT	175
19.3	FCC KONFORMITÄT	175
19.4	UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG NACH EU RICHTLINIE 2012/19/EU	176
20	GEWÄHRLEISTUNG	178
21	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	180

22	TECHNISCHE DATEN	184
23	ÜBERSICHT BEFEHLKOMBINATIONEN	185
23.1	VARIOULTRA IOS BEFEHLE	185
23.2	VARIOULTRA BRAILLEBACK BEFEHLE	187
23.3	VARIOULTRA BEFEHLE	188
23.4	JAWS BEFEHLE	192
24	INFORMATIONEN ZUM WIEDEREINSATZ	195
25	GERÄTEBUCH VARIOULTRA	197

1 Über dieses Handbuch

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind jetzt stolzer Besitzer einer neuen VarioUltra und zweifellos möchten Sie nun schnell den Umgang mit dem Gerät lernen. Dieses Handbuch ist Bestandteil des Gerätes. Lesen Sie es aufmerksam durch, es enthält wichtige Hinweise zur Bedienung und Sicherheit. Bewahren Sie das Handbuch immer griffbereit in der Nähe des Gerätes auf. Geben Sie es unbedingt dem nächsten Besitzer weiter.

Der Zweck dieses Handbuches ist, Sie in die wesentlichen Funktionen einzuführen. Dieses Handbuch wendet sich an alle Anwender von VarioUltra. Das Gerät wird einsatzbereit ausgeliefert und kann von Ihnen mit wenigen Handgriffen in Betrieb genommen werden. In diesem Handbuch finden Sie alle Hinweise, die Sie zur Bedienung des Gerätes benötigen. Schritt für Schritt Anleitungen begleiten Sie dabei, und schnell werden Sie mit den verschiedenen Einstellungen und Funktionen vertraut.

Hinweis:

1. Das Gerät wird mit aktivierter Tastensperre ausgeliefert. Bitte schieben Sie den vorderen Schiebeschalter an der linken Geräteseite nach hinten, um die Tastensperre zu lösen.
2. Zum Kennenlernen des Geräts und seiner Tasten empfehlen wir, das Kapitel 5 zu lesen.
3. In Kapitel 7 finden Sie Informationen für die Bluetooth-Paarung und zur USB Verbindung als Braillezeile.
4. Einige Tastenbefehle wenn VarioUltra als Braillezeile mit verschiedenen Screenreadern genutzt wird, finden Sie in Kapitel 26.

Copyright © 2020 VisioBraille GmbH, Oßmaritzer-Straße 4c, 07745 Jena, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens der VisioBraille GmbH vervielfältigt oder in beliebiger Form bzw. mit beliebigen Mitteln weitergegeben, in einer Datenbank oder einem Suchsystem gespeichert werden.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Herausgabe korrekt sind. Weder die VisioBraille GmbH noch ihre Vertreter haften für Fehler oder Weglassungen. Es wird keine Haftung für Schäden aus dem Gebrauch der hierin enthaltenen Informationen übernommen.

Lizenzen und Markenzeichen

Alle Lizenzen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

2 Über VarioUltra



VarioUltra ist die neue Braillezeile von VisioBraille. Sie ist in zwei Versionen mit 20 oder 40 Brailleelementen erhältlich. Jedes Modell verfügt über Cursorrouting, 8-Punkt Brailleeingabe, zwei ergonomischen Leertasten sowie einen Navistick, 4 S- und 6 D- Tasten, Lautsprecher zur Wiedergabe von Signalklängen und ein Vibrationsmodul, wenn es leise sein muss.

Als Besonderheit kann sich die VarioUltra gleichzeitig mit 4 Bluetooth- und einem USB- Gerät verbinden. Die Umschaltung des Brailledisplays zwischen den Quellen erfolgt mit einem Tastendruck. So kann man gleichzeitig mit PC, Tablet **und** Smartphone verbunden sein. Problemlos während der Arbeit mit dem Notebook „mal schnell“ zum Smartphone umschalten um eine SMS zu schreiben und dann sofort mit dem Notebook weiterarbeiten wird so zum Kinderspiel.

Warum Ultra? – Weil sie viel mehr ist, als nur eine ultra coole kontaktfreudige Braillezeile!

Darüber hinaus verfügt sie auch über eine leistungsfähige Textverarbeitung, die auch die Ein- und Ausgabe in Kurzschrift beherrscht. VarioUltra kann Word DOC und DOCX Dateien öffnen und bearbeiten sowie PowerPoint, PDF- und Excel-Dateien anzeigen. Weiterhin besitzt sie einen wissenschaftlichen Taschenrechner. Eine Uhr mit Datumsanzeige, Wecker, Stoppuhr und Count down Timer dürfen auch nicht fehlen. Die Umschaltung zwischen Braillezeile und den anderen Anwendungen erfolgt einfach und jederzeit mit einem Schiebeschalter.


3 Vor dem ersten Einschalten

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Richtigkeit.

3.1 Lieferumfang:

- 1 VarioUltra Braillezeile
- 1 aufklappbare Tasche
- 1 Ladegerät
- 1 Micro USB Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

4 VarioUltra: Ein erster Blick auf das Gerät

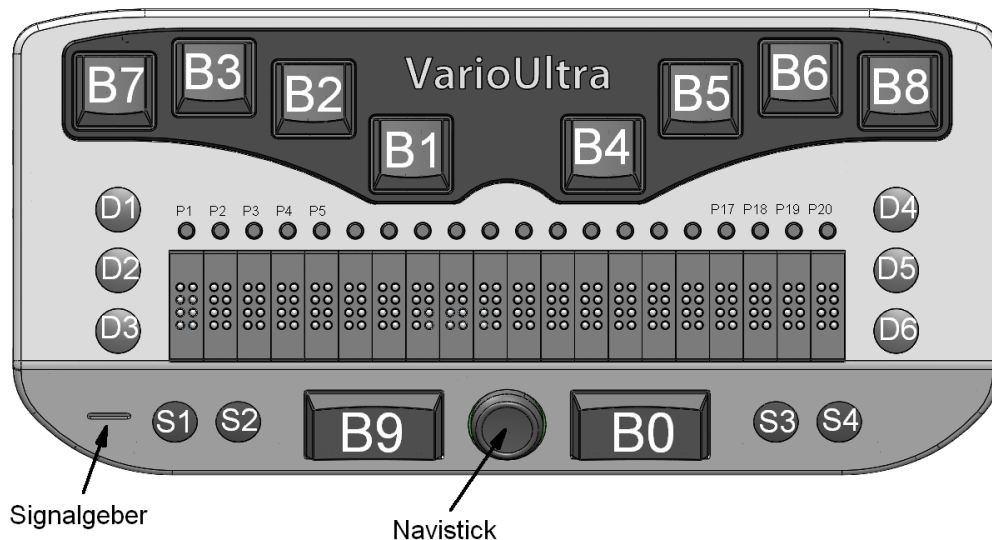

4.1 Oberseite

Auf der Oberseite von VarioUltra befindet sich eine 8-Punkt Brailletastatur, die Brailleelemente der Braillezeile mit Cursorroutingtasten, 6 Displaytasten, 4 Systemtasten, 2 Daumentasten, und ein sogenannter Navistick, der Bewegungen in 5 Richtungen erlaubt. In den nachfolgenden Kapiteln werden diese Tasten genauer beschrieben.

4.1.1 Brailletastatur

Zunächst werden sie bemerken, dass die 8 Tasten nicht nebeneinander in einer Linie angebracht sind, d.h. wenn Sie die Finger Ihrer Hände parallel legen, werden Sie die Tasten für die Braillepunkte 1 und 4 verfehlen. Wenn Sie jedoch Ihre Handflächen ergonomisch etwas nach außen drehen und die Handgelenke mehr zu den Ecken des Geräts zeigen, werden sie feststellen dass die leicht gebogene Anordnung der Brailletasten ideal zur natürlichen Stellung ihrer Finger passt.

In diesem Handbuch sind die Brailletasten mit B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 und B8 bezeichnet. Die beiden äußeren Tasten (B7 ganz links und B8 ganz rechts) werden auch für die Eingabe verschiedener Befehle genutzt. Genauere Erklärungen dazu erfahren Sie weiter unten bei den entsprechenden Kapiteln in diesem Handbuch.

4.1.2 Daumentasten

Legen sie Ihre Hände auf die Oberseite von VarioUltra, so dass die vier Finger der linken Hand auf den vier linken Brailletasten (B1, B2, B3, B7) und die Finger der rechten Hand auf den vier rechten Brailletasten (B4, B5, B6, B8) liegen. Ihre Daumen liegen dann automatisch auf den beiden rechteckigen Tasten, die im weiteren Daumentasten oder B9 und B0 genannt werden. Die linke Daumentaste ist B9, die rechte Daumentaste ist B0. In der Braillezeilenfunktion werden beide Daumentasten als Leertasten genutzt (sofern der Screenreader keine andere Tastenzuordnung vorgibt). In der Notizgerätfunktion wird die linke Daumentaste (B9) als Befehlstaste genutzt, die rechte Daumentaste (B0) ist die Leertaste.

4.1.3 Navistick

Zwischen den beiden Daumentasten befindet sich der sogenannte Navistick. Es ist ein Funktionselement, das Bewegungen in 5 Richtungen (oben, unten, links, rechts) erlaubt und sich in der Mittelposition drücken lässt. Legen Sie einen Finger oder Daumen in die konkave Vertiefung und drücken Sie in die gewünschte Richtung. Durch ein Drücken in die Mitte können Sie Befehle oder Einstellungen innerhalb des Menüs von VarioUltra wählen oder bestätigen.

4.1.4 Systemtasten


Links und rechts neben den Daumentasten befinden sich jeweils zwei kleine, runde Tasten, die im Folgenden als Systemtasten bezeichnet werden. Die Systemtasten haben unterschiedliche Funktionen sowohl in der Braillezeilenfunktion als auch in der Notizgerätfunktion. Die beiden Systemtasten links der linken Daumentaste (B9) werden von links nach rechts als S1 und S2 bezeichnet. Die beiden Systemtasten rechts der rechten Daumentaste (B0) werden von links nach rechts als S3 und S4 bezeichnet. In der Notizgerätfunktion dient ein langer Druck auf die S3 Taste dazu, das Hauptmenü zu öffnen, ein Kurzer Druck auf die S3

Taste öffnet in den jeweiligen Anwendungen das Befehlemenü.

4.1.5 Braillezeile und Displaytasten

Links und rechts neben der Braillezeile befinden sich jeweils drei kleine, runde Tasten. Dies sind die Displaytasten und sie werden mit D1, D2, D3, D4, D5 und D6 bezeichnet. Stellen Sie sich die 6 Tasten als die 6 Punkte eines Braillezeichens vor, das in eine linke Hälfte mit den Tasten D123 und in eine rechte Hälfte mit den Tasten D456 geteilt ist. Die Tasten werden eingesetzt, um die Brailledarstellung nach links, rechts, oben oder unten zu bewegen. Auch werden sie genutzt um andere angeschlossene Geräte zu bedienen. Zum Beispiel, um auf einem Apple IOS Gerät den Home Bildschirm zu erreichen, drücken Sie die Tasten D1D2D5, was dem Braillebuchstaben H entspricht.

4.2 Linke Geräteseite

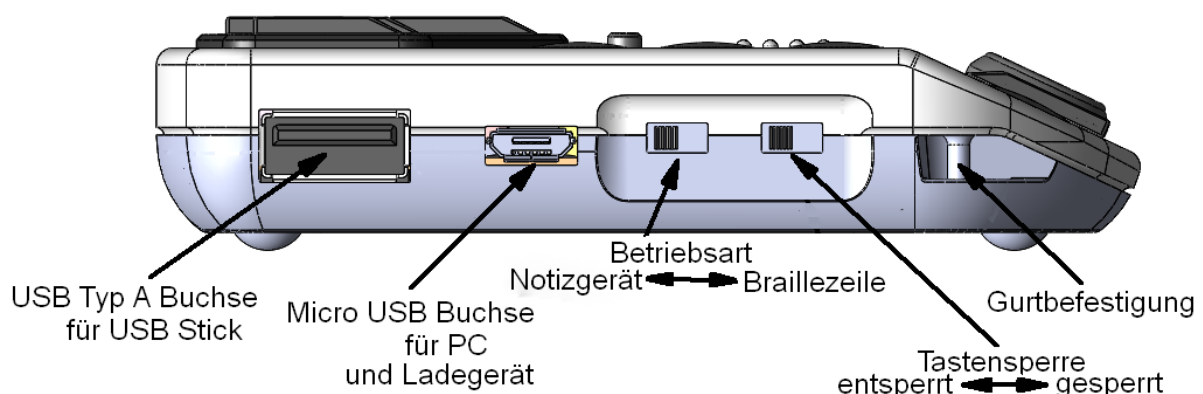


Auf der linken Geräteseite von VarioUltra befinden sich die USB Anschlüsse und zwei Schiebeschalter. Ausgehend von der linken, hinteren Ecke erreichen Sie:

1. Eine USB Typ A Buchse für den Anschluss eines USB Sticks.
2. Eine micro USB Buchse für den Anschluss eines USB Ladeadapters oder für die Verbindung zum Computer.

3. Der Betriebsartschalter). Für die Notizgerätfunktion muss der Schiebeschalter nach hinten geschoben sein. Für die Braillezeilenfunktion muss er nach vorne zu Ihnen hin geschoben sein.
4. Die Tastensperre. Um die Tastensperre zu lösen muss der Schiebeschalter nach hinten geschoben sein. Um die Tasten von VarioUltra zu sperren muss der Schiebeschalter nach vorne zu Ihnen hin geschoben sein.
5. Eine Gurtbefestigung. Eine zweite Gurtbefestigung befindet sich gegenüber auf der rechten Geräteseite. Hier werden die Schlaufen für den Tragegurt befestigt.

4.3 Rechte Geräteseite

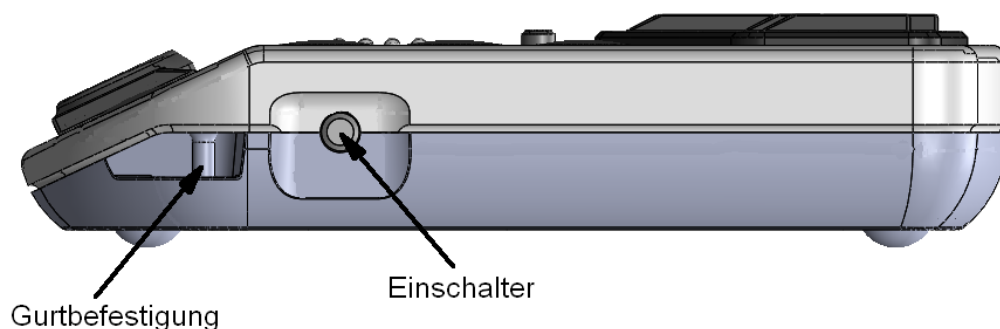

Auf der rechten Geräteseite von VarioUltra befindet sich die Einschalttaste. Durch einen kurzen Druck auf den Einschalter wechselt VarioUltra zwischen Wach- und Schlafzustand (Standby). Wenn Sie den Einschalter länger gedrückt halten, ca. 20 Sekunden, wird ein Gerätereustart ausgeführt und als Fortschrittsanzeige erscheinen die Braillepunkte 7 und 8. Um VarioUltra komplett abzuschalten, halten Sie die Systemtaste S4 gedrückt und drücken Sie kurz auf die Einschalttaste. VarioUltra vibriert und schaltet ab.

Links der Einschalttaste ist die Gurtbefestigung. Eine zweite Gurtbefestigung befindet sich auf der anderen Geräteseite. Die Schlaufen für den Tragegurt werden hier befestigt.

5 Erste Schritte

Durch einen kurzen Druck auf die Einschalttaste wird VarioUltra gestartet. Wenn sich das Gerät vorher in Schlafmodus (Standby) befunden hat, wird es durch diesen Tastendruck aufgeweckt. Es befindet sich wieder in der zuletzt genutzten Anwendung. Wenn das Gerät komplett ausgeschaltet war, beginnt der Startvorgang. Hierbei zeigen fortlaufend von links nach rechts die Braillepunkte 7 und 8 den Fortschritt an.

Je nachdem in welche Richtung der Betriebsartschalter geschoben ist, startet VarioUltra in der Braillezeilenfunktion oder in der Notizgerätfunktion. In der Braillezeilenfunktion wird eine leere Braillezeile angezeigt bzw. die Anzeige des gekoppelten Gerätes. In der Notizgerätfunktion zeigt die Braillezeile die letzte Anwendung bzw. Nach einem Start den ersten Eintrag des Hauptmenüs „Textverarbeitung“.

Hinweis:

Vergewissern Sie sich bitte, dass der Schiebeschalter der Tastensperre nach hinten geschoben ist, andernfalls erfolgt bei Tastendrücken keine Reaktion. Zur Erinnerung: Abschnitt 5.2 erklärt die Tastensperre.

5.1 Schlafmodus (Standby) und Ausschalten

Sie können VarioUltra entweder in Standby oder komplett abschalten. Der Vorteil des Schlafmodus ist, dass VarioUltra sofort nach drücken des Einschalters wieder bereit ist. Der Vorteil beim kompletten Abschalten ist, dass der Akku die Ladung länger hält.

Zum Ausschalten in den Schlafmodus drücken Sie einmal kurz auf die Einschalttaste auf der rechten Geräteseite. Die Brailleanzeige verschwindet sofort und alle Bluetoothverbindungen werden unterbrochen. Wenn Sie VarioUltra nicht nutzen, geht das Gerät nach 10 Minuten automatisch in den Schlafmodus. Details zu diesem automatischen Ausschalten und dem Verändern der Abschaltzeit finden Sie im Kapitel 14.6.1. Solange eine aktive Bluetooth- oder USB Verbindung zu einem anderen Gerät besteht, erfolgt kein Wechsel in den Schlafmodus.

Zum kompletten Abschalten drücken Sie bitte die Systemtaste S4, halten

Sie gedrückt und drücken kurz auf die Einschalttaste. VarioUltra vibriert und schaltet sich dann ab. Wenn VarioUltra über das USB Kabel mit einem Computer oder einem USB Ladeadapter verbunden ist, zeigt die Braillezeile mindestens fünf Vollzeichen und blinkende Punkte 7,8 rechts neben dem letzten Vollzeichen, wenn der Akku geladen wird, oder eine komplette Reihe aus Vollzeichen, wenn der Akku voll aufgeladen ist. Wenn keine USB Verbindung zwischen VarioUltra und einer Stromversorgung besteht, verschwindet die Anzeige auf der Braillezeile.

5.2 Akku von VarioUltra Laden

VarioUltra hat einen eingebauten Akku der über das USB Kabel geladen wird. (Anschlüsse: Micro USB und Standard Type A USB). Das Kabelende mit dem Micro USB Stecker wird in die Micro USB Buchse von VarioUltra gesteckt. Der Micro USB Stecker hat auf der einen flachen Seite des Kontakts fühlbar zwei kleine Erhebungen. Diese Erhebungen müssen nach oben zeigen, um den Stecker mit der richtigen Stellung in die Buchse zu führen. Verbinden Sie den USB Stecker des anderen Kabelendes entweder mit einer USB Schnittstelle am Computer oder mit einem handelsüblichen USB Ladeadapter (800 - 2000 mA, 5 V).

Um Informationen über den Ladezustand zu erhalten, drücken Sie zweimal kurz auf die Systemtaste S3, wenn VarioUltra in der Notizgerätfunktion ist, oder halten Sie die Systemtaste S2 gedrückt und drücken kurz auf die linke Daumentaste B9, wenn VarioUltra in der Braillezeilenfunktion ist.

Hinweise:

Das Laden des Akkus dauert etwa 2.5 Stunden, wenn ein USB Ladeadapter verwendet wird und 3.5 Stunden oder mehr, wenn VarioUltra über eine Computerverbindung geladen wird und / oder das Gerät gleichzeitig genutzt wird.

Eine Akkuladung hält etwa 8 bis 12 Stunden, je nachdem ob eine Bluetoothverbindung aktiv ist usw.

Wenn der Akku komplett entladen ist, reicht es nicht aus, VarioUltra mit einer Stromquelle zu verbinden, um gleich weiter arbeiten zu können. Bitte warten Sie einige Minuten bis der Akku ein Minimum an Ladung bekommen hat. Sobald auf den ersten fünf Elementen der Braillezeile Vollzeichen angezeigt werden und auf dem sechsten Brailleelement die

Punkte 7,8 blinken, ist der Akku genügend geladen, um VarioUltra durch kurzen Druck auf die Einschaltaste einzuschalten.

5.3 Kurzbefehle, Anwahlbuchstaben und Menüelemente

Es gibt zwei Arten von Tastenbefehlen: Kurzbefehle und Anwahlbuchstaben. Kurzbefehle haben oft eine übergreifende Funktion und Sie nutzen das kombinierte Drücken der linken Daumentaste B9 mit anderen Brailletasten. Anwahlbuchstaben funktionieren nur innerhalb von Menüs und erfordern die Eingabe eines einzigen Buchstabens.

5.3.1 Mehr zu den Kurzbefehlen

Kurzbefehle erfordern immer das Drücken der linken Daumentaste B9 zusammen mit anderen Brailletasten, die zumeist einen Braillebuchstaben darstellen und oft zusätzlich die Brailletasten B7 und / oder B8. Wenn Sie daran gewöhnt sind, überwiegend mit 6-Punkt Braille zu arbeiten, mag Ihnen diese Art der Befehlseingabe, nämlich so viele Tasten gleichzeitig zu drücken, umständlich erscheinen. Der Vorteil des gleichzeitigen Drückens der Tasten liegt darin, dass zur Ausführung einer Funktion in VarioUltra nur dieser einzige Befehl eingegeben werden muss.

In diesem Handbuch gibt es zwei verschiedene Arten die Kurzbefehle anzugeben. Beispiel: Wenn der Befehl dazu führen soll, dass Sie die linke Daumentaste B9 zusammen mit den Brailletasten B2 und B3 drücken wird der Befehl wie folgt geschrieben: B9+B2B3. Wenn der Befehl dazu führen soll, dass sie einen Buchstaben oder ein Braillezeichen zusammen mit anderen Brailletasten drücken sollen, wird der Befehl wie folgt geschrieben: c+B8B9 was der allgemeine Befehl zum Kopieren ist.

Kurzbefehle werden außerdem in den Menüs hinter dem Menüeintrag angegeben, um Ihnen das Erlernen der Kurzbefehle zu erleichtern. Wenn Sie also im Hauptmenü auf dem Menüeintrag "Textverarbeitung" stehen, können sie dahinter t+B7B8B9 lesen.

5.3.2 Mehr zu den Anwahlbuchstaben

Die Bezeichnung „Anwahlbuchstabe“ steht für Braillezeichen, durch deren Eingabe Sie innerhalb eines Menüs direkt zu dem zugeordneten Menüeintrag springen. Beispiel: Im Hauptmenü wird durch Eingabe des Braillebuchstabens „t“ sofort der Menüeintrag „Textverarbeitung“ erreicht und die Anwendung geöffnet, oder Sie geben „r“ ein, um die Anwendung „Taschenrechner“ zu öffnen. Die Darstellung von Menüeinträgen besteht aus verschiedenen Segmenten, deren Reihenfolge oder Anzeige Sie in den Einstellungsoptionen verändern können. Standardmäßig beginnt ein Menüeintrag mit ME (als Abkürzung für Menüelement), dann folgt ein einzelnes Zeichen als Anwahlbuchstabe, dann der Name des Eintrags und schließlich wird die Tastenkombination des Kurzbefehles angezeigt, welche innerhalb jeder Anwendung in der Notizgerätfunktion gedrückt und ausgeführt werden kann.

Erinnerung: Anwahlbuchstaben funktionieren nur innerhalb des Menüs, Kurzbefehle funktionieren hingegen anwendungsübergreifend.

5.3.3 Mehr zu den Segmenten

Die Segmente begegnen Ihnen in der Notizgerätfunktion. Es handelt sich dabei um Abkürzungen oder Beschriftungen in Menüs und Dialogen. Beispiele: ME, LE, BS, KF und EF. Weitere Details finden Sie im Kapitel 14.3 Darstellung.

Nachfolgend eine kurze Übersicht der Abkürzungen und ihrer Bedeutungen:

ME: bedeutet Menüeintrag. Die Einträge in Menüs stehen untereinander und werden durch Bewegungen nach oben und unten erreicht und durch Drücken der linken Daumentaste B9 oder Navistick ausgewählt. In den meisten Fällen haben Menüeinträge einen Anwahlbuchstaben, mit dem Sie den Eintrag auswählen können. Durch Eingabe eines zugeordneten Kurzbefehls lässt sich der Eintrag wählen ohne das Menü vorher zu öffnen.

LE: bedeutet Listeneintrag. Die Einträge in Listen stehen nebeneinander und werden durch Bewegungen nach rechts und links ausgewählt. Durch Eingabe des Anfangsbuchstaben eines Listeneintrags können sie direkt zu diesem springen.

BS: bedeutet Befehlsschalter und steht in Beziehung mit Wörtern wie OK, Abbrechen, Ja, und Nein. Diese Worte erscheinen üblicherweise bei Meldungen oder Einstellungsdialogen. Um einen Befehlsschalter zu bestätigen drücken Sie eine Cursorroutingtaste über dem angezeigten Wort oder die linke Daumentaste B9.

KF: bedeutet Kontrollfeld. Kontrollfelder werden gewählt oder abgewählt durch Bewegen des Navisticks nach rechts oder links, durch Drücken einer Cursorroutingtaste oberhalb des Kontrollfeldes oder durch Drücken der rechten Daumentaste B0.

EF: bedeutet Eingabefeld. Hier können oder müssen Sie Text oder Zeichen hineinschreiben.

5.4 Wie Sie einen Befehl, eine Auswahl oder eine Funktion bestätigen

In der Notizgerätfunktion gibt es verschiedene Bereiche, in denen Sie etwas bestätigen können oder müssen. In der Regel wird mit OK bestätigt und der jeweilige Dialog verlassen, oder Sie haben die Wahl zwischen JA und NEIN.

Diese Worte werden entweder direkt angezeigt, oder Sie erreichen sie durch Bewegungen des Navisticks nach unten oder oben.

Wenn sie das gewünschte Wort erreicht haben und bestätigen möchten, drücken Sie entweder den Navistick in der Mitte hinein, oder die linke Daumentaste B9, oder eine der Cursorroutingtasten oberhalb des Wortes.

Ein Beispiel dafür ist die Kontexthilfe, deren Inhalt Sie durch Scrollen mit der Displaytaste D5 lesen und zum Schließen nach unten gehen und den Schalter OK bestätigen.

5.5 Hilfe und Kontexthilfe

VarioUltra hat zwei Hilfefunktionen.

Um die allgemeinen Informationen über VarioUltra und die Handbuchdatei zu erreichen, geben Sie den Befehl h+B7B8B9 ein. Dies öffnet das Hilfemenü. Ein Menüeintrag bringt Sie zu der Handbuchdatei, ein anderer Menüeintrag öffnet den Dialog „Über VarioUltra“. Die Informationen

dort lesen sie durch Scrollen mit den Displaytasten D5 und D2. Zum Verlassen gehen Sie nach unten und bestätigen OK.

Wenn sie den Befehl B9+B2B6 eingeben, öffnet sich die Kontexthilfe mit Informationen zu dem Menüeintrag, Dialogelement oder der Anwendung in der Sie sich momentan befinden, so dass Sie mehr über diese Funktion erfahren. Lesen sie den Hilfetext durch Scrollen mit den Displaytasten D5 und D2. Zum Verlassen gehen Sie nach unten und bestätigen OK.

5.6 Updates für VarioUltra

Updatepakete mit neuer Software für Ihre VarioUltra werden von Zeit zu Zeit als zip-Archiv zum Download auf unseren Webseiten zur Verfügung gestellt. Bitte besuchen Sie den Bereich „Support“ auf <http://www.visiobraille.de>

5.6.1 Anleitung zum Update von VarioUltra:

Wenn auf Ihrem Gerät eine Softwareversion 1.0 installiert ist, wenden Sie sich bitte an den Support Ihres Händlers, um eine aktuellere Softwareversion zu installieren. Wenn auf ihrem Gerät eine Softwareversion 1.1 oder höher installiert ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Laden Sie sich die zip-Datei des Updatepakets herunter. Kopieren Sie die zip-Datei in den internen Speicher „Flashdisk“ von VarioUltra. Verbinden Sie VarioUltra mit der Stromversorgung, entweder über einen USB Ladeadapter oder über die USB Schnittstelle am Computer. Wichtig: Schalten Sie VarioUltra während eines Updatevorganges niemals ab. Drücken Sie gleichzeitig die Brailletasten B7B8 und die Displaytasten D3D6. Nun startet der Update-Vorgang.

Beim Update-Vorgang werden auf VarioUltra die verschiedenen Komponenten des Updatepaketes installiert. Die Routine prüft welche Komponenten bereits auf dem Gerät vorhanden sind und installiert die jeweils neuen Komponenten. Unterschiedliche Anzeigen auf der Braillezeile begleiten die automatischen Installationsschritte.

Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, startet VarioUltra automatisch

neu. Der Updatevorgang dauert einige Minuten.

6 Die Braillezeilenfunktion

6.1 Einführung in die Braillezeilenfunktion

Die große Besonderheit von VarioUltra liegt in der einzigartigen Fähigkeit gleichzeitig mit mehreren Geräten verbunden zu sein. Insgesamt hat VarioUltra 5 Anschlüsse: 1 USB und 4 Bluetooth. Einmal gepaart und verbunden können Sie mit einer einfachen Tastenkombination direkt zwischen den Geräten hin und her schalten. Drücken Sie die Systemtaste S2 und halten Sie diese gedrückt und drücken Sie kurz auf die Brailletaste, welche dem jeweils gepaarten Gerät zugeordnet ist. Dieser Befehl bewirkt zudem, dass auf der Braillezeile kurz eine Meldung zum gewählten Verbindungskanal und Gerät angezeigt wird. Ein verbundenes Android oder iOS Gerät kann auf diese Weise auch aus dem Standby geweckt werden.

Beispiel:

Systemtaste S2 plus Brailletaste B1 wählt den USB Kanal und das dort verbundene Gerät.

Systemtaste S2 plus Brailletaste B4 wählt Bluetoothkanal 1 und das dort verbundene Gerät.

Systemtaste S2 plus Brailletaste B5 wählt Bluetoothkanal 2 usw.

Systemtaste S2 plus Brailletaste B6 wählt Bluetoothkanal 3 usw.

Systemtaste S2 plus Brailletaste B8 wählt Bluetoothkanal 4 usw.

Die nachfolgenden Kapitel geben Anweisungen wie VarioUltra als Braillezeile mit anderen Geräten verbunden wird.

6.2 VarioUltra als USB Braillezeile verwenden

Prüfen Sie zunächst, ob der Betriebsartschalter nach vorne zu Ihnen geschoben ist, damit sich VarioUltra in der Braillezeilenfunktion befindet.

Stecken Sie den micro USB Stecker des USB Kabels in die micro USB Buchse von VarioUltra. Denken Sie bitte daran, dass die beiden kleinen Erhebungen auf der einen flachen Seite nach oben zeigen. Stecken Sie

das andere Ende des USB Kabels in eine USB Schnittstelle Ihres Computers. Der Computer erkennt VarioUltra automatisch als HID Gerät. Sie müssen also keinen speziellen Gerätetreiber installieren.

Gerät. Sie müssen also keinen speziellen Gerätetreiber installieren.

Nachfolgend einige zusätzliche Einstellungen bei Verwendung verschiedener Screenreader.

6.2.1 VarioUltra mit COBRA (USB HID)

Ab COBRA Version 10.1 erkennt der Screenreader die VarioUltra automatisch als USB HID Braillezeile.

USB Verbindung

1. Verbinden Sie das USB Kabel mit der micro USB Buchse von VarioUltra und einer Standard USB Buchse am Windows Computer.
2. Schalten Sie VarioUltra ein, sofern das Gerät noch nicht eingeschaltet ist. Der Computer wird erkennen, dass ein Neues Gerät angeschlossen wurde.
3. Öffnen Sie das Cobra Menü durch zweimaliges schnelles Drücken der linken Umschalttaste. Wählen Sie den Eintrag „Braille > Braillegeräte“.
4. Wählen Sie in der Auswahlliste den Eintrag „VarioUltra PNP“ und den Eintrag „automatisch“.
5. Schließen Sie den Dialog mit „OK“.

6.2.2 VarioUltra mit JAWS (USB HID)

Für JAWS ist ein zertifizierter Treiber für VarioUltra verfügbar. Er unterstützt die Verbindung über USB HID und Bluetooth. Der Treiber Version 15.52 kann von www.visiobrasile.de heruntergeladen werden. Wenn der JAWS Treiber nicht installiert ist, Wird VarioUltra nicht in der Liste zur Auswahl von Braillezeilen bei JAWS angezeigt.

JAWS Treiber installieren:

1. Laden Sie sich den JAWS-Treiber herunter. Es handelt sich um ein zip-Archiv mit der Bezeichnung baumjfwuni.zip, Nach dem Entpacken erhalten Sie die ausführbare Datei BAUMjfwuni.exe.
2. WICHTIG: Wenn JAWS 15 oder höher auf dem Computer läuft, so ist dort wahrscheinlich der alte BAUM JAWS Treiber aktiviert, der noch

keine Unterstützung für VarioUltra beinhaltet. Leider lässt sich dieser alte BAUM JAWS Treiber nicht deinstallieren. Wenn JAWS 14 oder kleiner auf dem Computer läuft und der alte BAUM JAWS Treiber installiert gewesen ist, so ist es ratsam diesen alten BAUM JAWS Treiber auf dem Computer zu deinstallieren, bevor sie den neuen BAUM JAWS Treiber installieren.

3. Starten Sie die Exe-Datei um die Treiberinstallation zu starten. Sie werden durch einen einfachen Installationsdialog geführt, bei dem sie einige Male „Weiter“ bzw. „Next“ und dann „Fertig stellen“ bzw. „done“ bestätigen müssen.
4. Starten Sie anschließend den Computer einmal neu und starten Sie JAWS. Öffnen Sie in JAWS die entsprechende Option zum Einstellen / Auswählen von Braillezeilen.
5. HINWEIS: Sofern sowohl der alte als auch der neue BAUM JAWS Treiber auf dem Computer installiert sind, sind die Einträge für die BAUM Braillezeilen doppelt, aber unterscheiden sich etwas in ihrem Namen. Einträge des alten JAWS Treibers haben im Namen den Zusatz „Display“.
6. Beim Anschluss via USB HID wählen Sie den Eintrag "BAUM UNIVERSAL USB". Beim Anschluss via Bluetooth wählen Sie „BAUM VarioUltra 20“ bzw. „BAUM VarioUltra 40“.

USB Verbindung

1. Installieren Sie den aktuellen VarioUltra Treiber für JAWS.
2. Verbinden Sie das USB Kabel mit der micro USB Buchse von VarioUltra und einer Standard USB Buchse am Windows Computer.
3. Schalten Sie VarioUltra ein, sofern das Gerät noch nicht eingeschaltet ist. Der Computer wird erkennen, dass ein Neues Gerät angeschlossen wurde.
4. Öffnen Sie das JAWS Menü und gehen Sie zum Menüeintrag Optionen > Braille. Ein Dialogfenster mit Braille Grundeinstellungen erscheint.
5. Gehen Sie zum Schalter „Braillezeile hinzufügen“.
6. Ein Dialogfenster öffnet sich mit einer Auswahlliste unterstützter Braillezeilen. Gehen sie innerhalb der langen Liste nach unten zum Eintrag „BAUM Universal USB“. Den gewünschten Eintrag mit der

Leertaste auswählen. Dann mit der Eingabetaste weiter zur nächsten Einstellungsoption.

7. Stellen sie sicher, dass für den ausgehenden Port „USB“ gewählt ist. Wenn Sie mehr als eine Braillezeile eingerichtet haben, muss für jede Braillezeile die zu verwendende Schnittstelle gewählt oder eingetragen werden.
8. Bei mehreren Braillezeilen, wählen Sie die Zeile, die als erste verwendet werden soll. Z.B. VarioUltra.
9. Bestätigen Sie abschließend den Schalter „fertig“.
10. Starten Sie JAWS einmal neu. VarioUltra sollte nun sofort mit JAWS arbeiten.

6.2.3 VarioUltra mit Window-Eyes (USB HID)

Window-Eyes unterstützt die USB Verbindung von VarioUltra als Braillezeile. Auch die Verbindung über Bluetooth ist möglich, aber dazu müssen Sie auf die Emulation „VarioConnect“ umschalten

In beiden Fällen laden Sie bitte zuerst den VarioUltra Treiber für Window-Eyes herunter und installieren ihn.

USB Verbindung

1. VarioUltra mit dem mitgelieferten USB Kabel mit dem Windows Computer verbinden.
2. In Window-Eyes das Menü “Geräte > Braille Display” öffnen und in der Liste “VarioUltra” auswählen.
3. Als Verbindungsart USB auswählen.

6.2.4 VarioUltra mit NVDA (USB HID)

Ab NVDA 2016.1 wird das Bluetooth und das USB HID Protokoll unterstützt, so dass Sie VarioUltra sowohl via Bluetooth als auch via USB Kabel an einem Windows PC nutzen können.

USB Verbindung

1. Schalten Sie VarioUltra in den Braillezeilenmodus (Hinterer Schiebescalter nach vorne schieben)
2. VarioUltra mit dem mitgelieferten USB Kabel mit dem Windows Computer verbinden, ggf. mit S2+B1 den USB Kanal aktivieren.
3. Öffnen Sie das NVDA Menü und gehen Sie zum Eintrag „Einstellungen > BrailleEinstellungen“.
4. Wählen Sie als Braillezeile“BAUM/Humanware/APH“
5. Wählen Sie als Anschlussart “Automatisch”.
6. Es ist empfehlenswert, NVDA so zu konfigurieren, dass die Einstellungen automatisch gespeichert werden.

Hinweis:

In NVDA sind nur wenige Tastenbelegungen vordefiniert: D2 und D5 zum Scrollen. D1 und D3 für Bewegungen einer Zeile nach oben / unten, sowie Navistick für Bewegungen der Navigation (nicht Cursor!).

6.2.5 VarioUltra mit Dolphin SuperNova (USB HID)

Dolphin unterstützt VarioUltra nativ über USB HID ab Version 15.03 von Dolphin Screen Reader und Dolphin SuperNova Magnifier & Screen Reader.

1. Auf dem Windows Computer muss der Dolphin Screen Reader gestartet sein.
2. Verbinden Sie VarioUltra über das USB Kabel.
3. Das Gerät wird automatisch als Braillezeile erkannt. Achten Sie darauf, dass sich VarioUltra im Braillezeilenmodus befindet.

6.2.6 VarioUltra mit Apple MAC OS und VoiceOver

Ab dem Betriebssystem macOS Sierra kann VarioUltra als Braillezeile über USB und Bluetooth verbunden werden.

Wenn auf dem Computer macOS Sierra installiert ist, und keine anderen Braillezeilen verbunden sind, ist es ganz einfach. Schalten Sie VoiceOver ein und verbinden Sie VarioUltra über das USB Kabel. Das ist alles.

Wenn Sie mehrere Braillezeilen an ihrem Mac verbunden haben, gehen Sie zur Option “VoiceOver-Dienstprogramm”, dass Sie unter “Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > VoiceOver erreichen.

Wählen Sie in der Liste die Option „Brailleschrift“. Dort wählen Sie “Anzeige” und stellen Sie sicher, dass VarioUltra als primäre Braillezeile eingestellt ist.

6.3 VarioUltra als Bluetooth Braillezeile verwenden

Viele verschiedene Geräte unterstützen den Einsatz von VarioUltra als Bluetooth-Braillezeile. Die meisten mit Bluetooth ausgestatteten Windows Computer bzw. eingerichteten USB Bluetooth Dongle. Mit Apple Mac Computern auf denen das Betriebssystem Mac OSX (**streichen: Yosemite, Mac OSX El Capitan oder das demnächst freigegebene **) macOS Sierra läuft. Mit Android Smartphones und installiertem BrailleBack und BRLTTY für Android.Version 5.2 oder höher. Mit iPhone oder iPad ab Version iOS 8.3 oder neuer.

bei Geräten mit älterer Technologie. Müssen Sie vor der Bluetoothverbindung eine Emulation einstellen, weil diese Geräte noch keinen eigenen Treiber für VarioUltra haben. Die Emulation bewirkt, dass VarioUltra dann als ältere BAUM Braillezeile VarioConnect erscheint.

6.3.1 Eine Emulation einstellen

Es gibt drei Emulationen für die Bluetoothverbindung:

VarioUltra: Diese sollten Sie nutzen wenn Sie VarioUltra mit einem Windows Computer verbinden, auf dem der Screenreader COBRA ab Version 10.1, JAWS + aktuellem JAWS Treiber, NVDA ab Version 2016.1 läuft, oder mit einem MAC Computer mit OSX Sierra oder einem iPhone / iPad ab iOS 8.3. Es ist die Standardemulation.

VarioConnect: Diese müssen Sie während der Paarung nutzen, wenn Sie VarioUltra mit einem Android Gerät verbinden. Wählen Sie diese Emulation auch wenn Sie VarioUltra über Bluetooth an einen Windows Computer verbinden, auf dem der Screenreader Window-Eyes läuft. VarioUltra 20 emuliert eine VarioConnect 24. d.h. bei der Anzeige gehen 4 Zeichen verloren.

- VarioUltra 40 emuliert eine VarioConnect 40

- Pronto: Diese müssen Sie nutzen, wenn Sie VarioUltra mit einem Apple iOS Gerät mit iOS 7 oder 8 verbinden.
- VarioUltra 20 emuliert einen Pronto! 18.
- VarioUltra 40 emuliert einen Pronto! 40.

Zum Einstellen einer Emulation gehen Sie wie folgt vor:

1. Prüfen Sie zunächst, ob der Betriebsartschalter nach hinten geschoben ist, damit sich VarioUltra in der Notizgerätfunktion befindet.
2. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen“.
 - a. Nutzen Sie entweder den Anwahlbuchstaben “e”, oder gehen Sie mit den Displaytasten D1 oder D3 oder dem Navistick nach oben oder unten.
 - b. Wenn “Einstellungen” auf der Braillezeile gezeigt wird, drücken sie die linke Daumentaste B9, eine Cursorroutingtaste über dem Wort oder den Navistick.
3. Nachdem sich das Menü “Einstellungen” geöffnet hat, befinden Sie sich auf dem ersten Untermenüeintrag „Ton- und Vibrationssignale“. Gehen Sie mit der Displaytaste D1 oder dem Navistick nach oben, bis der Menüeintrag „Braillezeilenemulation“ erscheint.
 - a. Bestätigen Sie den Eintrag durch Drücken der linken Daumentaste B9, durch Drücken des Navisticks oder indem Sie eine Cursorroutingtaste oberhalb des Wortes drücken.
4. Der Dialog Braillezeilenemulation enthält eine waagerechte Liste mit drei Einträgen: VarioUltra, VarioConnect, und Pronto. Nutzen Sie den Navistick um sich nach rechts oder links durch die Liste zu bewegen und die gewünschte Emulation zu wählen.
5. Drücken Sie die linke Daumentaste, B9, um die Auswahl zu bestätigen und den Dialog zu verlassen.
6. Sie befinden sich wieder im Menü Einstellungen auf dem Eintrag „Braillezeilenemulation“.
7. Bewegen Sie den Navistick nach links oder drücken sie etwas länger auf die Systemtaste S3, um das Untermenü zuzuklappen. Sie sind wieder im Hauptmenü auf dem Eintrag „Einstellungen“.

Hinweis:

Die bei der ersten Bluetooth-Paarung gewählte Emulation muss auch für die Paarung aller weiteren Bluetooth-Geräte verwendet werden. Andernfalls kann man nicht zwischen verschiedenen verbundenen Geräten wechseln.

Wenn nur iOS Geräte verbunden werden sollen, wählt man sinnvollerweise die VarioUltra Emulation. Wenn Android und iOS Geräte verbunden werden sollen, muss man die VarioConnect Emulation für die Paarung aller Geräte nutzen.

6.3.2 Zwei Methoden der Bluetoothpaarung

Bei einer Bluetoothpaarung suchen und finden sich beide Geräte und tauschen intern Informationen zur Wiedererkennung aus (PIN).

Methode 1: Die Paarung wird von VarioUltra eingeleitet und das andere Gerät reagiert auf die Paarungsanfrage.

Methode 2: Die Paarung wird von dem anderen Gerät eingeleitet und VarioUltra reagiert auf die Paarungsanfrage. Diese Methode ist ab VarioUltra Version 1.33 möglich.

Für die reine Braillezeilenfunktion sind beide Paarungsmethoden geeignet. Für die Nutzung der HID Tastensimulation und das Aufwecken eines Android oder iOS Smartphones aus dem Standby, müssen die Geräte über Methode 2 gepaart sein.

6.3.2.1 Methode 1 in Kurzform

1. In VarioUltra: Stellen Sie die gewünschte Bluetoothemulation ein.
2. Am anderen Gerät: Bei iOS Schalten Sie Bluetooth ein und bleiben Sie in den Bluetooth-einstellungen.
3. Bei Android Öffnen Sie BrailleBack, wählen Sie unter Verbindung Bluetooth.
 - a. Bei Windows Computern: Öffnen Sie die Bluetooth-einstellungen, aktivieren Bluetooth und erlauben das Finden von Geräten.
 - b. Bei MAC Computern: Öffnen Sie die Systemeinstellungen und aktivieren Bluetooth.
4. In VarioUltra: Öffnen Sie den Bluetoothdialog, schalten Bluetooth ein und suchen nach Geräten.

5. Wählen Sie in der Liste „gefundene Geräte“ den Namen des gewünschten Gerätes und bestätigen Sie den Schalter „Paaren“.
6. Am anderen Gerät: Bei IOS, MAC und Android öffnet sich ein Eingabefeld. Geben Sie als PIN die Ziffernfolge 1111 ein und bestätigen Sie „koppeln“.
 - a. Bei Windows: Bestätigen Sie die Verbindungsanfrage, geben Sie als Paarungsschlüssel 1111 ein. Und folgen Sie den Anweisungen zu fortfahren.
7. VarioUltra zeigt eine Meldung zur erfolgreichen Paarung. Bestätigen Sie diese Mit OK.
8. Am anderen Gerät: bei iOS und MAC die VoiceOver Einstellungen öffnen und unter Brailleggeräte VarioUltra doppeltippen bzw. auswählen.
 - a. Bei Windows in den Screenreadereinstellungen VarioUltra auswählen und die Comportnummer des ausgehenden Bluetoothkanals eintragen.

6.3.2.2 Methode 2 in Kurzform

1. In VarioUltra: Stellen Sie die gewünschte Bluetoothemulation ein. Bluetooth einschalten und den Bluetoothdialog geöffnet lassen.
2. Am anderen Gerät: Bei IOS die Brilleinstellungen von VoiceOver öffnen, auf den Eintrag "VarioUltra" doppeltippen, die PIN "1111" eingeben und auf "Koppeln" doppeltippen.
 - a. Bei Android oder PC: Bluetooth einschalten und nach Bluetoothgeräten suchen. Sofern das Gerät eine eigene Bluetooth PIN generiert und anzeigt, diese sich merken. Ansonsten Ziffernfolge 1111 als PIN verwenden.
3. Bei VarioUltra öffnet sich das PIN Eingabefeld. 1111 ist vordefiniert. Bestätigen oder den am anderen Gerät angezeigte Paarungsschlüssel eingeben und mit OK bestätigen.
4. VarioUltra zeigt eine Meldung zur erfolgreichen Paarung. Bestätigen Sie diese Mit OK.
5. Bei Windows in den Screenreadereinstellungen VarioUltra auswählen und die Comportnummer des ausgehenden Bluetoothkanals eintragen.

6.3.3 Gepaarte Geräte verbinden und iOS oder Android Geräte aufwecken

Gepaarte Geräte können sich automatisch verbinden, wenn sie eingeschaltet oder aus dem Standby geweckt werden. Bitte beachten Sie die folgenden Regeln.

1. Beide Geräte müssen in Reichweite sein.
2. VarioUltra einschalten oder aufwecken und in den Braillezeilenmodus schalten.
3. Sicherstellen, dass Bluetooth aktiv ist. Dazu einfach einen beliebigen Bluetoothkanal mit S2 + B4, B5, B6 oder B8 wählen.
4. Nun das andere Gerät z.B. iPhone einschalten oder aufwecken.
5. Nach wenigen Sekunden finden sich beide Geräte. Bei iPhone / iPad muss VoiceOver an sein, damit nach Bluetooth Braillezeilen gesucht wird.
6. Beim Trennen möglichst zuerst das iPhone in den Standby schicken.

Wenn sich ein Gerät über Bluetooth verbindet oder trennt, vibriert VarioUltra standardmäßig um den geänderten Verbindungszustand zu signalisieren. Einmal bedeutet Kanal 1, zweimal Kanal 2 usw.

Wenn das iPhone an ist und eine ausgeschaltete VarioUltra eingeschaltet wird, kann keine automatische Verbindung gelingen.

Wenn VarioUltra und das iPhone an sind, aber Bluetooth am iPhone aus ist, kommt es nach bloßem einschalten von Bluetooth am iPhone ebenfalls nicht zur automatischen Verbindung

Grund: iPhone sucht nur innerhalb von 8 Sekunden nach dem aufwecken nach gepaarten Bluetoothgeräten in Reichweite. In solchen Fällen iPhone schlafen legen und aufwecken.

Android oder iOS Geräte lassen sich durch einen Tastendruck auf VarioUltra aus dem Standby aufwecken. Dazu drückt man an VarioUltra in der Braillezeilenfunktion die Tasten des zugewiesenen Bluetoothkanals, S2+Bx, und wartet ca. 10 Sekunden.

Voraussetzung

Die Bluetoothpaarung wurde von iOS / Android Gerät eingeleitet

Bei der Paarung wurde die VarioUltra Emulation verwendet,

Die Geräte sind gepaart,
Dem Gerät ist ein Bluetoothkanal zugewiesen
Das Gerät ist in Standby und in Reichweite:

6.3.4 VarioUltra über Bluetooth mit einem Windows PC paaren

Die Paarung und Verbindung über Bluetooth variiert bei den verschiedenen Windows Computern je nach Bluetooth-Chip und Betriebssystem. Nachfolgend stellvertretend unsere Erfahrungen mit einem Dell Laptop mit Windows 7.

1. Stellen Sie sicher, dass auf dem Windows PC Bluetooth Aktiviert ist und dass das Finden von Bluetoothgeräten erlaubt ist. Auf unserem Dell PC sind diese Einstellungen unter Control Panel > Devices and Printers > Change Bluetooth Settings zu finden.
2. Im Hauptmenü von VarioUltra wählen Sie Einstellungen > Bluetooth, und aktivieren Sie das Kontrollfeld.
3. Gehen Sie nach unten zum Schalter „Geräte suchen“ und bestätigen ihn durch Drücken von B9. Auf der Braillezeile erscheint eine Meldung, dass nach Geräten gesucht wird.
4. Sobald das Suchen beendet wird, werden die Namen der gefundenen Geräte in einer waagerechten Liste, die mit den Buchstaben LI beginnt, angezeigt. Bewegen Sie den Navistick nach links oder rechts bis sie den Namen des gewünschten Windows PCs gefunden haben.
5. Wenn der Name des PCs gefunden wurde, gehen Sie mit dem Navistick nach unten und bestätigen den Schalter „Paaren“.
6. Der Windows PC zeigt eine Meldung, dass ein Bluetooth Gerät eine Paarung versucht und will, dass Sie fortfahren. Sie müssen entweder mit der linken Maustaste auf diese Meldung klicken oder nutzen Sie bei Ihrem Screenreader die Taste, mit welcher ein linker Mausklick ausgeführt wird.
7. Ein Dialog mit einem Eingabefeld öffnet sich am Bildschirm. Schreiben Sie die Zahlenfolge 1111 als Paarungsschlüssel hinein und gehen Sie zum Schalter „Next“ um fortzufahren. Nach einer kurzen Zeit sollten Sie eine Bestätigungsmeldung erhalten, dass das Gerät (VarioUltra) erfolgreich mit ihrem Computer gepaart wurde.

8. Auf VarioUltra sollte eine Meldung erscheinen, dass Ihr Windows PC erfolgreich gepaart wurde.
9. Gehen Sie mit dem Navistick nach unten und Bestätigen Sie den Schalter OK.
10. Jetzt können Sie an VarioUltra den Betriebsartschalter nach vorne schieben, um VarioUltra in die Braillezeilenfunktion zu bringen. Wählen Sie den Bluetoothkanal, über den Ihr Computer verbunden ist.

Hinweis:

Wenn Sie die Absicht haben VarioUltra mit einem Screenreader als Braillezeile zu nutzen, ist es wichtig den bei der Paarung erzeugten virtuellen Comport zu kennen. Diesen finden Sie bei den Geräteeigenschaften. Gehen Sie zum Eintrag "Geräte und Drucker", dort finden sie VarioUltra. Öffnen Sie dann das Kontextmenü (Kontextmenütaste oder rechte Maustaste). Im sich öffnenden Menü wählen Sie "Eigenschaften". Im Eigenschaftendialog gehen Sie zu "Allgemein" und dann mit der Pfeiltaste nach rechts zu "Hardware". Dieses wählen und Sie erreichen die verwendeten Comports. Bei unserem Windows 7 Computer zeigt die Geräteliste "Standard Serial over Bluetooth link (COM10)", etc. Merken Sie sich diese Comport Nummer im Gedächtnis, weil sie später nötig ist, wenn Sie am Screenreader z.B. bei JAWS den Comport auswählen oder eintragen müssen.

6.3.5 VarioUltra mit COBRA (Bluetooth)

1. VarioUltra muss erfolgreich mit dem Windows Computer gepaart sein.
2. Auf dem Windows Computer den Bluetooth Gerätemanager öffnen. In der Liste der gepaarten Geräte sollte VarioUltra angezeigt werden.
3. Gehen Sie mit Tab oder den Pfeiltasten zu "VarioUltra" und öffnen sie den Eigenschaften-Dialog. Prüfen Sie, ob einer der 4 Kanäle aktiv ist. Speichern Sie die Einstellungen.
4. Öffnen Sie erneut den Eigenschaften-Dialog und schauen Sie, welche Kanalnummer für den ausgehenden Port von VarioUltra verwendet wird.
5. Öffnen Sie das COBRA Menü und gehen Sie zum Eintrag Braille > Braillegeräte. Ein Dialogfenster für die Braille Geräteeinstellungen erscheint.

6. Gehen Sie zum Schalter „Manuelle Gerätekonfiguration“.
7. Ein Dialogfenster öffnet sich mit einer Auswahlliste unterstützter Braillezeilen. Gehen sie innerhalb der langen Liste nach unten zum Eintrag „VarioUltra 20“ oder „VarioUltra 40“.
8. Wählen Sie in der Auswahlliste für den ausgehenden Port die in Schritt 4 ermittelte Comport Nummer. Speichern Sie die Einstellung mit dem Schalter „Gerät hinzufügen“
9. Bei mehreren Braillezeilen, wählen Sie die Zeile, die als erste verwendet werden soll. z.B. VarioUltra.
10. Bestätigen Sie abschließend den Schalter „OK“.

6.3.6 VarioUltra mit JAWS (Bluetooth)

1. Installieren Sie den aktuellen VarioUltra Treiber für JAWS.
2. VarioUltra muss erfolgreich mit dem Windows Computer gepaart sein.
3. Auf dem Windows Computer den Bluetooth Gerätemanager öffnen. In der Liste der gepaarten Geräte sollte VarioUltra angezeigt werden.
4. Gehen Sie mit Tab oder den Pfeiltasten zu “VarioUltra” und öffnen sie den Eigenschaften-Dialog. Prüfen Sie, ob einer der 4 Kanäle aktiv ist. Speichern Sie die Einstellungen.
5. Öffnen Sie erneut den Eigenschaften-Dialog und schauen Sie, welche Kanalnummer für den ausgehenden Port von VarioUltra verwendet wird.
6. Öffnen Sie das JAWS Menü und gehen Sie zum Menüeintrag Optionen > Braille. Ein Dialogfenster für die Braille Grundeinstellungen erscheint.
7. Gehen Sie zum Schalter „Braillezeile hinzufügen“.
8. Ein Dialogfenster öffnet sich mit einer Auswahlliste unterstützter Braillezeilen. Gehen sie innerhalb der langen Liste nach unten zum Eintrag „VarioUltra 20“ oder „VarioUltra 40“. Den gewünschten Eintrag mit der Leertaste auswählen. Dann mit der Eingabetaste weiter zur nächsten Einstellungsoption.
9. Stellen sie für den ausgehenden Port die in Schritt 5 ermittelte Nummer ein.

10. Wenn Sie mehr als eine Braillezeile eingerichtet haben, muss für jede Braillezeile die zu verwendende Schnittstelle gewählt oder eingetragen werden.
11. Bei mehreren Braillezeilen, wählen Sie die Zeile, die als erste verwendet werden soll. Z.B. VarioUltra.
12. Bestätigen Sie abschließend den Schalter „fertig“.
13. Starten Sie JAWS einmal neu. VarioUltra sollte nun sofort mit JAWS arbeiten.

6.3.7 VarioUltra mit Window-Eyes (Bluetooth)

1. Laden Sie zuerst den VarioUltra Treiber für Window-Eyes herunter und installieren ihn.
2. Die Emulation muss auf "VarioConnect" oder „Pronto“ umgestellt sein.
3. VarioUltra muss unter dieser Emulation erfolgreich mit dem Windows Computer gepaart sein.
4. Auf dem Windows Computer den Bluetooth Gerätemanager öffnen. In der Liste der gepaarten Geräte sollte VarioConnect bzw. Pronto angezeigt werden.
5. Gehen Sie mit Tab oder den Pfeiltasten zu "VarioConnect" und öffnen sie den Eigenschaften-Dialog um einen der vier seriellen Kanäle zu bestätigen. Speichern Sie die Einstellungen.
6. Öffnen Sie erneut den Eigenschaften-Dialog und schauen Sie, welche Kanalnummer für den ausgehenden Port von VarioUltra verwendet wird.
7. In Window-Eyes das Menü "Geräte > Braille Display" öffnen und in der Liste "BAUM VarioConnect 24/32/40" bzw. Pronto auswählen.
8. Als Schnittstelle die unter Schritt 4 ermittelte Nummer des ausgehenden Bluetoothkanal auswählen.
9. Den Schalter "Aktivieren" wählen und die Meldung bestätigen.

6.3.8 VarioUltra mit NVDA (Bluetooth)

Ab NVDA 2015.4 wird VarioUltra in der VarioUltra Emulation als Bluetoothbraillezeile unterstützt.

1. VarioUltra muss erfolgreich mit dem Windows Computer gepaart sein.

2. Auf dem Windows Computer den Bluetooth Gerätemanager öffnen. In der Liste der gepaarten Geräte sollte VarioUltra angezeigt werden.
3. Gehen Sie mit Tab oder den Pfeiltasten zu "VarioUltra" und öffnen sie den Eigenschaften-Dialog. Prüfen Sie, ob einer der 4 Kanäle aktiv ist. Speichern Sie die Einstellungen.
4. Öffnen Sie erneut den Eigenschaften-Dialog und schauen Sie, welche Kanalnummer für den ausgehenden Port von VarioUltra verwendet wird.
5. Öffnen Sie das NVDA Menü und gehen Sie zum Eintrag „Einstellungen > Brailleeinstellungen“.
6. Wählen Sie als Braillezeile "BAUM/Humanware/APH"
7. Wählen Sie die ausgehende serielle Bluetoothschnittstelle für VarioUltra die Sie im Schritt 4 ermittelt haben, und bestätigen Sie "OK".
8. Es ist empfehlenswert, NVDA so zu konfigurieren, dass die Einstellungen automatisch gespeichert werden.

Hinweis:

In NVDA sind nur wenige Tastenbelegungen vordefiniert: D2 und D5 zum Scrollen. D1 und D3 für Bewegungen einer Zeile nach oben / unten, sowie Navistick für Bewegungen der Navigation (nicht Cursor!).

6.3.9 VarioUltra mit einem MAC OS X paaren

In diesem Kapitel werden die Schritte genannt, um VarioUltra über Bluetooth mit Mac OSX Sierra oder Yosemite und El Capitan als Braillezeile zu paaren. Sie können die Emulation „VarioUltra“ nutzen. Wichtig: VarioUltra und ältere Mac OS X Versionen sind nicht kompatibel.

1. Am Mac Computer: Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Bluetooth. Schalten Sie Bluetooth ein, falls es ausgeschaltet ist.
2. An VarioUltra: Stellen Sie die Notizgerätfunktion ein, indem Sie den Betriebsartschalter nach hinten schieben.
 - a. HINWEIS ZUR EMULATION: VarioUltra wird von Mac OS X Yosemite oder El Capitan direkt unterstützt. Achten Sie daher darauf, die Emulation "VarioUltra" einzustellen.
3. Ausgehend vom Hauptmenü in VarioUltra, bewegen Sie den Navistick nach oben oder unten bis zum Eintrag „Einstellungen“ und bestätigen ihn mit B9. Oder Sie geben den Anwahlbuchstaben "e" ein.

4. Bewegen Sie den Navistick nach oben oder unten bis zum Eintrag "Bluetooth" und drücken Sie B9.
5. Der Bluetoothdialog öffnet sich und Sie sind auf dem Kontrollfeld, um Bluetooth ein oder auszuschalten. Standardmäßig ist Bluetooth nach einem Geräteneustart ausgeschaltet.
6. Das Kontrollfeld ist durch zwei Klammern () dargestellt. Bei gewähltem Kontrollfeld ist ein "g" von den Klammern eingeschlossen, und bedeutet, dass Bluetooth gewählt ist. Um den Zustand zu ändern, drücken Sie die rechte Daumentaste B0 oder Bewegen den Navistick nach links oder rechts, oder Drücken Sie die Cursorroutingtaste über dem Kontrollfeld.
7. Wenn das Kontrollfeld gewählt wird, erscheint für einige Sekunden die Meldung "Bluetooth wird eingeschaltet. Bitte warten. ". Warten Sie bis diese Meldung verschwindet und bewegen Sie dann den Navistick nach oben oder unten zum Schalter „Geräte suchen“ und drücken B9.
8. Eine Meldung informiert, dass nach Bluetoothgeräten in Reichweite gesucht wird. Anschließend sind sie in einer waagerechten Liste, in welcher die Namen der gefundenen Geräte nebeneinander stehen. Auch die Namen von bereits gepaarten Geräten werden angezeigt. Gehen Sie in der Liste mit dem Navistick nach rechts oder links, bis der Name ihres Mac Computers angezeigt wird. Erinnerung: Um bei VarioUltra 20 lange Namen vollständig zu lesen, scrollen sie mit D5.
9. Gehen Sie nun mit dem Navistick nach unten zum Schalter "Paaren" und drücken B9 oder eine Cursorroutingtaste über dem Wort „Paaren“.
10. Eine Meldung informiert, dass VarioUltra eine Paarung versucht.
11. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit nun zum Mac Computer. Wenn die Paarung normal verläuft, sollte der Mac einen Dialog öffnen, in welchem Sie als Code die Ziffernfolge 1111 eingeben und dann „Paaren“ bestätigen.
12. Eine Meldung auf VarioUltra informiert dann, dass die Paarung mit dem Mac erfolgreich ist.
13. Am Mac: Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Bedienhilfen und wählen den Schalter " VoiceOver-Dienstprogramm öffnen..."

14. Im VoiceOver Dienstprogrammdialog gehen Sie mit dem Cursor nach unten bis Sie den Schalter "Brailleschrift" angesagt bekommen und wählen diese Option.
15. Im Bereich "Brailleschrift" wechseln Sie von der Registerkarte "Layout" zur Registerkarte "Anzeige". Dazu drücken Sie die Tabulatortaste so oft bis "Layout" angesagt wird und ab diesem Punkt gehen Sie mit dem Cursor nach rechts bis "Anzeige" angesagt wird und drücken dann zum Bestätigen die Leertaste.
16. Drücken Sie wieder die Tabulatortaste bis Sie Braille Displays Tabelle erreichen. Drücken Sie dann die Tabulatortaste bis "Hinzufügen" angesagt wird und bestätigen mit der Leertaste.
17. Jetzt beginnt der Mac nach gepaarten Geräten zu suchen. Wenn VoiceOver sagt, dass eine neue Zeile hinzugefügt wurde, gehen Sie am Mac mit Steuerung-Wahl-Umschalt und Pfeiltaste nach unten bis "BAUM VarioUltra" angesagt wird. Wählen sie dann den Schalter "Auswählen" um zu verbinden.
18. In Schritt 2 haben Sie VarioUltra auf die Betriebsart Notizgerätfunktion umgestellt. Nun, nach erfolgreicher Paarung beider Geräte, muss VarioUltra auf die Braillezeilenfunktion umgestellt werden. Schieben Sie also den Betriebsartschalter nach vorne zu sich hin.
19. Jetzt muss nur noch an VarioUltra der Bluetoothkanal gefunden werden, über den die Verbindung zum Mac läuft. Hierzu an VarioUltra die Systemtaste S2 drücken und gedrückt halten und dann die Brailletasten B4, B5, B6 oder B8 drücken um den Bluetoothkanal 1, 2, 3 oder 4 einzustellen.
 - a. Nach drücken der Tastenkombination zur Auswahl des Bluetoothkanals, z.B. S2+B4 für Kanal 1, wird für einige Sekunden eine Hinweismeldung angezeigt: BT bedeutet Bluetooth, dann eine Zahl von 1 bis 4 für den jeweiligen Kanal. Dahinter wird der Name des verbundenen Geräts angezeigt, sofern an diesem Kanal ein Gerät verbunden ist. Wenn der Gerätenamenname in Klammern steht, ist das Gerät diesem Kanal zugewiesen, aber momentan nicht verbunden.
20. Sobald Sie den Kanal gefunden haben, bei dem der Name des Mac Computers angezeigt wird, ist die Paarung und Verbindung abgeschlossen.

6.3.10 VarioUltra mit einem iOS Gerät paaren

Ab iOS 8.3 wird VarioUltra in der Emulation „VarioUltra“ unterstützt. Bei iOS 7 bis 8.2 muss in VarioUltra die Emulation „VarioConnect“ oder „Pronto“ gewählt sein.

1. Bei VarioUltra: Wählen Sie die richtige Emulation.
2. Beim iOS Gerät: Gehen Sie zu „Einstellungen“ und wählen Sie die Bluetoothoption. Schalten sie Bluetooth ein, wenn es ausgeschaltet ist.
3. Bei VarioUltra: Achten Sie darauf, dass die Notizgerätfunktion eingeschaltet ist, indem sie den Betriebsartschalter auf der linken Geräteseite nach hinten von sich weg schieben.
4. Gehen Sie im Hauptmenü durch Bewegungen nach oben oder unten zum Eintrag „Einstellungen“ und wählen Sie den Eintrag durch Drücken der linken Daumentaste B9.
5. Gehen Sie nach oben oder unten bis zum Eintrag „Bluetooth“ und wählen Sie den Eintrag mit B9.
6. Auf der Braillezeile wird nun der Bluetoothdialog angezeigt mit dem Kontrollfeld „Bluetooth ein / aus“. Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet.
7. Wenn das Braillemodul zwischen den Klammern am Anfang des Eintrags leer ist, bedeutet dies, dass das Kontrollfeld nicht gewählt ist. Um Bluetooth zu aktivieren drücken Sie die Cursorroutingtaste über dem leeren Feld, oder bewegen Sie den Navistick nach rechts, oder drücken Sie die rechte Daumentaste B0. .
8. Während sich Bluetooth einschaltet erhalten Sie die Meldung „Bitte warten“. Nach wenigen Sekunden verschwindet die Meldung automatisch. Bewegen sie dann den Navistick nach unten oder oben bis zum Schalter „Geräte suchen“ und wählen ihn durch Drücken von B9.
9. Sie erhalten eine Meldung zu warten, während nach Bluetoothgeräten in Reichweite gesucht wird. Sobald das Suchen beendet ist, stehen Sie in einer Liste mit den Namen der gefundenen Geräte. Wenn mehrere Geräte gefunden wurden, gehen Sie bitte mit dem Navistick nach links oder rechts um die Namen der einzelnen gefundenen Geräte zu erreichen.

10. Wenn Ihnen in der Liste der Name des gewünschten Bluetoothgeräts gezeigt wird, gehen Sie mit dem Navistick nach unten bis zum Schalter „Paaren“ und wählen Sie diesen mit B9. Oder indem Sie eine Cursorroutingtaste oberhalb des Wortes “Paaren” drücken. Eine Meldung informiert, dass VarioUltra die Paarung versucht.
11. Wenden Sie sich jetzt zu Ihrem iOS Gerät. Wenn die Paarung wie vorgesehen erfolgt, zeigt Ihnen der Bildschirm des iOS Geräts die Option zur Eingabe eines PIN Codes. Geben Sie die Ziffern 1111 ein und bestätigen Sie „Koppeln“ auf dem iOS Gerät.
12. Bei erfolgreicher Paarung erhalten Sie auf VarioUltra eine entsprechende Meldung angezeigt. Bestätigen Sie den Schalter „OK“.
13.  Hinweis: Nach der Paarung meldet das iOS Gerät in den Bluetooth-Einstellungen, dass VarioUltra NICHT verbunden ist. Das ist normal. Versuchen Sie nicht, an dieser Stelle VarioUltra zu wählen oder zu verbinden, denn es wird nicht funktionieren. Es ist erforderlich in die Einstellungen von VoiceOver zu wechseln.
14. Um die VoiceOver Einstellungen zu erreichen, öffnen Sie die allgemeinen Einstellungen, wählen „Bedienhilfen“, dann „VoiceOver“ und dann „Blindenschrift“ bzw. „Braille“.
15. Im Bereich “Blindenschrift” bzw. “Braille” erhalten Sie eine Liste mit Braillegeräten, die sie verbinden können. Sofern keine andere Bluetoothbraillezeile in Reichweite ist, sollte nur die BAUM Braillezeile angezeigt werden.
 - Ab iOS 8.3 mit der Emulation „VarioUltra“ wird der Name „VarioUltra“ angezeigt.
 - Unter iOS 7 bis 8.2 wird VarioUltra, je nach eingestellter Emulation als „Pronto“ oder „VarioConnect“ angezeigt.
16. Doppeltippen Sie auf den Namen der Braillezeile. Nach einigen Sekunden erscheint eine Information, dass das Gerät verbunden ist.
17. Denken Sie daran: In Schritt 2 dieser Paarungsanleitung musste die Notizgerätfunktion eingeschaltet sein. Jetzt müssen Sie VarioUltra in die Braillezeilenfunktion umschalten. Dazu schieben Sie den Betriebsartschalter nach vorne zu sich hin.
18. Wenn es sich um das erste Bluetoothgerät handelt, das Sie mit VarioUltra verbinden, wird es auf dem ersten Bluetoothkanal von VarioUltra verbunden und zugewiesen. Beim verbinden weiterer

Bluetoothgeräte, werden diese automatisch den nächsten freien Kanälen zugewiesen.

19. Drücken Sie die Systemtaste S2 halten sie gedrückt und drücken entweder kurz auf die Brailletaste B4 oder B5, B6, B8 um den Bluetoothkanal 1 bzw. Bluetoothkanal 2, 3, oder 4 einzustellen.
 - Wenn durch diesen Tastendruck ein Bluetoothkanal eingestellt wird, zeigt die Braillezeile die Buchstaben BT und die Zahl des Kanals. Sofern ein Gerät über diesen Kanal verbunden ist, wird der Name des Gerätes ebenfalls angezeigt. Wenn ein Gerät dem Kanal zugewiesen, aber momentan nicht verbunden ist, steht der Gerätenamenname in Klammern. Die Meldung verschwindet automatisch nach wenigen Sekunden.
20. Jetzt können Sie VarioUltra als Braillezeile mit den gekoppelten Gerät nutzen.

Wenn Sie ein weiteres iOS Gerät verbinden möchten, beginnen sie einfach wieder bei Schritt 1.

Hinweis:

Wenn die Brailletastatur zur Texteingabe genutzt wird und Sie sehr schnell schreiben, kann es mit den Standardeinstellungen von VoiceOver zu Problemen bei der Textanzeige kommen. Ändern Sie in "Einstellungen > Allgemein > Bedienungshilfen > VoiceOver" das Zeichenecho auf „Wort“ oder „kein“.

6.3.11 VarioUltra mit einem Android Gerät paaren

Die nachfolgende Anleitung setzt voraus, dass Sie sowohl den Screenreader Talk Back als auch Braille Back heruntergeladen, installiert und auf ihrem Android Gerät aktiviert haben.

Falls nicht, wenden Sie sich an Android accessibility Hilfe indem Sie z.B. bei Google bzw. im Google Play Store nach diesen Begriffen suchen.

Solange Android die VarioUltra nicht direkt unterstützt, muss die VarioConnect Emulation eingestellt sein, oder Sie installieren zusätzlich BRLTTY for Android Version 5.2 oder höher, dann können Sie VarioUltra in der VarioUltra Emulation paaren.

1. Bei VarioUltra, stellen Sie sicher dass:
 - Die Notizgerätfunktion eingeschaltet ist. Der Betriebsartschalter muss nach hinten geschoben sein.
 - Sofern kein BRLTTY for Android Version 5.2 oder höher installiert ist, muss als Emulation für die Braillezeile VarioConnect eingestellt sein.
2. Beim Android Gerät: öffnen Sie die Einstellungen, und wählen Verbindungen, dann Bluetooth. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollfeld bei "Mein Gerät" entsprechend gewählt ist, damit das Gerät für VarioUltra und andere Geräte sichtbar ist. Diese Einstellung bleibt für 2 Minuten aktiv. D.h. innerhalb dieser Zeit muss die Paarung durchgeführt werden.
3. Bei VarioUltra: Öffnen Sie das Hauptmenü und gehen Sie zum Eintrag "Einstellungen", dann "Bluetooth" und wählen Sie die Einträge jeweils durch Drücken der linken Daumentaste B9 oder durch Drücken einer Cursorroutingtaste über dem Wort.
4. Auf der Braillezeile wird nun der Bluetoothdialog angezeigt mit dem Kontrollfeld „Bluetooth ein / aus“. Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet.
5. Wenn das Braillemodul zwischen den Klammern am Anfang des Eintrags leer ist, bedeutet dies, dass das Kontrollfeld nicht gewählt ist. Um Bluetooth zu aktivieren drücken Sie die Cursorroutingtaste über dem leeren Feld, oder bewegen Sie den Navistick nach rechts, oder drücken Sie die rechte Daumentaste B0.
6. Während sich Bluetooth einschaltet erhalten Sie die Meldung "Bitte warten". Nach wenigen Sekunden verschwindet die Meldung automatisch. Bewegen sie dann den Navistick nach unten oder oben bis zum Schalter "Geräte suchen" und wählen ihn durch Drücken von B9.
7. Sie erhalten eine Meldung zu warten, während nach Bluetoothgeräten in Reichweite gesucht wird. Sobald das Suchen beendet ist, stehen Sie in einer Liste mit den Namen der gefundenen Geräte. Wenn mehrere Geräte gefunden wurden, gehen Sie bitte mit dem Navistick nach links oder rechts um die Namen der einzelnen gefundenen Geräte zu erreichen.

8. Wenn Ihnen in der Liste der Name des gewünschten Bluetoothgeräts gezeigt wird, gehen Sie mit dem Navistick nach unten bis zum Schalter „Paaren“ und wählen Sie diesen mit B9. Oder indem Sie eine Cursorroutingtaste oberhalb des Wortes “Paaren” drücken. Eine Meldung informiert, dass VarioUltra die Paarung versucht.
9. Wenden Sie sich nun dem Android Gerät zu. Wenn die Paarung wie gewünscht erfolgt, öffnet sich auf dem Bildschirm eine Option, um den Paarungscode einzugeben. Schreiben Sie die Ziffern 1111.
10. Bei erfolgreicher Paarung erhalten Sie auf VarioUltra eine entsprechende Meldung.
11. Schalten Sie VarioUltra in die Braillezeilenfunktion, indem Sie den Betriebsartschalter nach vorne schieben.
12. Jetzt muss nur noch der richtige Bluetoothkanal, der für die Verbindung genutzt wird, eingestellt werden. Hierzu drücken Sie die Systemtaste S2 halten sie gedrückt und drücken kurz auf die Brailletasten B4, B5, B6 oder B8 um den Bluetoothkanal 1, 2, 3 oder 4 zu wählen.
 - Wenn auf diese Weise ein Bluetoothkanal gewählt wird, zeigt die Braillezeile die Buchstaben BT und eine Zahl zwischen 1 und 4, je nachdem welcher Kanal gewählt ist. Sofern ein Gerät über diesen Kanal verbunden ist, wird der Name des Gerätes ebenfalls angezeigt. Wenn an dem Kanal ein Gerät bereits gepaart aber momentan nicht verbunden ist, steht der Gerätenamen in Klammern. Die Meldung verschwindet automatisch nach wenigen Sekunden.
13. Sobald Sie nach ausprobieren aller 4 Kanäle den Kanal gefunden haben, über den Ihr Bluetoothgerät verbunden ist, können Sie VarioUltra als Braillezeile mit dem gekoppelten Gerät nutzen.
14. Um die Tastatur der Braillezeile zur Eingabe zu nutzen müssen Sie diese noch als Tastatur für das Android Gerät zulassen. Drücken Sie dazu einfach ein Zeichen auf der Tastatur und folgen Sie dann den Anweisungen des Android Gerätes.

Wichtig beim Anschluss einer VarioUltra 20. Bei der Brailledarstellung fehlen 4 Zeichen, da die emulierte VarioConnect 24 Braillemodule hat, physikalisch auf der VarioUltra aber nur 20 Braillemodule vorhanden sind.

Ab der Version BrailleBack for Android 0.95.1-Prod lässt sich auf Google Nexus Geräten dieses Problem durch einen Trick umgehen: Solange BrailleBack for Android VarioUltra nicht offiziell unterstützt und nicht alle Android Geräte diese BrailleBack Komponente in ihrem Betriebssystem haben, gibt es keine Gewähr, dass der Trick bei Ihrem Android Gerät funktioniert, z. B kann bei Samsung Galaxy Geräten zwar einmalig auf VarioUltra Emulation umgeschaltet werden, aber die erneute Verbindung nach einem Standby ist nicht möglich, auch gibt es dann generell Probleme beim aufwecken der VarioUltra.

1. Stellen Sie sicher, dass, sofern die VarioUltra (egal in welcher Emulation) mit Ihrem Android-Gerät bereits gepaart ist, diese Paarung unter „Apps / Einstellungen / Bluetooth“ gelöscht und das Gerät somit entfernt wird und deaktivieren Sie anschließend Bluetooth an Ihrem Android-Gerät.
2. Ferner stellen Sie sicher, dass, sofern BRLTTY for Android auf Ihrem Android-Gerät installiert sein sollte, diese App unter „Apps / Einstellungen / Bedienungshilfen“ deaktiviert (ausgeschaltet) ist.
3. Sollte BrailleBack bereits in einer älteren Version auf Ihrem Android-Gerät installiert sein, so deinstallieren Sie diese Version unter „Apps / Einstellungen / Apps / BrailleBack“.
4. Im Google Play Store suchen Sie nach „BrailleBack“ und installieren die hier verfügbare aktuelle Version.
5. Anschließend öffnen Sie „Apps / Einstellungen / Apps / BrailleBack“ und vergewissern sich, dass die gegenwärtig aktuelle Version „0.95.1-Prod“ installiert wurde.
6. An der VarioUltra aktivieren Sie Bluetooth unter „Einstellungen / Bluetooth“ und unter „Einstellungen / Braillezeilenemulation“ stellen Sie die Emulation auf „VarioConnect“ ein.
7. An Ihrem Android-Gerät schalten Sie Bluetooth unter „Apps / Einstellungen / Bluetooth“ ein und aktivieren, sofern nicht standardmäßig eingeschaltet, die Option „Für andere Geräte sichtbar“.
8. An der VarioUltra starten Sie unter „Einstellungen / Bluetooth“ die Suche nach Bluetooth-Geräten und nachdem Ihr Android-Gerät von der VarioUltra gefunden wurde, selektieren Sie den betreffenden Eintrag und klicken „Paaren“.

9. In der am Android-Gerät aufpoppenden Paarungsanfrage geben Sie die PIN „1111“ ein und klicken „OK“, wonach die VarioUltra melden sollte, dass die Paarung mit dem Gerät „xxx“ erfolgreich war, was Sie ebenfalls mit „OK“ bestätigen.
10. Schalten Sie die VarioUltra nun in den Braille Display Mode und schließen Sie am Android-Gerät den Bluetooth-Dialog.
11. Auf Ihrem Android-Gerät öffnen Sie „Apps / Einstellungen / Bedienungshilfen / BrailleBack“ und klicken den Schalter „Aus“, um BrailleBack einzuschalten, woraufhin eine Verbindung zur VarioUltra hergestellt wird.
12. Schalten Sie nun Ihr Android-Gerät in den Standby und warten Sie, bis die Verbindung zur VarioUltra unterbrochen wird.
13. Anschließend schalten Sie die VarioUltra in die Notizfunktion und stellen unter „Einstellungen / Braillezeilenemulation“ auf „VarioUltra“ um.
14. Schalten Sie die VarioUltra nun wieder in den Braille Display Mode und erwecken Sie das Android-Gerät aus dem Standby.
15. Die Verbindung wird automatisch hergestellt und nun funktioniert die VarioUltra im nativen Modus als Braillezeile mit einer korrekten Braillezeilenlänge.
16. Möchten Sie die Verbindung trennen, so müssen Sie zuerst das Android-Gerät in den Standby schicken oder ausschalten und anschließend (nachdem die Verbindung mit der VarioUltra getrennt wurde) die VarioUltra in den Standby schicken oder ausschalten.
17. Um die Geräte wieder zuverlässig automatisch zu verbinden, muss zuerst die VarioUltra inkl. Bluetooth eingeschaltet sein, bevor das Android-Gerät eingeschaltet / aus dem Standby erweckt wird.

6.4 Zwischen verbundenen Geräten hin und her schalten

Als Beispiel haben wir VarioUltra mit drei Geräten verbunden: iPhone und iPad via Bluetoothkanäle 1 und 2, und ein Computer via USB. Erinnerung: Achten Sie darauf die VarioUltra Emulation bei der Bluetoothpaarung zu nutzen und zu belassen, wenn über Bluetooth nur iOS

Geräte oder Android Geräte mit BRLTTY for Android Version 5.2 und höher verbunden sind. Wenn Sie zwischen iOS und Android Geräten wechseln möchten, nutzen Sie bitte die Emulation VarioConnect oder Pronto für die Paarung mit Android und iOS, und ändern dann die Emulation auf VarioUltra.

Um die Braillezeile auf die Anzeige von iPhone auf Kanal 1 umzustellen, drücken Sie S2 halten die Taste gedrückt und drücken kurz auf die Brailletaste B4.

Um die Braillezeile auf die Anzeige von iPad auf Kanal 2 umzustellen, drücken Sie S2 halten die Taste gedrückt und drücken kurz auf die Brailletaste B5.

Um die Braillezeile auf die Anzeige des Computers an USB umzustellen, drücken Sie S2 halten die Taste gedrückt und drücken kurz auf die Brailletaste B1.

Hinweis:

Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist und sie die Tastenkombination drücken, um den Bluetoothkanal einzustellen, wird Bluetooth im Hintergrund automatisch eingeschaltet. Das Einschalten von Bluetooth dauert nur wenige Sekunden und Sie erhalten eine entsprechende Meldung.

6.5 Bluetoothkanäle zuweisen

Verbundene Geräte können fest den Bluetoothkanälen 1,2 oder 3 zugewiesen werden.

Während einer Gerätepaarung wird das Gerät mit dem nächsten freien Bluetoothkanal verbunden. Wenn an allen vier Kanälen Geräte verbunden sind und Sie ein weiteres Bluetoothgerät verbinden möchten, wird es an Kanal vier verbunden. Es gibt die Möglichkeit, Geräte einem Bluetoothkanal fest zuzuweisen. Wenn das Gerät momentan nicht verbunden ist, steht dieser Kanal bei der Paarung eines neuen Gerätes nicht als freier Kanal zur Verfügung.

Beispiel: Ein Neues Gerät wurde während der Paarung automatisch mit Kanal bt3 verbunden, aber Sie möchten, dass es künftig an Kanal bt1 verbunden ist:

Vergewissern Sie sich, dass das BT Gerät eingeschaltet und mit VarioUltra verbunden ist.

Drücken Sie S2 + B6: VarioUltra zeigt den Kanal und den Gerätenamen. Solange die Hinweismeldung auf der Braillezeile angezeigt wird, drücken Sie B4 für mindestens 1 Sekunde und lassen Sie die Taste los bevor die Meldung verschwindet. Da die Meldung 5 Sekunden lang gezeigt wird, muss die Aktion innerhalb dieser Zeit erfolgen.

VarioUltra ändert die Kanalzuweisung von bt3 zu bt1. Als Rückmeldung vibriert sie in diesem Fall einmal, wenn die Vibration im Hauptmenü > Einstellungen > Braillezeilenemulation gewählt ist.

Falls an bt1 ein anderes Gerät verbunden ist, wird dieses Gerät automatisch dem nun freiwerdenden Kanal bt3 zugewiesen. Die Kanäle werden einfach getauscht.

Hinweis:

Es ist nicht möglich das Gerät dem Kanal zuzuweisen, an welchem es gerade verbunden ist.

6.6 Text aus der Zwischenablage auf das verbundene Gerät übertragen

Text, welcher in der Notizfunktion in die Zwischenablage kopiert wurde, kann an eine entsprechende Anwendung eines via Bluetooth verbundenen iOS- oder Android-Geräts übertragen werden. Die Anwendung auf dem verbundenen Gerät muss im Vordergrund sein und bereit sein, Zeichen zu empfangen, z.B. Eingabefeld.

Funktionsprinzip: Es werden die Tastendrücke simuliert, als ob Sie den Text der Zwischenablage am verbundenen Gerät eingeben würden. Es gibt zwei verschiedene Simulationsarten, die Brailletastensimulation und die HID Tastensimulation. Beide können parallel verwendet werden.

Die geräteabhängige und landessprachenabhängige HID Tabellen müssen im Menü Einstellungen > Braillezeilenemulation, Schalter „Tastensimulationseinstellungen“ ausgewählt werden

6.6.1 Brailletastensimulation

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie in der Textverarbeitung in der Notizfunktion mit Hilfe der üblichen Markierfunktionen ein Wort, Satz oder einen gewünschten Textteil und kopieren diesen in die Zwischenablage.
2. Wechseln Sie anschließend in die Braillezeilenfunktion, indem Sie den Schiebeschalter nach vorne schieben.
3. Sofern noch nicht der Bluetooth-Kanal ausgewählt ist, an welchem das Gerät verbunden ist, zu welchem der in der Zwischenablage befindliche Text übertragen werden soll, wechseln Sie mit dem entsprechenden Befehl zum betreffenden Bluetooth-Kanal.
4. Stellen Sie sicher, dass am verbundenen IOS- oder Android-Gerät eine Anwendung geöffnet ist, welche das Einfügen von Text unterstützt.
5. Drücken Sie die Tasten S2+D1, um die Übertragung zu starten. Eine laufende Übertragung kann mittels S2+D2 gestoppt werden.
6. Hinweis: Das Stoppen ist nur dann möglich, wenn noch nicht der gesamte Inhalt der Zwischenablage an die Anwendung übertragen wurde. In Abhängigkeit davon wie viele Puffer am verbundenen Gerät und/oder der betreffenden Anwendung zur Verfügung stehen bzw. wie groß diese sind, ist es möglich, dass das Stoppen einer laufenden Übertragung nicht mehr möglich ist, weil der gesamte Inhalt der Zwischenablage bereits an das verbundene Gerät übertragen wurde und hier nun der Inhalt des Puffers Stück für Stück an die Anwendung übergeben wird.
7. Die Übertragung dauert einige Zeit. Die Zeit ist abhängig von der Anzahl Zeichen und der Art des verbundenen Geräts. Die Übertragung von 100 Zeichen benötigt ca. 5 bis 8 Sekunden.

Wichtige Voraussetzungen damit die Übertragung via Brailletastensimulation gelingt.

Sowohl an der VarioUltra als auch am verbundenen Bluetooth-Gerät muss die Braille Ein- und Ausgabe auf Computerbraille eingestellt sein. Sowohl in der VarioUltra als auch am verbundenen Bluetooth-Gerät muss die gleiche Brailletabelle eingestellt sein (gleiche Landessprache). Derzeit ist die Übertragung von maximal 10.000 Zeichen möglich. Wird eine größere Anzahl von Zeichen in die Zwischenablage übertragen, so wird diese bei der Übertragung zum verbundenen Gerät bei 10.000 abgeschnitten.

6.6.2 HID Tastensimulation

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie in der Textverarbeitung in der Notizfunktion mit Hilfe der üblichen Markierfunktionen ein Wort, Satz oder einen gewünschten Textteil und kopieren diesen in die Zwischenablage.
2. Wechseln Sie anschließend in die Braillezeilenfunktion, indem Sie den Schiebeschalter nach vorne schieben.
3. Sofern noch nicht der Bluetooth-Kanal ausgewählt ist, an welchem das Gerät verbunden ist, zu welchem der in der Zwischenablage befindliche Text übertragen werden soll, wechseln Sie mit dem entsprechenden Befehl zum betreffenden Bluetooth-Kanal.
4. Stellen sie sicher, dass am verbundenen IOS- oder Android-Gerät eine Anwendung geöffnet ist, welche das Einfügen von Text unterstützt.
5. Drücken Sie die Tasten S2+D4, um die Übertragung zu starten. Eine laufende Übertragung kann mittels S2+D5 gestoppt werden.
6. Hinweis: Das Stoppen ist nur dann möglich, wenn noch nicht der gesamte Inhalt der Zwischenablage an die Anwendung übertragen wurde. In Abhängigkeit davon wie viele Puffer am verbundenen Gerät und/oder der betreffenden Anwendung zur Verfügung stehen bzw. wie groß diese sind, ist es möglich, dass das Stoppen einer laufenden Übertragung nicht mehr möglich ist, weil der gesamte Inhalt der Zwischenablage bereits an das verbundene Gerät übertragen wurde und hier nun der Inhalt des Puffers Stück für Stück an die Anwendung übergeben wird.
7. Die Übertragung dauert einige Zeit. Die Zeit ist abhängig von der Anzahl Zeichen und der Art des verbundenen Geräts. Die Übertragung von 100 Zeichen benötigt ca. 5 bis 8 Sekunden.

Wichtige Voraussetzungen damit die Übertragung via HID Tastensimulation gelingt.

- Die Bluetoothpaarung muss vom externen Gerät (iOS / Android) eingeleitet worden sein, ggf. eine alte Paarung löschen und die Geräte neu paaren.
- Die Emulation „VarioUltra“ muss bei der Paarung und im Betrieb eingestellt sein.

- Bei Android: zusätzlich zu BrailleBack muss BRLTTY for Android 5.2 oder höher installiert sein.

In Menü Einstellungen > Braillezeilenemulation, Tastensimulationseinstellung muss die passende HID Tabelle eingestellt sein, z.B.

Apple_DE_.U2H für iPhone deutsch.

Sowohl an der VarioUltra als auch am verbundenen Bluetooth-Gerät muss die Braille Ein- und Ausgabe auf Computerbraille eingestellt sein.

Sowohl in der VarioUltra als auch am verbundenen Bluetooth-Gerät muss die gleiche Brailletabelle eingestellt sein (gleiche Landessprache).

Derzeit ist die Übertragung von maximal 10.000 Zeichen möglich. Wird eine größere Anzahl von Zeichen in die Zwischenablage übertragen, so wird diese bei der Übertragung zum verbundenen Gerät bei 10.000 abgeschnitten.

6.7 VarioUltra und LINUX

Dieses Unterkapitel gibt Hinweise zur Verbindung von VarioUltra als Braillezeile mit LINUX. Es steht derzeit nur in englischer Sprache zur Verfügung. Our thanks to VarioUltra user Scott McCormack for his contributions to this section.

The assumption is you are somewhat familiar with using Linux, and that you're comfortable working from the command line.

REQUIREMENTS:

Braille support under Linux is provided by an application called BRLTTY. Most Linux distributions come with a version of BRLTTY. However, since VarioUltra support was only added in version 5.3 and most distributions come with older versions, it will be necessary to install an updated version of BRLTTY in order to get VarioUltra to work. For the purposes of this instruction, we are using Ubuntu 14.04, which comes with BRLTTY 5.0. Even the newest Ubuntu 15.10 only comes with 5.2. Most people are probably running older versions of BRLTTY.

Confirming your BRLTTY version.

From the command line type:

```
brlTTY -V
```

Note the capital V. This will print out the version number of BRLTTY along with some other information, and then return you to the command line. If you get 'brltty: command not found' you don't have BRLTTY installed at all. This means you can proceed to the download and install steps.

Remove Old Versions.

If your distribution came with BRLTTY installed and it isn't version 5.3 or later, you should remove it before installing a new copy. To do this, you will need to use the package management tools included with your distribution in order to remove the existing copy of BRLTTY. If you are not using a debian based distribution such as Ubuntu, your instructions will vary. Debian/Ubuntu users type:

```
sudo apt-get remove brltty
```

You will be prompted for your password and prompted to confirm the removal of BRLTTY and any associated packages. Press enter or type y to proceed and once everything is removed you should be returned to the command prompt. If you try and run BRLTTY now you should get a no such file or directory error, or command not found

Downloading and unpacking BRLTTY source.

Now we need to download BRLTTY to our Linux machine. You can access the download page at <http://mielke.cc/brltty/download.html> (correct as of this writing on April 27, 2016) and you want to download the source file in .tar.gz format. You can download directly from the command line if you have the wget command installed (most distributions have it installed) by entering:

```
wget http://mielke.cc/brltty/archive/brltty-5.3.1.tar.gz
```

This will download the 5.3.1 source files in .tar.gz format which is the current version as of this writing. Once you have the file downloaded you should have a file called brltty-5.3.1.tar.gz sitting in your directory

To unpack the file enter:

```
tar -zxf brltty-5.3.1.tar.gz
```

Once the file is unpacked you'll be returned to the command line and will now have a new directory called brltty-5.3.1 change into this directory.

Compile and Install.

This section comes directly from the BRLTTY manual:

<http://mielke.cc/brlTTY/doc/Manual-BRLTTY/English/BRLTTY-3.html#ss3.2>

Change into the brlTTY-5.3.1 directory created earlier. Enter the following commands and wait for each to complete successfully before proceeding to the next.

```
sudo ./configure
```

```
sudo make
```

```
sudo make install
```

Each of the preceding commands will generate a lot of output. Examine the last 10 or so lines of output for errors which are usually denoted with multiple * asterisk characters.

Test run.

Connect your VarioUltra via the USB cable to your Linux box; a bunch as messages may appear on your console as the VarioUltra is set up. Once the messages stop appearing you may hit enter to redisplay the command prompt.

Now that we have BRLTTY installed, let's test it. Enter the following to start BRLTTY:

```
sudo brlTTY
```

BRLTTY should show a version number, make a 'bloop' sound, and your VarioUltra should spring to life. If it does congratulations you now have braille inside a Linux environment.

Killing BRLTTY: You can stop brlTTY at any time by typing:

```
sudo killall brlTTY
```

Run BRLTTY as a service.

Running BRLTTY as a service is useful as it will start automatically on system boot and will start up when a compatible display is connected allowing us to set it and forget it.

The procedure for installing BRLTTY as a service varies depending on the distribution in use. In the build directory there is a directory called 'Autostart' this directory contains startup scripts for various service managers BRLTTY supports.

For Ubuntu 14.04 we use the Upstart system so we want to copy the brlty.conf file from Autostart/Upstart to /etc/init by changing to the Autostart/Upstart directory and typing:

```
sudo cp brlty.conf /etc/init
```

now we should be able to start brlty by typing

```
sudo service brlty start
```

and stop brlty by typing

```
sudo service brlty stop
```

GUI. Want to use your VarioUltra while in the GUI? You can! Just run the orca screen reader while BRLTTY is running. Without orca running your VarioUltra will display 'screen not in text mode' while you are in the GUI.

Uninstalling BRLTTY:

If for any reason you need to remove your freshly installed BRLTTY, change to the BRLTTY source directory and issue the following command:

```
sudo make uninstall
```

Using the VarioUltra braille keyboard in the GUI.

It is necessary to have the xbrlapi application installed. As of this writing, we haven't quite figured out how to compile this from the source. If you have installed the Ubuntu package, it works fine even with the BRLTTY 5.3.1 we have use to make the VarioUltra work. To install it, just issue the following command at the command line:

```
sudo apt-get install xbrlapi
```

Note:

- The key maps are not the same as in the text mode, e.g. the left thumb key (B9) is mapped to backspace along with B8. Additionally, all chord commands have to be entered with the right thumb key (B0)
- The braille keyboard will not work on the GUI login screen so a standard keyboard must be used to login.

This concludes the section 2.13, using VarioUltra with Linux.

7 Die Notizgerätfunktion

Um die Notizgerätfunktion von VarioUltra zu nutzen, schieben Sie den Betriebsartschalter nach hinten.

In der Notizgerätfunktion gibt es ein Hauptmenü mit Einträgen um die verschiedenen nützlichen Anwendungen zu erreichen sowie Einträge für Einstellungen oder die Hilfe. Standardmäßig erscheint der erste Menüeintrag mit der Anzeige: "ME" (Menüelement), "t" (Anwahlbuchstabe), „Textverarbeitung (Name der Anwendung) und schließlich der Kurzbe-
fehl „t+B7B8B9“, über den die Anwendung aus jeder anderen Anwen-
dung heraus aufgerufen werden kann. Innerhalb des Menüs bewegen
Sie sich nach oben oder unten mit dem Navistick oder mit D1 und D3.

Sie können die Anwendung oder allgemein einen Menüeintrag wählen durch:

Eingabe des Anwahlbuchstabens

Drücken des Navisticks in der Mitte

Drücken von B9

Drücken einer beliebigen Cursorroutingtaste über dem angezeigten Na-
men des Menüeintrags

Ein längerer Druck auf die Systemtaste S3 öffnet jederzeit das Haupt-
menü.

7.1 Braille Zeichencodes: Computerbraille, Kurz- schrift und Vollschrift

Standardmäßig zeigt VarioUltra Menüeinträge, Meldungen, Dialogein-
träge, Texte usw. in Computerbraille. Die Umstellung der Anzeige in
Kurzschrift ist möglich. Einstellungen hierzu erreichen Sie über das
Hauptmenü, Eintrag „Einstellungen > Braille > Brailleschriftart“. Eine ge-
nauere Beschreibung finden Sie im Kapitel 8.1.1.

7.1.1 Brailleschriftarten

Unter dem Menüeintrag "Brailleschriftart" im Menü "Einstellungen >
Braille" finden Sie verschiedene Möglichkeiten, um einzustellen welche

Brailleschriftart zum Schreiben und Lesen von Systemeinträgen verwendet werden soll:

- Hauptschalter Computerbraille (Darf nicht gewählt sein, um die nachstehenden Elemente zu erreichen.)
- Sprache
- Schriftart beim Lesen
- Schriftart beim Schreiben
- Schriftart für Eingabefelder / Menüs / Meldungen
- Meldung, dass Computerbraille erforderlich ist, ein / aus
- Schalter OK und Abbrechen

Einige Erläuterungen:

Bei "Sprache" wird standardmäßig die Systemsprache des Geräts angegeben. Diese Einstellung sollte nicht geändert werden.

„Schriftart beim Lesen“ regelt, mit welcher Schriftart Menüeinträge, Meldungen, Dialogeinträge aber auch Text von PDF- und Excel-Dateien angezeigt wird. Voreingestellt ist „Computerbraille“. Durch Bewegen des Navisticks nach rechts oder links erreichen Sie weitere verfügbare Einstellungen, z.B. „Kurzschrift“

- Wenn Sie die gewünschte Schriftart gewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung und zum Schließen die linke Daumentaste B9 oder gehen Sie mit dem Navistick nach unten zu den weiteren Einstellungen.

„Schriftart beim Schreiben“ regelt, welche Schriftart beim Schreiben von Text in Eingabefeldern verwendet wird. Voreingestellt ist Computerbraille. Durch Bewegen des Navisticks nach rechts oder links erreichen Sie weitere verfügbare Einstellungen, z.B. „Kurzschrift“.

- Wenn Sie die gewünschte Schriftart gewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung und zum Schließen die linke Daumentaste B9 oder gehen Sie mit dem Navistick nach unten zu den weiteren Einstellungen.

„Schriftart für Eingabefelder / Menüs“ usw. ist ein Kontrollfeld, das standardmäßig gewählt ist. Es bewirkt, dass zur Anzeige von Text in Eingabefeldern, Menüs Meldungen usw. Die gleiche Schriftart verwendet wird, die in der Liste „Schriftart beim Lesen“ eingestellt ist.

„Meldung, dass Computerbraille erforderlich ist“, ist ein Kontrollfeld.


Wenn es gewählt wird, prüft VarioUltra die Einstellung und gibt eine Warnung aus, wenn Sie Text in ein Eingabefeld schreiben, bei der eine Eingabe in Computerbraille erforderlich ist.

Schalter „OK“ und „Abbrechen“: Drücken Sie die linke Daumentaste B9, wenn der jeweilige Schalter angezeigt wird. Mit „OK“ werden die Einstellungen gespeichert, und der Dialog verlassen. Mit „Abbrechen“ wird der Dialog verlassen ohne eine geänderte Einstellung zu übernehmen.

7.1.2 Hauptschalter Computerbraille: Wechsel zwischen Computerbraille und Anwendereinstellung

In VarioUltra ist im Auslieferungszustand Computerbraille eingestellt. Mit Hilfe des Hauptschalters können Sie schnell zwischen einer individuellen Brailleeinstellung und Computerbraille wechseln. Die Einstellung wirkt sich auf alle Anzeigen und Eingaben von Brailleschrift aus. (Ausnahme in BRF Dokumenten)

Nachfolgend die Schritte, um die Anwendereinstellung für die Brailleanzeige und Brailleingabe festzulegen, z.B. Kurzschrift. Zwischen dieser und Computerbraille wird dann mit dem Hauptschalter gewechselt.

1. Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen den Eintrag „Einstellungen > Braille > Braille Schriftart“
2. Es öffnet sich ein Dialog. Das Kontrollfeld „Hauptschalter Computerbraille“ darf nicht gewählt sein, um die weiteren Dialogelemente zu erreichen.
3. Gehen Sie nach unten und wählen Sie in den Listen „Lesen“ und „Schreiben“ jeweils den Eintrag „Kurzschrift“ . Schließen Sie mit OK durch Drücken von B9.  Hinweis: Alle Menüeinträge und Systemmeldung werden nun in Kurzschrift angezeigt.
4. Öffnen Sie die Textverarbeitung, entweder über das Hauptmenü oder durch längeren Druck auf die Systemtaste S1.
5. Öffnen Sie das Befehlsmenü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Extras > Kurzschrift > Einstellungen“
6. Falls das Kontrollfeld „Hauptschalter Computerbraille“ gewählt ist, bitte deaktivieren, andernfalls werden die weiteren Dialogelemente nicht angezeigt.
7. Gehen Sie nach unten zur Liste „Übersetzer“ und wählen Sie den Eintrag „Kurzschrift deutsch“.

8. Gehen Sie nach unten und wählen Sie das Kontrollfeld „Eingabe gekürzt“.
9. Gehen Sie nach unten und wählen Sie das Kontrollfeld „Ausgabe gekürzt“
10. Bestätigen Sie abschließend OK oder drücken Sie B9.

Nun ist Kurzschrift für die Brailleanzeige und Brailleeingabe als Anwendereinstellung festgelegt. Menüs, Systemmeldungen, Text in PDF Dokumenten, Excel Dateien und doc, docx, rtf, txt Dokumenten werden in Kurzschrift angezeigt. Dokumente in RTF oder TXT Format müssen in Kurzschrift eingegeben werden.

Um zwischen ihrer Anwendereinstellung und Computerbraille zu wechseln wählen Sie entweder die entsprechenden Kontrollfelder „Hauptschalter Computerbraille“ in den oben genannten Dialogen oder nutzen Sie folgende Kurzbefehle:

- S2 + D1 aktiviert die Brilleeinstellung Computerbraille (Hauptschalter ein)
- S2 + D2 aktiviert die Brilleeinstellung gemäß der Anwendereinstellung. (Hauptschalter aus)

7.1.3 Braille in BRF und RTF Dokumenten

Für das Schreiben von Dokumenten in der Textverarbeitung können Sie als Dateiformat RTF oder BRF einstellen. Diese Einstellung ist dann als Standard beim Erzeugen neuer Dokumente vordefiniert.

Bei dem Braille Ready Format (BRF) als Dokumentformat handelt es sich um einen Modus: „Was Sie brailen ist, was sie in Braille erhalten“. Im Wesentlichen findet dabei keinerlei Konvertierung statt. Dieser Modus ist sinnvoll, wenn Sie das Dokument nur mit VarioUltra bzw. als Datei mit einer Braillezeile lesen. Sie können Vollschrift oder Kurzschrift, oder eine selbst erfundene Brailleeingabe schreiben.

Bei Dokumenten im Rich Text Format (RTF) oder TXT Format ist es anders. Die Zeichen, die Sie in Braille eingeben sind unabhängig von der Einstellung für die Brailleeingabe in Menü Einstellungen > Brailleschriftart. Standardmäßig ist die Eingabe auf Computerbraille eingestellt (Hauptschalter ein). Es ist möglich, die Eingabe oder die angezeigte

Ausgabe auf Kurzschrift umzustellen. Dadurch ist es möglich, sich ein Dokument auf VarioUltra als Kurzschrifftext anzeigen zu lassen, obwohl der Inhalt in normalen Zeichen gespeichert ist.

Diese Einstellung erreichen Sie wie folgt:

1. Innerhalb der Textverarbeitung drücken Sie kurz auf die Systemtaste S3, um das Befehlsmenü zu öffnen. Wählen Sie „Extras > Kurzschrift > Einstellungen“. Wählen Sie den Eintrag „Kurzschrift deutsch“.
2. Gehen Sie nach unten und wählen Sie die Kontrollfelder „Eingabe gekürzt“ und „Ausgabe gekürzt“ wenn sowohl die Anzeige als auch die Eingabe umgestellt werden soll. Wenn Sie beispielsweise nur für das Lesen Kurzschrift aber für die Eingabe Computerbraille verwenden möchten, wählen sie nur das Kontrollfeld „Ausgabe gekürzt“.
 - a. Mit der linken Daumentaste B9 wird die gewählte Einstellung gespeichert und sie kehren zum Dokument zurück.
 - b. Einmal eingestellt bleibt diese Brailleeinstellung erhalten.
3. Um die Brailledarstellung für das Dokument zu ändern, drücken Sie B9 + D1 für die Anzeige in Computerbraille oder B9 + D2 für die Anzeige gemäß ihrer individuellen Einstellung. Auf der Braillezeile wird die Umstellung jeweils durch eine kurze Hinweismeldung angezeigt.
 - „Hauptschalter Computerbraille aus“: Sofern in der Einstellung das Kontrollfeld „Eingabe gekürzt“ gewählt ist, wird die Zeicheneingabe als Kurzschrifteingabe interpretiert gemäß des in Schritt 1 eingestellten Listeneintrags. Wenn Sie die Punkte 1456 als Kürzung für “durch” eingeben, wird nicht diese Punkteingabe, sondern das vollständige Wort in das Dokument geschrieben, sobald sie die Eingabe mit der Leertaste B0 beendet haben.
 - Wenn das Kontrollfeld „Eingabe gekürzt“ nicht gewählt ist oder wenn Sie auf Computerbraille mit dem Hauptschalter umgestellt haben, wird die Zeicheneingabe als Eingabe in Computerbraille interpretiert. Wenn Sie wie beim obigen Beispiel die Punkte 1456 eingeben, werden diese Punkte auf der Braillezeile angezeigt und gemäß der deutschen Brailletabelle ist es die Ziffer „4“.

7.1.4 Braille in Menüs, Meldungen, Eingabefeldern USW.

Standardmäßig wird Text in Eingabefeldern in der Schriftart angezeigt

bzw. erfordert die Eingabe in der Schriftart, die sie im Menü „Einstellungen > Braille > Brailleschriftart“ als Schriftart beim Schreiben eingestellt haben. Text von Menüeinträgen, in Listen, Systemmeldungen usw. werden in der Schriftart angezeigt, die sie dort als Schriftart beim Lesen eingestellt haben.

Um auch bei individuellen anderen Einstellungen alles in Computerbraille angezeigt zu bekommen, aktivieren Sie den Hauptschalter für Computerbraille durch Drücken von B9 + D1.

7.2 Einführung in die Notizgerätfunktion

Die Notizgerätfunktion hält für Sie einige nützliche Anwendungen bereit, die über das reine Notizen machen hinausgehen. Alle diese Anwendungen lassen sich über das Hauptmenü öffnen.

Erinnerung: Drücken Sie die Systemtaste S3 etwas länger, um das Hauptmenü zu öffnen. Dort erreichen Sie dann alle Einträge, indem sie sich mit den Displaytasten D1 und D3. oder dem Navistick nach oben oder unten bewegen. Sie erreichen innerhalb des Menüs die einzelnen Einträge auch durch Eingabe des jeweiligen Anwahlbuchstabens oder nutzen Sie die zugeordneten Kurzbefehle, um eine Anwendung direkt zu öffnen.

Textverarbeitung. Anwahlbuchstabe ist t. Der allgemeine Kurzbefehl ist t+B7B8B9. Oder drücken Sie etwas länger auf die Systemtaste S1.

PDF Dokumentbetrachter. Anwahlbuchstabe ist p. Der allgemeine Kurzbefehl ist z+B7B8B9.

Excel Betrachter. Anwahlbuchstabe ist x. Der allgemeine Kurzbefehl ist x+B7B8B9.

Taschenrechner. Anwahlbuchstabe ist r. Der allgemeine Kurzbefehl ist r+B7B8B9.

Uhren (Timer und Wecker). Anwahlbuchstabe ist u. Der allgemeine Kurzbefehl ist u+B7B8B9.

Dateiverwaltung. Anwahlbuchstabe ist d. Der allgemeine Kurzbefehl ist d+B7B8B9

Einstellungen. Anwahlbuchstabe ist e. Der allgemeine Kurzbefehl ist e+B7B8B9

Hilfe. Anwahlbuchstabe ist h. Der allgemeine Kurzbefehl ist h+B7B8B9

Die Anwendungen PDF Betrachter und Excel Betrachter lassen sich explizit ausschalten, die anderen Anwendungen bleiben im Hintergrund aktiv, wenn sie einmal geöffnet wurden. Öffnen Sie durch kurzen Druck auf die Systemtaste S3 das Befehlemenü und wählen Sie den Eintrag „Datei > Beenden“ oder mit dem Kurzbefehl 4+B8B9 (Ziffer 4 mit B8B9). Alle anderen Anwendungen werden verlassen, indem Sie länger auf die Systemtaste S3 drücken und das Hauptmenü öffnen.

Beschreibungen zu den einzelnen Anwendungen folgen im nächsten Kapitel.

8 Textverarbeitung

8.1 Text schreiben

Nutzen Sie die Textverarbeitung, um Notizen oder Dokumente in VarioUltra zu schreiben. Die einfachste und schnellste Möglichkeit die Textverarbeitung zu öffnen ist, die Systemtaste S1 etwas länger zu drücken. Sofern sich VarioUltra in der Notizgerätfunktion befindet, erreichen Sie die Textverarbeitung mit diesem Tastendruck von jeder anderen Anwendung. Wenn der Eintrag "Textverarbeitung" im Hauptmenü angezeigt wird, lässt sich die Anwendung öffnen, indem Sie die linke Daumentaste B9 oder den Navistick in der Mitte drücken.

Die Textverarbeitung öffnet sich mit einem leeren Dokument, so dass Sie gleich Ihren Text schreiben können. Wenn bereits ein Dokument geöffnet war, wird dieses Dokument angezeigt. Wenn alle geöffneten Dokumente geschlossen werden, wird ein leeres Dokument angezeigt. Der Cursor befindet sich am Anfang der Braillezeile und wird durch Punkte 7,8 dargestellt.

Nutzen Sie zum Schreiben die Brailletasten. B0 ist die Leertaste und wenn Sie die Taste B7 einzeln drücken, wird das Zeichen links vom Cursor gelöscht (Rücklöschfunktion). Für einen Zeilenwechsel drücken Sie B8. Wenn Sie den Cursor an eine bestimmte Stelle positionieren möchten, gehen Sie mit dem Navistick oder durch Scrollen mit den Displaytasten D5 oder D2 zu der gewünschten Textstelle und drücken Sie die Cursorroutingtaste oberhalb der gewünschten Stelle. Der Cursor wird so gleich dorthin gesetzt, sie erkennen dies, weil das Zeichen nun mit den Punkten 7,8 unterlegt ist.

Hinweis:

Standardmäßig wird Text immer an der aktuellen Cursorposition eingefügt. Vergewissern Sie sich, dass sich der Cursor am Ende bzw. an der richtigen Stelle befindet, bevor Sie schreiben. Mit dem Befehl B9+B4B5B6 setzen Sie den Cursor an das Dokumentende. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit die Einstellung auf "anfügen" um-

zustellen, so dass neue Texteingaben immer am Dokumentende eingefügt werden, unabhängig davon wo sich der Cursor im Text befindet. Zum Ändern der Einstellung öffnen Sie durch kurzen Druck auf S3 das Befehle­menü und wählen den Eintrag „Extras > Texteingabemodus > Anfügemodus aktivieren“. Diese Einstellung ist nur verfügbar wenn sich das Dokument im Bearbeitungsmodus also mit deaktivierten Schreibschutz befindet.

8.2 Text lesen

Nachfolgend einige Befehle zum schnellen Bewegen im Text beim Lesen eines Dokuments:

Gehe zum Anfang des Dokuments: B9+B1B2B3

Gehe zum Ende des Dokuments: B9+B4B5B6

Brailleanzeige nach links: Displaytaste D2

Brailleanzeige nach rechts: Displaytaste D5

Nächstes Zeichen: B9+B4 oder Navistick nach rechts

Voriges Zeichen: B9+B1 oder Navistick nach links

Nächstes Wort: B9+B5

Voriges Wort: B9+B2

Nächster Satz: B9+B6

Voriger Satz: B9+B3

Nächste Zeile: B9+B4B5 oder Displaytaste D3 oder Navistick nach unten

Vorige Zeile: B9+B1B2 oder Displaytaste D1 oder Navistick nach oben

Anfang der Zeile: B9+B1B2B3B7

Ende der Zeile: B9+B4B5B6B8

Nächster Absatz: B9+B4B6

Voriger Absatz: B9+B1B3

Nächste Seite: B9B0+B5B6

Vorige Seite: B9B0+B2B3

Wenn sich der Cursor innerhalb eines Wortes, Satzes, einer Zeile usw. befindet, wird der Cursor mit dem Befehl “Gehe zu vorigen...” zunächst auf das erste Zeichen des Wortes, Satzes usw. Gestellt.

8.3 Dokument öffnen

Zum Öffnen eines Dokuments in der Textverarbeitung gehen Sie wie

folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3. Sie erreichen den ersten Menüeintrag "Datei".
2. Bewegen Sie den Navistick nach rechts, um das Untermenü zu öffnen.
3. Bewegen Sie den Navistick nach oben oder unten bis zum Eintrag "Öffnen" und drücken Sie B9 oder den Navistick in der Mitte.
 - Wenn versehentlich ein anderer Eintrag gewählt wurde, drücken Sie den allgemeinen Abbrechenbefehl B9B0+B7B8.
4. Sie befinden sich am Anfang einer Datei- und Ordnerliste. Gehen Sie mit dem Navistick nach unten durch die Liste mit den gespeicherten Dateien.
5. Zum Öffnen gehen Sie auf die gewünschte Datei und drücken Sie B9 oder den Navistick in der Mitte.

 **Hinweis:**

Standardmäßig werden im Öffnen-Dialog Dateien vom Typ doc, docx, PowerPoint, rtf, txt angezeigt. Wenn Sie Brailledateien vom Typ brf oder brl gelistet haben möchten gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie die oben beschriebenen Schritte 1 bis 3 aus.
2. Wenn Sie in der Datei- und Ordnerliste sind, drücken Sie D4D6, um die weiteren Dialogelemente zu erreichen. Es wird der Dateipfad angegeben.
3. Gehen Sie mit dem Navistick nach unten zur Liste Dateityp.
4. Gehen Sie dort mit dem Navistick nach rechts oder links bis zum Eintrag „alle Dateien *.*“. Diese Einstellung bleibt erhalten.
5. Wenn Sie jetzt mit dem Navistick nach oben in die Datei- und Ordnerliste gehen, werden entsprechend Ihrer Einstellung auch Dateien des anderen Dateityps gezeigt.
6. Hinweis zu BRF Dateien. Diese haben in der Regel Text in englischsprachiger Kurz­schrift und werden daher immer mit der englischen Brailletabelle und abgeschalteter Kurz­schrifteinstellung geöffnet.
7. Brailledateien mit der Dateiendung BRL können Text in deutscher, englischer oder anderssprachiger Kurz­schrift oder Vollschrift enthalten. Um den Text korrekt anzuzeigen muss der Anwender selber die Brailletabelle für die passende Landessprache einstellen. Außerdem

muss eine eventuell eingestellte Kurzschriftdarstellung abgeschaltet werden (d.h. Hauptschalter Computerbraille eingeschaltet sein).

8.4 Zwischen geöffneten Dokumenten wechseln.

Es gibt verschiedene Wege, um zwischen geöffneten Dokumenten zu wechseln. Wenn Sie den Weg über das Befehle­menü bevorzugen, drücken Sie kurz S3 um das Befehle­menü zu öffnen und wählen Sie den Eintrag „Datei > Vorige Datei“.

Wenn Sie den Weg über Kurzbefehle bevorzugen, drücken Sie die Brailleform für das Minussymbol (-) plus B8 und B9. In anderen Worten: B3B6+B8B9.

8.5 Liste geöffneter Dateien

Wenn mehr als zwei Dokumente geöffnet sind, können sie das gewünschte Dokument auf folgende Weise erreichen. Drücken Sie kurz S3, um das Befehle­menü zu öffnen und wählen Sie den Eintrag „Datei > Liste geöffneter Dokumente“. Ein Dialog mit einer Liste zeigt die Dateinamen der geöffneten Dokumente.

Gehen Sie nach rechts oder links bis zum Dateinamen der gewünschten Datei und drücken Sie B9 oder bestätigen Sie den Schalter OK.

Dieser Dialog und die Liste lässt sich auch mit dem Kurzbefehl I+B8B9 aufrufen.

8.6 Dokument schließen

Auch wenn es vorteilhaft ist, mehrere Dokumente offen zu haben, kann es Situationen geben, in denen Sie ein Dokument gezielt schließen möchten.

Hinweis:

Solange ein Dokument geöffnet ist, befindet es sich im Arbeitsspeicher. D.h. auch wenn Sie die Datei über die Dateiverwaltung zwischenzeitlich

löschen, wird das Dokument solange angezeigt bis es in der Textverarbeitung geschlossen ist.

1. Öffnen Sie das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3.
2. Bewegen Sie den Navistick nach rechts um das Untermenü "Datei" zu öffnen.
3. Gehen Sie mit dem Navistick nach oben oder unten zum Eintrag "Schließen" und drücken Sie B9 oder drücken Sie den Navistick in der Mitte.
 - Falls Sie versehentlich einen anderen Menüeintrag gewählt haben, drücken Sie den allgemeinen Abbrechenbefehl, B9B0+B7B8.
4. Das aktuelle Dokument wird geschlossen und Sie befinden sich wieder in der Textverarbeitung in dem vorletzten Dokument. Wenn nur ein Dokument geöffnet war, befinden Sie sich nach dem Schließen in einem leeren Dokument.

8.7 Dokument speichern

Zum Speichern von Dateien, die sie in der Textverarbeitung erzeugt haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3.
2. Bewegen Sie den Navistick nach rechts, um das Untermenü "Datei" zu öffnen.
3. Gehen Sie mit dem Navistick nach oben oder unten bis zum Eintrag "Speichern unter" und drücken Sie B9 oder den Navistick in der Mitte.
 - Falls Sie versehentlich einen anderen Menüeintrag gewählt haben, drücken Sie den allgemeinen Abbrechenbefehl, B9B0+B7B8.
4. Schreiben Sie in das Eingabefeld "Name" den Dateinamen.
5. Drücken Sie abschließend B9 um die Datei zu speichern.
6. Weitere Details zu den Funktionen "Speichern" und "Speichern unter" finden Sie in den Kapiteln 9.8.7 bis 9.8.9.

8.8 Bearbeitungsfunktionen

Mit den Einträgen im Menü "Bearbeiten" oder den zugeordneten Kurzbefehlen können Sie den Text im Dokument bearbeiten: Textbereiche markieren, ausschneiden, kopieren, einfügen, löschen. Sie können nach Wörtern oder Wortteilen suchen oder diese ersetzen. Eine genauere Beschreibung dieser Funktionen finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.

8.8.1 Markieren

Markierbefehle führen dazu, dass bestimmte Textbereiche für eine weitere Bearbeitung ausgewählt bzw. gekennzeichnet werden. Das Markieren ist daher die Voraussetzung für viele weitere Bearbeitungsschritte.

Zum Markieren gelten folgende Befehle, wobei das Punktmuster für den jeweiligen aktuellen Bereich (Zeichen, Wort, Satz, Zeile) gemeinsam mit nur der linken Daumentaste (B9) gedrückt wird:

Aktuelles Zeichen markieren: B9+B1B4

Aktuelles Wort markieren: B9+B2B5

Aktuellen Satz markieren: B9+B3B6

Aktuelle Zeile markieren: B9+B1B2B4B5

Aktuellen Absatz markieren: B9+B1B3B4B6

Aktuelle Seite markieren (sofern Seitentrennungen vorhanden sind)
B9+B2B3B5B6

Gesamtes Dokument markieren:

- Öffnen Sie das Befehle­menü und wählen Sie den Eintrag "Bearbeiten > Alles markieren".
- Oder drücken Sie den Kurz­befehl B9B0+B1B2B3B4B5B6B8

Einen bestimmten Textbereich markieren:

- setzen Sie den Cursor auf das erste Zeichen des Textbereichs und rufen Sie durch kurzen Druck auf S3 das Befehle­menü auf und wählen den Eintrag „Bearbeiten > Blockanfang/ende markieren“.
- setzen Sie den Cursor auf das letzte Zeichen des Textbereichs und wählen Sie den Eintrag „Bearbeiten > Blockanfang/ende markieren“.
- Der Kurz­befehl B9+B1B4 markiert ebenfalls den Anfang oder das Ende eines Textbereiches.

Hinweis:

Markierte Bereiche bleiben solange markiert, bis ihre Markierung durch einen neuen Markierbefehl oder durch Drücken des Abbrechenbefehls B9+B7B8 oder D4 aufgehoben wird. Cursorbewegungen oder andere Bewegungen durch den Text heben eine Markierung nicht auf. Markierte Textbereiche sind auf der Braillezeile durch den zusätzlichen Punkt 8 gekennzeichnet.

8.8.2 Ausschneiden, Kopieren und Einfügen

Dieses Kapitel beschreibt wie Sie Text innerhalb der Textverarbeitung ausschneiden, kopieren oder einfügen. Beim Ausschneiden und Kopieren muss der entsprechende Textbereich zuvor markiert sein. Eine Beschreibung dazu finden Sie im vorigen Kapitel 9.8.1.

Kopieren

Beim Kopieren bleibt ein markierter Textbereich an seiner Stelle und wird zusätzlich in die Zwischenablage kopiert. Er kann aus der Zwischenablage an eine andere Stelle eingefügt werden (Verdopplung). Der ursprünglich markierte Textbereich bleibt dabei markiert.

Der kopierte Bereich bleibt so lange in der Zwischenablage erhalten, bis ein nächster Bereich in die Zwischenablage verschoben oder kopiert wird und ihn ersetzt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren sie den gewünschten Textbereich.
2. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen sie den Eintrag „Bearbeiten > Kopieren“. Alternativ können Sie auch den allgemeinen Kurzbefehl c+B8B9 zum Kopieren verwenden.

Ausschneiden

Beim Ausschneiden wird ein markierter Textbereich von seiner Stelle entfernt und in die Zwischenablage verschoben. Er kann aus der Zwischenablage an eine andere Stelle eingefügt werden. Der ausgeschnittene Bereich bleibt so lange in der Zwischenablage erhalten, bis ein nächster Bereich in die Zwischenablage verschoben oder kopiert wird und ihn ersetzt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren sie den gewünschten Textbereich.
2. Öffnen Sie das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen sie den Eintrag „Bearbeiten > Ausschneiden“. Alternativ können Sie auch den allgemeinen Kurzbefehl x+B8B9 zum Ausschneiden verwenden. .

Einfügen

Beim Einfügen wird der Text aus der Zwischenablage in das Dokument oder ein Eingabefeld eingefügt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Achten Sie darauf, dass sich der gewünschte Textbereich in der Zwischenablage befindet.
2. Bewegen Sie den Cursor zu der gewünschten Einfügeposition. Die Einfügeposition kann sich dabei auch in einem anderen geöffnetem Dokument oder Eingabefeld befinden.
3. Öffnen Sie das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen sie den Eintrag „Bearbeiten > Einfügen“. Alternativ können Sie auch den allgemeinen Kurzbefehl v+B8B9 zum Einfügen verwenden.

8.8.3 Löschen

Beim Löschen wird ein markierter Textbereich von seiner Stelle entfernt. Bei Textbereichen, die umfangreicher als ein Zeichen oder Wort sind, erhalten Sie eine Sicherheitsrückfrage, die mit „ja“ bestätigt werden muss.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie den gewünschten Textbereich.
2. Öffnen Sie das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen sie den Eintrag „Bearbeiten > Löschen“. Alternativ können Sie den allgemeinen Löschenbefehl B9+B7 verwenden.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit „ja“ oder brechen Sie den Vorgang ab mit „Nein“.

Hinweis:


Dieser Befehl gilt für einen markierten Textbereich. Er ist unabhängig von der aktuellen Cursorposition. Es lassen sich auch an anderer Stelle im Text Zeichen mit B7 (Rücklöschfunktion) oder Textbereiche (Wort,

Satz, Zeile usw.) mit den jeweiligen Kurzbefehlen entfernen, ohne dabei den markierten Bereich zu ändern.

8.8.4 Suchen und Weitersuchen

Zum Suchen eines Wortes oder Wortteiles (Zeichenkette) gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Dokument, in welchem Sie suchen möchten.
2. Öffnen Sie das Befehlsmenü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Bearbeiten > Suchen“.
 - a. Der Suchen-Dialog öffnet sich. Schreiben Sie in das Eingabefeld „Suchen nach“ den zu suchenden Begriff. Ein eventuell vorhandener alter Suchbegriff wird dabei überschrieben. Bestätigen Sie den Schalter „OK“.
Ein eventuell vorhandener alter Suchbegriff wird dabei überschrieben.
3. Sie sind wieder im Text und der Cursor befindet sich auf dem ersten Zeichen des gesuchten Begriffes.
4. Befindet sich der gesuchte Begriff mehrfach im Text und ist die erste Fundstelle nicht die richtige, so öffnen Sie das Befehlsmenü mit kurzem Druck auf S3 und Wählen den Eintrag „Bearbeiten > Weitersuchen“. Oder Sie nutzen den Kurzbefehl 3+B8B9 (Ziffer 3 mit B8B9).
5. Ist der Begriff nicht im Text vorhanden, oder wurde die letzte Fundstelle bereits erreicht oder stehen Sie am Ende des Dokuments, erhalten Sie die Meldung „nicht gefunden“.

 **Hinweis:** Sie können diese Meldung „einfrieren“, indem Sie die Cursorroutingtaste auf der ersten Zelle drücken. Die „eingefrorene“ Meldung verschwindet wenn sie eine andere Cursorroutingtaste drücken.

8.8.5 Elemente im Suchendialog

Der Suchen-Dialog enthält noch weitere Elemente und Einstellungen. Diese erreichen Sie, wenn Sie durch Bewegungen nach oben oder unten mit dem Navistick oder mit den Displaytasten D4D6 bzw. D1D3. durch den Dialog gehen.

Kontrollfeld "Großbuchstaben beachten":

Mit B0 oder rechts/links Bewegungen wechseln Sie zwischen gewählt und nicht gewählt. Ist es gewählt, so wird bei der Suche nur der Begriff gefunden, der genau mit der Schreibweise des Suchbegriffes übereinstimmt.

Kontrollfeld "ganzes Wort":

Mit B0 oder links/rechts Bewegung wechseln Sie zwischen gewählt und nicht gewählt. Ist es gewählt, so wird der eingegebene Begriff nur als ganzes Wort, nicht aber als Wortteil gesucht.

Kontrollfeld "rückwärts":

Mit B0 oder links/rechts Bewegungen wechseln Sie zwischen gewählt und nicht gewählt. Ist es gewählt, so wird der Begriff von der aktuellen Textstelle bis zum Textanfang gesucht.

Kontrollfeld "Ersetzen":

Mit B0 oder rechts/links Bewegungen wechseln Sie zwischen gewählt und nicht gewählt. Ist es gewählt, so enthält der Dialog das weitere Eingabefeld „Ersetzen durch“. Mit dem Zustand dieses Kontrollfeldes wird der Suchen-Dialog in den Ersetzen-Dialog verwandelt. Beschreibungen dazu finden sie im nächsten Kapitel.

Hinweis:

Bei schreibgeschützten Dokumenten ist dieses Element nicht verfügbar.

8.8.6 Ersetzen

Das Ersetzen unterscheidet sich nicht wesentlich vom zuvor beschriebenen Suchen und verwendet den gleichen Dialog, wobei hier das Kontrollfeld „Ersetzen“ bereits gewählt ist. Beim Ersetzen wird das gesuchte Wort durch das Wort im zweiten Eingabefeld ersetzt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Bearbeiten > „Ersetzen“.
2. Der Ersetzen-Dialog öffnet sich.
3. Schreiben Sie in das Eingabefeld „Suchen nach“ den zu suchenden Begriff, bewegen Sie sich dann zum Eingabefeld „Ersetze durch“ und

geben Sie den gewünschten Begriff ein. Ein eventuell vorhandener alter Suchbegriff wird dabei überschrieben.

4. Bestätigen Sie den Schalter „OK“.
5. Sie gelangen in einen weiteren Dialog, der die nachfolgend beschriebenen Elemente enthält. Mit diesem Dialog können Sie gezielt nur bestimmte Fundstellen des Begriffes ersetzen, zur nächsten Fundstelle weiter springen oder eine gesamte Ersetzung vornehmen.

Eingabefeld „gefunden“:

Hier wird Ihnen z.B. 2/19, und der gesuchte Begriff angegeben. Das bedeutet, dass sich der Begriff insgesamt 19 Mal im Dokument befindet und Sie gerade bei der zweiten Fundstelle sind.

Schalter „weitsuchen“:

Hier springen Sie weiter zur nächsten Fundstelle, was sich mit der Information im Eingabefeld "gefunden" leicht überprüfen lässt.

Schalter „ersetzen“:

Der gesuchte Begriff wird an der angesprungenen Fundstelle durch den von Ihnen eingegebenen Begriff ersetzt.

Schalter „alle ersetzen“:

Unabhängig von der gerade angesprungenen Fundstelle, werden alle Begriffe, die mit dem gesuchten Begriff übereinstimmen, ersetzt.

8.8.7 Dokumente Speichern

Achtung:

Eine automatische Speicherung des geöffneten Dokuments beim kompletten Ausschalten (Reset Befehl) ist nicht verfügbar! Deshalb gehen nicht zuvor gespeicherte Dokumente beim Ausschalten verloren!

Dokumente werden standardmäßig im Rich Text Format (.rtf) gespeichert. Sie befinden sich im Ordner "Edit" im internen Speicher „Flashdisk“ von VarioUltra.

Dokumente können auch in anderen Ordnern oder Unterordnern gespeichert werden. VarioUltra merkt sich, welcher Ordner als letztes gewählt wurde, und schlägt diesen beim Speichern oder Öffnen von anderen Dokumenten vor.

Neben dem Standardformat "RTF" können die Dokumente auch im Format „TXT“ (ANSI oder UNICODE) gespeichert werden.

8.8.8 Speichern

Die erste, leere Datei in der Textverarbeitung erhält beim Einschalten des Geräts oder nach einem Reset Befehl automatisch den Dateinamen „Dokument“ und befindet sich im internen Speicher Flashdisk im Ordner „Edit“. Standardmäßig ist das Textformat Rich Text (RTF) vordefiniert. Falls Sie für Ihre Dokumente das Braille Ready Format (BRF) bevorzugen, können Sie hier die Einstellung entsprechend ändern.

Jedes neue Dokument wird mit dem zuletzt eingestellten Dateiformat erzeugt. Öffnen Sie also zuerst den Dialog „neues Dokument“ und wählen Sie den gewünschten Dateityp. Es ist nicht möglich ein RTF-Dokument später mit der „Speichern unter“ Funktion als BRF-Dokument zu speichern oder anders herum. Jedoch ist es möglich, den Text in die Zwischenablage zu kopieren, dann ein neues Dokument im gewünschten Dateiformat zu öffnen, den Text einzufügen und die Datei zu speichern.

Zum Speichern des Dokuments gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehlsmenü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Menüeintrag „Datei > Speichern“.
2. Bestätigen Sie diesen Eintrag durch Drücken von B9 bzw. der Eingabetaste oder N-Mitte.
 - a. Alternativ können Sie den Kurzbefehl s+B8B9 zum Speichern drücken.
3. Eine Hinweismeldung erscheint mit der Information, dass gespeichert wurde. Die Meldung verschwindet nach wenigen Sekunden automatisch und Sie befinden sich wieder im Dokument.

Hinweis:

Bei großen Dokumenten kann das Speichern einige Zeit dauern. Ein blinkendes Braillemuster auf der ersten Zelle zeigt an, dass der Vorgang läuft. Das blinken hört auf, wenn der Speichervorgang beendet ist.

Auf diese Weise lassen sich alle geöffneten Dateien speichern, die bereits einen Dateinamen und Speicherort besitzen. Bei Dateien im RTF-Format wird die Cursorposition mitgespeichert, so dass die zuletzt angezeigte Textstelle beim erneuten Öffnen der Datei wieder angezeigt wird (Lesezeichen).

8.8.9 Speichern unter

Um ein geöffnetes Dokument unter einem anderen Dateinamen, oder in einem anderen Dateiformat oder in einen anderen Speicherort zu speichern wird der Befehl „Speichern unter“ eingesetzt. Es ist nicht möglich ein BRF Dokument als RTF Dokument zu speichern oder anders herum. Dies geht nur über den Weg, den Dateiinhalt in die Zwischenablage zu kopieren, ein neues Dokument mit dem gewünschten Dateiformat zu öffnen, den Inhalt einzufügen und die Datei zu speichern.

Gehen Sie zum Speichern unter wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Datei > speichern unter“.
 - a. Alternativ können Sie den Kurzbefehl u+B8B9 verwenden.
2. Der „Speichern unter“ Dialog öffnet sich. und Sie befinden sich im Eingabefeld für den Dateinamen. Beim Schreiben des Dateinamens wird der alte angezeigte Dateiname überschrieben.
3. Um den Speicherort auszuwählen, gehen Sie mit dem Navistick nach unten. Sie gelangen zu dem Infofeld, das den aktuell gültigen Pfad angibt. Wenn Sie mit dem genannten Speicherort einverstanden sind, überspringen Sie den Schalter „Durchsuchen“.
4. Wenn Sie einen anderen Speicherort auswählen möchten, bestätigen Sie den Schalter „Durchsuchen“, worauf sich dann ein weiterer Dialog öffnet. (Die Elemente dieses Durchsuchendialogs werden weiter unten beschrieben.)
5. Wählen Sie in der Liste den Dateityp „rtf“, um das Dokument im Rich Text Format zu speichern. Durch Bewegungen nach rechts / links können Sie andere Dateiformate wählen.
6. Erinnerung: Die Umwandlung von RTF Datei zu BRF Datei oder anders herum ist mit dieser Option nicht möglich.
7. Bestätigen Sie OK.

8. Zum Abbrechen drücken Sie den Befehl B9+B7B8 oder die Displaytaste D4. Dadurch verlassen Sie den Dialog und den Speichern unter Vorgang.

 **Hinweis:**

Die Meldung „Datei konnte nicht gespeichert werden“. deutet darauf hin, dass der eingegebene Dateiname Sonderzeichen enthält oder Sie einen ungültigen Speicherort gewählt haben.

8.8.10 Der Durchsuchen-Dialog

Die Elemente im Durchsuchen-Dialog ermöglichen es, einen anderen Speicherort (Pfad) auszuwählen, sowie einen neuen Dateiordner anzulegen. Um einen anderen Speicherort beim „Speichern unter“ auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den “Speichern unter” Dialog. (siehe voriges Kapitel)
2. Bestätigen Sie im Dialog den Schalter „Durchsuchen“.
3. Ein Dialog öffnet sich.
 - a. Die Datei- und Ordnerliste wird präsentiert und zeigt den zuletzt ausgewählten Dateiordner bzw. die erste Datei dieses Ordners. Gehen Sie mit Bewegungen nach unten / oben und rechts / links in den gewünschten Dateiordner „Edit“.
Als Speicherorte sind der interne Speicher “Flashdisk” oder ein externer USB Stick “Stick” sowie deren Unterordner möglich.
4. Um die Liste zu verlassen und zu den anderen Dialogelementen und Schaltern zu gelangen, drücken Sie die Displaytasten D4+D6 oder D1+D3.
5. Das Infofeld „Pfad“ präsentiert nun den aktuell ausgewählten Speicherort, z.B. "/Flashdisk/Edit".
6. Falls Sie ihn erneut ändern möchten, gehen Sie zurück in die Datei- und Ordnerliste.
7. Bestätigen Sie OK. Sie gelangen zurück in den „Speichern unter“ Dialog, dort wird ebenfalls der neue Speicherort im Infofeld „Pfad“ präsentiert.

Der Schalter „Neuer Ordner“ ist sinnvoll, wenn Sie die Datei in einen neuen Unterordner speichern möchten. Es öffnet sich dann ein weiterer Dialog, um diesen Ordner anzulegen.

8.9 Neues leeres Dokument erzeugen

Sie haben nun gelernt, wie ein Dokument in der Textverarbeitung gespeichert oder geschlossen wird und wie Dateien geöffnet werden. Um ein neues leeres Dokument zu erzeugen gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie durch kurzen Druck auf S3 das Befehle Menü.
2. Bewegen Sie den Navistick nach rechts um das Untermenü „Datei“ zu öffnen.
3. Bewegen Sie den Navistick nach oben oder unten bis zum Eintrag „Neu“ und drücken Sie entweder den Navistick in der Mitte oder die linke Daumentaste B9. Alternativ können Sie auch den Kurzbefehl n+B8B9 nutzen. Wenn versehentlich ein anderer Eintrag gewählt wurde, drücken Sie den allgemeinen Abbrechenbefehl B9B0+B7B8.
4. Es öffnet sich ein Dialog, Geben Sie im Eingabefeld den Dateinamen ein und drücken Sie B9. Oder überschreiben Sie den vorgeschlagenen Dateinamen „Dokument“ und geben einen anderen Namen ein.
5. Das neue Dokument wird nun in der Textverarbeitung angezeigt und der Cursor befindet sich am Anfang des Dokuments.


Das zuvor geöffnete Dokument ist weiterhin geöffnet. Mit dem Kurzbefehl B9+B3B6B8 können Sie schnell zwischen beiden hin und her wechseln. Eine genauere Beschreibung zum Erzeugen eines neuen Dokuments finden Sie im Kapitel 15.1.5.

8.10 Kontexthilfe

Die Kontexthilfe bietet detaillierte Informationen zur Funktion des jeweiligen Dialogelements oder Menüeintrag. Mit dem Befehl B9+B2B6 öffnen Sie die Kontexthilfe. Scrollen Sie zum Lesen der Meldung mit D2 und D5. Zum Schließen drücken Sie B9 oder bestätigen OK.

8.11 Textverarbeitung verlassen

Um das Hauptmenü zu öffnen und dadurch die Textverarbeitung zu verlassen drücken Sie etwas länger auf die Systemtaste S3.

 **Hinweis:** Geöffnete Dokumente bleiben im Hintergrund geöffnet.

9 PDF Dokumentbetrachter

Der PDF Dokumentbetrachter ist eine Anwendung, um PDF Dokumente zu öffnen und zu lesen. Im geöffneten PDF Dokument können Sie sich ähnlich wie in der Textverarbeitung bewegen. Weitere Funktionen erreichen Sie über das Befehlsmenü, welches Sie durch kurzen Druck auf die Systemtaste S3 öffnen.

Die geöffnete PDF Datei kann als Textdatei gespeichert werden, oder Sie markieren Textteile und kopieren diese in die Zwischenablage, sofern das PDF Dokument nicht kopiergeschützt ist. Beim Öffnen eines Passwortgeschützten PDF Dokuments, werden Sie zur Eingabe des entsprechenden Passworts aufgefordert.

9.1 PDF Dokumentbetrachter starten und Dokument öffnen

Es gibt verschiedene Wege, um die Anwendung PDF Dokumentbetrachter zu starten. Mit dem allgemeinen Kurzbefehl z+B7B8B9 starten Sie die Anwendung von jeder beliebigen Anwendung aus, wenn Sie sich im Hauptmenü befinden, gehen Sie nach unten oder oben bis zum Eintrag „PDF Dokumentbetrachter“ oder nutzen Sie den Anwahlbuchstaben „p“.

Hinweise:

Beim ersten Start des Programms öffnet sich eine Datei- und Ordnerliste, in der Sie den Pfad und die gewünschte PDF Datei wählen und öffnen können.

Wenn bereits eine PDF Datei geöffnet ist, gelangen Sie mit dem Eintrag im Hauptmenü oder seiner Kurztaste zum geöffneten Dokument.

Wenn Sie in der Dateiverwaltung in der Datei- und Ordnerliste das gewünschte PDF Dokument wählen, öffnet sich der PDF Dokumentbetrachter automatisch.

Es wird nicht gewährleistet, dass Texte von sämtlichen Arten PDF Dokumente angezeigt werden, jedoch lassen sich die meisten PDF Dokumente laden und anzeigen, auch kopiergeschützte oder Passwortgeschützte PDF Dateien. Bei PDF Dateien, deren Inhalt nicht angezeigt

werden kann, handelt es sich zumeist um Dateien die den Inhalt als Bild ohne hinterlegten Text enthalten.

Sofern der PDF Betrachter geöffnet ist und Sie ein anderes PDF Dokument öffnen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3.
2. Wählen Sie den Eintrag „Datei / Öffnen“
3. Wählen Sie in der Datei- und Ordnerliste die gewünschte PDF Datei und bestätigen Sie im Dialog den Schalter „Öffnen“. Dateien mit anderen Dateierweiterungen als .PDF werden hier nicht angezeigt.

Beim Öffnen eines neuen Dokuments wird das aktuell angezeigte PDF Dokument geschlossen.

Im Text werden die Zeilenwechselzeichen angezeigt, um die Gestaltung des Dokuments wiederzugeben. Da diese Formatierungsinformation den Lesefluss beim Lesen auf der Braillezeile beeinträchtigen kann, lässt sich diese Anzeige einstellen. Öffnen Sie das Menü „Extras > Einstellungen“ und ändern Sie das Kontrollfeld „Zeige Formatierung“ entsprechend.

9.2 Passwortgeschützte PDF-Datei öffnen

Beim Öffnen einer passwortgeschützten PDF Datei werden sie aufgefordert, das benötigte Passwort einzugeben.

9.3 Dokumente mit Text in Spalten

Beim Lesen von PDF Dokumenten, welche als mehrspaltige Zeitungsseiten gestaltet sind, kann es vorkommen, dass die Reihenfolge der Textbereiche nicht in der richtigen Ordnung dargestellt wird. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Lesereihenfolge wie folgt umzustellen:

1. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Extras > Einstellungen“.
2. Wählen Sie in der Liste den Eintrag „Zeitung“.

Der PDF Betrachter versucht die Textstruktur zu analysieren und die Darstellung des Dokuments zu verbessern. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass das Dokument anschließend perfekt dargestellt wird. Ein neues Dokument wird immer mit der Standardeinstellung geöffnet, da dies in den meisten Fällen die beste Darstellung bewirkt. Je nach Dokument ist es ratsam eine andere Lesereihenfolge zu wählen und das Dokument erneut zu öffnen. Es stehen die drei Möglichkeiten, Standard, Zeitung und von oben nach unten zur Auswahl.

9.4 Lese- und Navigationsbefehle in einem PDF Dokument

Die Befehle zum Lesen in einem PDF Dokument ähneln dem Lesen von Dokumenten in der Textverarbeitung. Ein virtueller Cursor wird beim Lesen mitgeführt und durch einen blinkenden Braillepunkt 8 dargestellt. Sie können den Cursor zeichenweise, wortweise, satzweise, zeilenweise, absatzweise oder seitenweise vorwärts und rückwärts durch das Dokument bewegen. Diese Befehle können Sie über das Befehle Menü Eintrag "Gehe zu" erreichen und ausführen, schneller und direkter geht es jedoch, wenn sie die jeweils zugeordneten Kurzbefehle verwenden.

Kurzbefehle zum Bewegen des Cursors:

Nächstes Zeichen: B9+B4 oder Navistick nach rechts

Voriges Zeichen: B9+B1 oder Navistick nach links

Nächstes Wort: B9+B5

Voriges Wort: B9+B2

Nächster Satz: B9+B6

Voriger Satz: B9+B3

Nächste Zeile: B9+B4B5 oder Displaytaste D3 oder Navistick nach unten

Vorige Zeile: B9+B1B2 oder Displaytaste D1 oder Navistick nach oben

Nächster Absatz: B9+B4B6

Voriger Absatz: B9+B1B3

Nächste Seite: B9+B5B6

Vorige Seite: B9+B2B3

Wenn sich der Cursor innerhalb eines Wortes, Satzes, einer Zeile usw. befindet, wird der Cursor mit dem Befehl "Gehe zu vorigen..." zunächst auf das erste Zeichen des Wortes, Satzes usw. gestellt.

9.5 Seitennavigation

Die Befehle im vorigen Kapitel sind im Allgemeinen völlig ausreichend, um sich Seitenweise im Dokument zu bewegen. Die Eingabe von B9+B5B6 um eine Seite vorwärts zu gehen, oder B9+B2B3 um eine Seite zurück zu gehen, sind sehr einfach.

Bei großen Dokumenten kann es hingegen hilfreich sein, eine gewünschte Seite direkt zu erreichen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Öffnen Sie das Befehlemenü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Gehe zu > Seite > Gehe zu Seite“.

Ein Dialog öffnet sich. Geben Sie in das Eingabefeld die gewünschte Seitenzahl ein und bestätigen Sie OK oder drücken B9.

Wenn Sie eine ungültige Seitenzahl eingeben, beispielsweise eine höhere Zahl als sich Seiten im Dokument befinden, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Um herauszufinden wie viele Seiten das geöffnete Dokument hat, öffnen Sie das Befehlemenü und wählen den Eintrag „Datei > Dokumentinformation“.

Nach jedem Sprung auf eine andere Seite befindet sich der Cursor jeweils am Anfang dieser Seite.

9.6 Links im Dokument erreichen

Sofern das geöffnete PDF Dokument Links enthält können diese angesprungen werden. Links im PDF Dokument sind beispielsweise Verknüpfungen zu Fußnoten.

Hinweis:

Der Dokumentbetrachter unterstützt nur Links, die zu anderen Bereichen innerhalb des Dokuments führen. Verknüpfungen zu externen Quellen wie Internetseiten oder anderen Dokumenten werden nicht unterstützt.

Wird ein Link angesprungen und mit B9 bestätigt, springen Sie zu dem verknüpften Textbereich und verlassen die vorherige Leseposition.

Zum Anspringen eines Links gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehlemenü durch kurzen Druck auf S3

2. Wählen Sie den Eintrag „Gehe zu / Link / nächster Link bzw. vorheriger Link“.
3. Der Text des Links wird angezeigt und der Cursor befindet sich auf dem Link.
4. Um den Link auszuführen, also zu dem zugeordneten Text (z.B. Fußnote) zu springen, bestätigen Sie B9 oder drücken Sie den Navistick in der Mitte.

Wichtig:

Der Cursor muss sich genau auf dem Link befinden, andernfalls bleiben Sie unverändert auf der Leseposition stehen.

Der Kurzbefehl D4D6 bringt sie direkt zum nächsten Link, der Kurzbefehl D1D3 bringt Sie direkt zum vorherigen Link.

9.7 Lesezeichen

Sofern das geöffnete PDF Dokument Lesezeichen enthält, können diese angesprungen werden. Lesezeichen markieren Textpositionen, welche beim Erstellen des PDF Dokumentes fest definiert wurden. Es ist für den Anwender nicht möglich, eigene Lesezeichen im PDF Dokument zu setzen und diese zu speichern.

Um Lesezeichen anzuspringen gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehlsmenü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Gehe zu > Lesezeichen“.
2. Sofern das PDF Dokument über Lesezeichen verfügt, können Sie das Untermenü öffnen. Wählen Sie den Eintrag „Lesezeichenliste“ und die Lesezeichen werden wie Menüeinträge dargestellt.
3. Wählen Sie das gewünschte Lesezeichen und Sie gelangen zu der zugeordneten Textposition.

9.8 Leseposition und andere Dokumentinformationen abfragen

Die Leseposition ist durch einen virtuellen Cursor markiert. Diese Position kann abgefragt werden und gibt Seite, Zeile und Spalte an.

Öffnen Sie hierzu das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Extras > Position im Dokument“.

Weitere Informationen wie Name und Speicherort des geöffneten Dokuments oder die Gesamtseitenzahl können Sie abfragen. Öffnen Sie hierzu das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Datei > Dokumentinformation“.

Sofern das Dokument kopiergeschützt ist oder Lesezeichen enthält, werden diese Informationen ebenfalls angegeben.

9.9 PDF Dokument als Textdatei speichern

Das geöffnete PDF Dokument kann als Textdatei (.txt) gespeichert werden. Öffnen Sie hierzu das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Datei > Als Textdatei speichern“. Ähnlich wie beim „Speichern unter“ in der Textverarbeitung öffnet sich ein Dialog, in welchem Sie den Dateinamen eingeben und den Speicherort (Pfad) festlegen können.

Erinnerung: Bei kopiergeschützten PDF Dateien ist das Speichern des gesamten Dokumentes oder von Textteilen durch den Erzeuger des PDF Dokuments nicht gestattet und daher nicht möglich. Es wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

9.10 Text in einem PDF Dokument markieren und kopieren

Sie können im geöffneten PDF Dokument einen Textblock markieren oder den Text des gesamten Dokuments markieren und anschließend in die Zwischenablage kopieren. Text aus der Zwischenablage kann dann beispielsweise in der Textverarbeitung in ein Dokument eingefügt werden.

Öffnen Sie das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3. Im Menü „Bearbeiten“ finden Sie die Einträge zum Markieren und kopieren. Oder Sie nutzen direkt die entsprechenden Kurzbefehle.

Um den Beginn eines Textblocks zu markieren, setzen Sie den virtuellen Cursor auf das erste Zeichen des gewünschten Textbereichs und drücken Sie den Kurzbefehl **B9+B2B3B5**.

Dann setzen Sie den virtuellen Cursor auf das letzte Zeichen des gewünschten Textbereichs und drücken den Kurzbefehl **B9+B2B3B5**.

Kopieren Sie nun den markierten Textblock in die Zwischenablage mit dem Kurzbefehl **c+B8B9**.

Mit dem Kurzbefehl **v+B8B9** können Sie den Textbereich in ein anderes Dokument einfügen.

Erinnerung: Bei kopiergeschützten PDF Dateien ist das Kopieren nicht möglich.

9.11 Suchen

Die Suchenfunktion ermöglicht es, nach Wörtern oder Zeichen im geöffneten PDF Dokument zu suchen und die Leseposition auf die Fundstelle zu setzen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie durch kurzen Druck auf **S3** das Befehle Menü und wählen Sie den Eintrag „Suchen > Suchen“.
2. Ein Dialog öffnet sich. Geben Sie in das Eingabefeld das zu suchende Wort, Zeichen oder Zeichenfolge ein. Falls bei der Suche die exakte Schreibweise des Suchbegriffs berücksichtigt werden soll, wählen Sie das entsprechende Kontrollfeld.
3. Bestätigen Sie den Schalter „Suchen“ und es wird von der Leseposition bis zum Ende des Dokuments gesucht.
4. Wird der Begriff nicht gefunden, erhalten Sie eine entsprechende Meldung, die mit OK.
5. Wird der Begriff gefunden, erhalten sie eine entsprechende Meldung, die mit OK bestätigt werden muss. Die Leseposition wird auf den gefundenen Begriff gesetzt
6. Um im Dokument nach weiteren Fundstellen zu suchen, öffnen sie das Befehle Menü und wählen den Eintrag „Suchen > Weitersuchen“ oder alternativ den Kurzbefehl **3+B8B9**.

9.12 PDF Dokumentbetrachter beenden

Um die Anwendung PDF Dokumentbetrachter zu beenden wählen Sie im Befehle Menü den Eintrag „Datei > Beenden“ oder den Kurzbefehl `4+B8B9`. Eine andere Möglichkeit die Anwendung zu verlassen ist, durch längeren Druck auf S3 das Hauptmenü zu öffnen.

10 Excel Betrachter

Der Excel Betrachter ist eine Anwendung, mit der Sie Microsoft Exceltabellen im (xls oder xlsx Format öffnen können, um die Zellinhalte zu lesen. Die Befehle, um sich zu den einzelnen Zellinhalten zu bewegen, finden Sie im Befehle Menü, Eintrag > Navigation“ und werden in den nachfolgenden Unterkapiteln beschrieben.

Das Einfügen oder Bearbeiten von Zellen ist nicht möglich, aber Sie können den Inhalt der angezeigten Exceltabelle oder der Inhalt aller Tabellen der geöffneten Arbeitsmappe als Textdatei (TXT) speichern. Sie können auch Zellinhalte markieren und in die Zwischenablage kopieren, um sie später in der Textverarbeitung einzufügen.

Wenn Sie versuchen eine passwortgeschützte Exceldatei zu öffnen, werden Sie zur Eingabe des entsprechenden Passworts aufgefordert.

10.1 Exceldatei öffnen und schließen

Der Excel Betrachter unterstützt Tabellen im XLS und XLSX Dateiformat. Durch das Öffnen einer solchen Datei wird die Anwendung gestartet. Oder starten Sie zuerst die Anwendung, indem Sie im Hauptmenü den Eintrag „Excel Betrachter“ wählen oder den Anwahlbuchstaben „x“ eingeben.

Beim ersten Start der Anwendung öffnet sich eine Datei- und Ordnerliste, um den Pfad und die gewünschte Exceldatei auszuwählen.

Wenn eine Exceldatei bereits geöffnet ist, so gelangen Sie mit dem Eintrag im Hauptmenü oder dem allgemeinen Kurzbefehl x+B7B8B9 zu der geöffneten Exceldatei.

Um im Excel Betrachter eine andere Exceldatei zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Datei > Öffnen“.
2. Eine Datei- und Ordnerliste wird angezeigt. Bewegen Sie sich zu der gewünschten XLS oder XLSX Date und öffnen Sie mit B9.

Hinweis:

Dateien mit anderen Dateierweiterungen als .XLS oder .XLSX werden hier nicht angezeigt.

Beim Öffnen einer neuen Datei wird die vorige Exceldatei automatisch geschlossen.

Beim Öffnen einer passwortgeschützten Exceldatei, werden Sie aufgefordert das benötigte Passwort einzugeben. Bei falschem Passwort wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Es kann nicht gewährleistet werden, dass sämtliche Zellinhalte in den Tabellen und Arbeitsmappen korrekt angezeigt werden können, insbesondere wenn es sich um Formeln oder Verknüpfungen mit Zellbezügen handelt.

10.2 Exceldatei als Textdatei speichern

Eine Exceldatei als Textdatei zu speichern geht sehr einfach. Öffnen Sie das Befehlsmenü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Datei > Speichern als Textdatei“. Ähnlich wie beim Speichern in der Textverarbeitung öffnet sich ein Dialog, in welchem Sie den Dateinamen und Speicherort eingeben können. Bestätigen Sie abschließend den Schalter „Speichern“. Der Tabelleninhalt wird im TXT Format gespeichert.

Hinweis:

Die Zellinhalte einer Tabellenreihe werden durch Semikola getrennt. Jede Tabellenreihe steht in einer eigenen Textzeile.

Wenn die Exceldatei mehrere Tabellenblätter enthält, steht der Inhalt der einzelnen Tabellenblätter untereinander in der Textdatei.

Der Inhalt jedes Tabellenblatts erscheint als eigener Absatz in der Textdatei.

10.3 Den Inhalt von Zellen in die Zwischenablage kopieren

Sie können den Inhalt einer einzelnen Zelle, einer Spalte oder einer Tabellenreihe mit der allgemeinen Kopierfunktion `c+B8B9` in die Zwischenablage kopieren. Er kann dann beispielsweise in der Textverarbeitung in

ein Dokument eingefügt werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Kopieren, dass der jeweils gewünschte Zellinhalt auf der Braillezeile angezeigt wird.

10.4 Dokumentinformation zur Exceldatei

Um die Dokumentinformationen zur geöffneten Exceldatei zu erreichen, öffnen Sie das Befehlsmenü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Datei > „Dateiinformatioenen“.

Folgende Informationen werden angegeben:

Dateiname und Speicherort.

Anzahl der Tabellenblätter.

Name der Arbeitsmappe.

Zellkoordinaten des aktiven Bereiches d.h. Zellen die im aktuellen Tabellenblatt gefüllt sind.

10.5 Lesen von Zellen, Reihen, oder Spalten

Sie können den Inhalt der Exceldatei Zelle für Zelle, Zeile für Zeile oder Spalte für Spalte lesen. Beim Öffnen einer Arbeitsmappe wird standardmäßig der Zellinhalt der Zelle A1 des Tabellenblatts angezeigt. Verschiedene Navigationsbefehle ermöglichen es, einzelne Zellen zu lesen oder die Zellinhalte von Tabellen reihen oder Spalten zu lesen.

Zusätzlich können Sie die Zellinhalte von Spalten und Reihen als „Kopf“ festlegen, so dass Ihnen beim Lesen eines Zellinhaltes zusätzlich diese Spalten- oder Reihenköpfe angegeben werden.

10.6 Einzelne Zellen lesen

Standardmäßig befinden Sie sich nach dem ersten Öffnen einer Exceldatei in der Zelle A1. Mit Bewegungen des Navisticks nach rechts oder links gelangen Sie innerhalb der Tabellenreihe zur nächsten oder vorherigen Zelle. Die Zellenkoordinate (B1) und der Zellinhalt werden angezeigt.

Mit Bewegungen des Navisticks nach unten oder oben gelangen Sie innerhalb der Tabellenspalte zu der nächsten oder vorherigen Zelle. Die

Zellenkoordinate (A2) und der Zellinhalt angezeigt.

Um den Inhalt einer bestimmten Zelle zu erreichen, öffnen sie mit g+B8B9 den Dialog „Gehe zu“. Geben Sie die Zellenkoordinate der gewünschten Zelle ein und bestätigen Sie mit B9. Diese Funktion finden Sie auch im Befehlelement Eintrag „Navigation > Zelle > Gehe zu“

Hinweis:

Mit den Optionen im Menü „Extras“ können Sie Einstellungen festlegen, die Ihnen zu der Zelle zusätzliche Informationen angeben: Spaltenkopf, Reihenkopf, Zellkommentar.

10.7 Tabellenreihe lesen

Sie können eine komplette Tabellenreihe, also alle Zellinhalte der Tabellenreihe lesen. Es gibt Befehle, um jeweils eine Tabellenreihe nach unten bzw. oben zu gehen, um direkt zur ersten oder letzten Tabellenreihe zu springen. Auf der Braillezeile werden die Zellkoordinaten der Tabellenreihe angegeben, z.B. A1 – D1. Die Inhalte der einzelnen Zellen stehen nebeneinander und werden durch Semikolon getrennt. Nutzen Sie die Scrollfunktion mit D5 oder D2 um den Inhalt auf der Braillezeile zu lesen

Die nachfolgenden Befehle zur Navigation erreichen Sie auch im Befehlelement Eintrag “Navigation > Reihe”

Nächste Reihe (abwärts): B4B5 oder D3

Vorige Reihe (aufwärts): B1B2 oder D1

Erste Reihe: B1B2B3 oder D1D4

Letzte Reihe: B4B5B6 oder D3D6

Mit dem allgemeinen Kopierbefehl c+B8B9 lässt sich die angezeigte Zeile in die Zwischenablage kopieren.

10.8 Tabellenspalte lesen

Sie können eine komplette Tabellenspalte, also alle Zellinhalte der Tabellenspalte lesen. Es gibt Befehle, um jeweils eine Tabellenspalte nach

rechts oder links zu gehen, um direkt zur ersten oder letzten Tabellenspalte zu springen. Auf der Braillezeile werden die Zellkoordinaten der Tabellenspalte angegeben, z.B. A1 – A7. Die Inhalte der einzelnen Zellen stehen nebeneinander und werden durch Unterstrich getrennt. Nutzen Sie die Scrollfunktion mit D5 oder D2 um den Inhalt auf der Braillezeile zu lesen

Die nachfolgenden Befehle zur Navigation erreichen Sie auch im Befehle­menü Eintrag „Navigation > Spalte“

Nächste Spalte (rechts): B5

Vorige Spalte (links): B2

Erste Spalte: B1B2B3B7

Letzte Spalte: B4B5B6B8

Mit dem allgemeinen Kopierbefehl c+B8B9 lässt sich die angezeigte Zeile in die Zwischenablage kopieren.

10.9 Mehrere Tabellenblätter in einer Arbeitsmappe

Einige Exceldateien bestehen aus mehreren Tabellenblättern. Um die Zellinhalte in den verschiedenen Tabellenblättern zu lesen, muss das jeweils gewünschte Tabellenblatt in den Vordergrund geholt werden. Sie können sich jeweils zu dem nächsten oder vorherigen Tabellenblatt bewegen, oder Sie öffnen mit b+B8B9 den Dialog „Gehe zu Tabellenblatt“ und wählen den Namen des gewünschten Tabellenblattes.

Die folgenden Navigationsbefehle finden Sie im Befehle­menü „Navigation / Tabellenblatt“.

Nächstes Tabellenblatt: B5B6

Voriges Tabellenblatt: B2B3

Wenn Sie sich innerhalb einer geöffneten Exceldatei zu den einzelnen Tabellenblättern bewegen, wird beim ersten Anspringen die erste Zelle

(A1) angegeben. Beim Wechsel zwischen bereits besuchten Tabellenblättern, kehrt man zur zuletzt besuchten Zelle zurück.

10.10 Suchen und Weitersuchen

Texte oder Textteile, welche in einer Zelle stehen, können über die Suchfunktion gefunden werden. Bei der Suche können Sie angeben, ob nur in den Zellen des aktuell angezeigten Tabellenblattes oder in den Zellen aller Tabellenblätter der geöffneten Exceldatei gesucht werden soll.

Ferner können Sie die Durchsuchungsart einstellen, d.h. ob die Tabelle(n) nach dem Begriff von oben nach unten, also Reihe für Reihe, oder von links nach rechts, also Spalte für Spalte, durchsucht werden soll.

Öffnen Sie durch kurzen Druck auf S3 das Befehle­menü, wählen Sie den Eintrag „Suchen > Neue Suche“ und geben Sie den Suchbegriff ein und wählen Sie in den Listen die Art des Suchens.

Die Tabelle wird gemäß der eingestellten Durchsuchungsart ab der aktuellen Zellposition durchsucht. Es werden der gefundene Begriff und die Zellkoordinate der Fundstelle angegeben.

Mit der Funktion „Weitersuchen“ (Befehle­menü „Suchen > Weitersuchen“) wird gemäß der eingestellten Durchsuchungsart innerhalb des Tabellenblattes bzw. in allen Tabellenblättern nach weiteren Fundstellen gesucht. Oder nutzen Sie zum Weitersuchen den Kurzbefehl 3+B8B9 (Ziffer 3 mit B8B9), oder Displaytasten D1D4D6.

10.11 Spaltenkopf festlegen

Sie können den Inhalt von Zellen einer Tabellenreihe als „Überschrift“ oder Kopf für die jeweiligen Spalten zuordnen. Gehen Sie im Tabellenblatt zu der Tabellenreihe oder einer Zelle in dieser Reihe, in welcher die Zellinhalte stehen, die Sie als Spaltenkopf festlegen möchten. Öffnen Sie das Befehle­menü und wählen Sie den Eintrag „Extras > Reihe als Spaltenkopf“.

Dies bewirkt, dass künftig zusätzlich zum Zelleninhalt und der Zellkoordinate der Eintrag der Tabellenspalte angegeben wird. Diese zusätzliche Information ist in Klammern gesetzt.

10.12 Reihenkopf festlegen

Sie können den Inhalt von Zellen einer Tabellenspalte als „Überschrift“ oder Kopf für die jeweiligen Reihen zuordnen. Gehen Sie im Tabellenblatt zu der Spalte oder einer Zelle in der Spalte, in welcher die Zellinhalte stehen, die Sie als Reihenkopf festlegen möchten. Öffnen Sie das Befehlsmenü und wählen Sie den Eintrag „Extras > Spalte als Reihenkopf“.

Dies bewirkt, dass künftig zusätzlich zum Zelleninhalt und der Zellenkoordinate der Eintrag der Tabellenreihe angegeben wird. Diese zusätzliche Information ist in Klammern gesetzt.

10.13 Zuordnung des Spalten- oder Reihenkopfs ändern oder löschen

Das Festlegen einer anderen Reihe als Spaltenkopf ersetzt die vorherige Zuordnung.

Um alle Zuordnungen im Tabellenblatt zu löschen, öffnen Sie das Befehlsmenü und wählen den Eintrag „Extras > Zuordnung löschen“. Zuordnungen von Spalten- und Reihenköpfen auf anderen Tabellenblättern der geöffneten Exceldatei bleiben erhalten.

Die Anwendung Excel Betrachter speichert die Zuordnung für bis zu 1000 Tabellenblätter in der Datenbankdatei ssvier.sdf im Ordner USER. Das bedeutet, dass die Festlegung der zugeordneten Spalten- und Reihenköpfe nicht verloren sind, wenn Sie die Exceldatei schließen und später erneut öffnen.

10.14 Zellenkommentar lesen

In Exceldateien können Zellen einen Zellkommentar haben. Dieser Kommentar wird nicht beim Zellinhalt angezeigt, kann aber abgefragt werden. Öffnen Sie das Befehlsmenü und wählen Sie den Eintrag „Extras > Zellkommentar zeigen“, um den Kommentar der Zelle zu lesen. Oder nutzen Sie den Kurzbefehl `m+B8B9` um den Zellkommentar zu lesen.

Da der Zellkommentar nur nach Drücken eines Befehls angegeben wird,

ist es wichtig zu wissen, ob eine Zelle einen Kommentar hat oder nicht. Für diese Einstellung gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle­menü und wählen Sie den Eintrag „Extras > Einstellungen“.
2. Wählen Sie das Kontrollfeld “Anmerkung bei Zellkommentar angeben“ mit B0 und bestätigen Sie OK.
3. Zellen mit Kommentar werden dann am Beginn durch einen Stern (*) gekennzeichnet.

10.15 Excel Betrachter beenden

Um die Anwendung Excel Betrachter zu beenden wählen Sie im Befehle­menü den Eintrag „Datei > Beenden“ oder den Kurzbefehl 4+B8B9. Eine andere Möglichkeit die Anwendung zu verlassen ist, durch längeren Druck auf S3 das Hauptmenü zu öffnen.

11 Timer, Stoppuhr und Wecker

VarioUltra! bietet für Zeitmessungen und Alarmer verschiedene Uhren: Es gibt einen Timer (Eieruhr), eine Stoppuhr und vier Wecker. Diese Uhren erreichen Sie im Hauptmenü über den Eintrag „Uhren“ oder mit dem Auswahlbuchstaben „u“

Mit dem allgemeinen Kurzbefehl u+B7B8B9 erreichen Sie die Auswahl der Uhren von jeder Anwendung aus.

Die nachfolgenden Unterkapitel geben Ihnen Beschreibungen zu diesen verschiedenen Uhren.

Eine Beschreibung, wie Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen finden Sie im Kapitel 14.5 Datum und Uhrzeit.

11.1 Timer (Eieruhr)

Mit dem Timer können Sie sekundengenau eine eingestellte Zeit rückwärts zählen lassen. Bei Erreichen der Endzeit wird ein Tonsignal ausgegeben.

Die Hauptansicht des Timers enthält verschiedene Eingabefelder und Schalter, mit denen Sie die Zeit einstellen, bei laufendem Timer die Zeit verfolgen sowie den Timer starten und stoppen können.

Zum Starten des Timers gehen Sie wie folgt vor

1. Ausgehend vom Hauptmenü wählen Sie den Eintrag „Uhren > Timer (Eieruhr)“.
2. Die Hauptansicht des Timers wird geöffnet und präsentiert im Eingabefeld „Zeit“ die laufende Zeit in Minuten und Sekunden. Beim ersten Öffnen oder nach einem gestoppten Timer steht hier 00:00:00.
3. Der Timer ist auf 10 Minuten (00:10:00) voreingestellt. Diese Zeit können Sie im Eingabefeld „Dauer einstellen“ editieren. (Maximale Dauer: 23:59:59).
4. Durch Bestätigen des Schalters „Start“ wird der Timer eingeschaltet und beginnt mit dem Herunterzählen der Zeit. Der Schalter „Start“ wandelt sich in den Schalter „Stopp“, mit dem der laufende Timer abgebrochen werden kann.

5. Während der Zeitmessung können Sie die Zwischenwerte für die abgelaufene und die Restzeit verfolgen.
6. Bei Erreichen der Endzeit wird einmalig ein Tonsignal und / oder eine Vibration ausgegeben. Die Anzeige der laufenden Zeit wird auf 00:00 zurückgesetzt und der Schalter „Start“ ist wieder verfügbar.
7. Mit „OK“ oder „Abbrechen“ wird nur der Timer-Dialog geschlossen. Bei gestartetem Timer läuft die Zeit im Hintergrund weiter und gibt bei Erreichen der Endzeit sein Signal.

Wenn der Timerdialog geöffnet ist, sind folgende Befehle verfügbar:

Timer starten = s+B9

Timer stoppen = o+B9

Hinweise zur Zeiteingabe im Eingabefeld „Dauer einstellen“:

Geben Sie die Zeit im Format HH:MM:SS ein.

Wenn keine Stundeneingabe erfolgt, ist die verkürzte Anzeige MM:SS erlaubt.

Bei Minuteneingaben größer 60, wird die Anzeige auf die entsprechende Anzeige in Stunden und Minuten umgewandelt

Der Timer kann max. 23:59:59 Stunden laufen, größere Zeiteingaben sind nicht möglich.

Bei einer ungültigen Zeiteingabe, wird die Zeit auf 00:10 (10 Sekunden) zurückgesetzt.

11.2 Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie sekundengenaue Zeitmessungen durchführen. Sie zählt von Null hoch und kann jederzeit abgefragt, angehalten und wieder gestartet werden. Die Zeitmessung kann zusätzlich von akustischen Signalen begleitet werden.

Die Hauptansicht der Stoppuhr ist wie ein Dialog aufgebaut und enthält verschiedene Eingabefelder und Schalter. Sie können bei laufender Zeitmessung die Zeit verfolgen, die End- oder Zwischenzeit abfragen sowie die Stoppuhr starten, unterbrechen oder stoppen.

Alle Befehle und Einstellungen lassen sich auch über das Befehlemenü erreichen.

Zum Starten der Stoppuhr gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Uhren >Stoppuhr“
2. Die Hauptansicht der Stoppuhr wird geöffnet und präsentiert im Infofeld „Zeit“ die laufende Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden. Beim ersten Öffnen oder beim Start einer neuen Messung steht hier 00:00:00. Nach dem Stoppen oder Unterbrechen einer Zeitmessung wird die End- bzw. Zwischenzeit angezeigt.
3. Durch Bestätigen des Schalters „Start“ wird die Stoppuhr eingeschaltet und beginnt mit der Zeitmessung. Anschließend ist der Schalter „Start“ nicht mehr verfügbar, stattdessen gibt es die Schalter „Pause“ und „Stopp“, mit denen die laufende Zeitmessung unterbrochen bzw. gestoppt werden kann. Bei einer unterbrochenen Zeitmessung wechselt der Schalter „Pause“ in den Schalter „Weiter“, um die Zeitmessung fortzusetzen.
4. Durch Bestätigen des Schalters „Endzeit/Zwischenzeit ansagen“ öffnet sich eine Meldung, die bei laufender Zeitmessung den für den Zeitpunkt des Befehls erreichte Zwischenzeit angibt, bei unterbrochener Zeitmessung den vorläufigen Endwert oder bei gestoppter Stoppuhr die Endzeit angibt. Schließen Sie den Dialog mit „OK“, um zurück in die Hauptansicht zu gelangen.
5. Mit „OK“ oder „Abbrechen“ wird der Stoppuhr-Dialog geschlossen. Bei gestarteter Stoppuhr läuft die Zeitmessung jedoch weiter, eventuell eingestellte Töne werden weiterhin ausgegeben, zum Stoppen muss die Hauptansicht der Stoppuhr wieder geöffnet werden (Hauptmenü Eintrag „Uhren > Stoppuhr“)
6. Wenn VarioUltra bei laufender Stoppuhr in den Standby geschaltet wird, läuft die Messung weiter.
7. Um die Zeitmessung zu beenden, müssen Sie in der Hauptansicht den Schalter „Stopp“ bestätigen.

Innerhalb der Stoppuhr (Hauptansicht) sind folgende Kurzbefehle verfügbar:

Stoppuhr starten = B4

Stoppuhr stoppen = B6

Zeitmessung unterbrechen / fortsetzen = B5

End- oder Zwischenzeit = B8

Bei laufender Zeitmessung die Zeit verfolgen = z+B9.

Sekundenpiep ein = B1
Zehnsekundenpiep ein = B2
Keine Töne = B7

Diese Kurzbefehle können während der Zeitmessung gedrückt werden.

Eine gestartete Stoppuhr läuft auch während des Standby weiter oder wenn Sie eine andere Anwendung öffnen.

11.3 Wecker

Es lassen sich vier unabhängige Wecker einrichten. Jeder Wecker kann einzeln mit einer eigenen Weckzeit eingestellt und aktiviert werden, sowie der Wochentag ausgewählt werden, an dem das Weckersignal und / oder Vibration ausgegeben werden soll. Die Namen der vier Wecker, die gleichzeitig auch die ausgegebene Meldung beim Wecken ist, können geändert werden. Standardmäßig sind alle Wecker deaktiviert.

Zum Einstellen eines Weckers gehen Sie wie folgt vor:

1. wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Uhren > Wecker“. Es öffnet sich ein Dialog, in dem sie den Namen und den Status der Vier Wecker angezeigt bekommen.
2. Um z.B. die Einstellungen des ersten Weckers (Alarm 1) zu ändern, gehen Sie zu seinem Schalter und bestätigen ihn.
3. Ein neuer Dialog öffnet sich. Mit dem Kontrollfeld „aktiv“ schalten Sie den Wecker ein bzw. aus.
4. Bei dem Eingabefeld „Name“ lässt sich dem Wecker (Alarm 1) ein anderer Name geben z.B. Normalwecker.
5. Im Eingabefeld wird die Weckzeit eingegeben, Die Uhrzeit 08:00 ist vordefiniert und lässt sich überschreiben.
6. Anschließend können Sie mit den entsprechenden Kontrollfeldern festlegen, an welchen Wochentagen der Wecker wecken soll.
7. Das Kontrollfeld „Signalton“ ist standardmäßig gewählt, so dass zusätzlich zur Anzeige auf der Braillezeile ein Tonsignal ausgegeben wird.

8. Das Tonsignal für den Weckeralarm kann aus einer Auswahl verschiedener kurzer WAV-Dateien gewählt werden. Der Pfad, für diese Signaldatei wird im Eingabefeld „Signal-Datei“ präsentiert.
9. Bestätigen Sie den Schalter „Signal wählen“, falls Sie ein anderes Tonsignal als Weckeralarm einstellen möchten. Es öffnet sich dann eine Dateiliste und Sie können durch Bewegungen nach unten oder oben die einzelnen Dateien erreichen. Die Dateien TIMALARM.WAV, BELL.WAV oder ROOSTER.WAV können als sinnvoller Weckeralarm gewählt werden. Durch Drücken von B9, welches den Standardschalter „Datei übernehmen“ bestätigt, schließen Sie die Dateiliste. Der neue Weckeralarm ist gewählt und in dem Eingabefeld „Signal-Datei“ wird sein Pfad präsentiert.
10. Das Kontrollfeld „Vibrationssignal“ ist standardmäßig nicht gewählt. Wenn es gewählt wird, erscheint im Dialog eine Liste mit vordefinierten Vibrationsmustern. Gehen Sie nach links oder rechts um ein Vibrationsmuster auszuwählen und bestätigen Sie mit OK.
11. Beenden Sie die Einstellung mit OK und verlassen Sie den Weckerdialog ebenfalls mit OK.

Bei Erreichen der Weckzeit gibt VarioUltra den Alarmton aus und / oder Vibriert mit dem eingestellten Muster und eine Meldung mit dem Weckernamen wird angezeigt. Wenn der Alarm ignoriert wird, weckt das Gerät! im Abstand von ca. 10 Sekunden ca. 3 Minuten lang. Durch Drücken einer beliebigen Taste außer B9 kann die Weckermeldung weggedrückt werden und der Alarmdialog wird geschlossen. Nach ca. 10 Sekunden wird dann erneut geweckt.

Um den Weckalarm zu quittieren und den Wecker auszuschalten, drücken Sie B9 oder Sie bestätigen den „OK“ Schalter bei der Alarmmeldung.

11.4 Timer, Stoppuhr und Wecker verlassen

Um die Auswahl im Menü „Uhren“ zu verlassen und wieder in das Hauptmenü zu gelangen drücken Sie etwas länger auf die Systemtaste S3.

12 Rechner

Im Hauptmenü wählen Sie den Eintrag "Rechner" oder drücken den Auswahlbuchstaben "r". Wenn Sie außerhalb des Hauptmenüs sind, können Sie den Rechner mit dem Kurzbefehl r+B7B8B9.

Allgemeine Informationen zur Rechneranwendung.

einfache und wissenschaftliche Berechnungen durchführen.

Verwenden sie zur Zeicheneingabe immer Computerbraille.

Geben Sie Zahlen und Rechenzeichen ein und drücken Sie B8 oder schreiben Sie abschließend ein Gleichheitszeichen. Die Rechnung mit Ergebnis wird angezeigt.

Zum Löschen der alten Rechnung, öffnen Sie durch Kurzen Druck auf S3 das Befehlemenü und wählen den Eintrag „Bearbeiten > Berechnungszeile löschen“.

- Alternativ verwenden Sie den Kurzbefehl c+B9.

Wenn Sie den Rechner öffnen, wird entweder eine Null oder die letzte Rechnung angezeigt.

Geben Sie die Zahlen und Rechenzeichen direkt ein (Computerbraille). Dezimalzahlen können entweder mit Komma oder Punkt eingegeben werden.

- Diese Einstellung lässt sich ändern im Befehlemenü Eintrag „Extras > Optionen > Komma anstatt Punkt als Trennzeichen.“

Wie in allen Anwendungen von VarioUltra gibt es ein Befehlemenü, welches mit S3 geöffnet wird und Kurzbefehle für die meisten Funktionen.

Auf diese Weise erreichen Sie auch die wissenschaftlichen mathematischen Funktionen, die in späteren Kapiteln beschrieben werden.

Lesen Sie weiter um mehr über den Rechner und seine Funktionen zu lernen.

12.1 Zahlen und Rechenzeichen eingeben

Hinweis:

Ziffern, Rechenzeichen und die Buchstabenfolgen von Operatoren werden in Computerbraille eingegeben. Nachfolgend eine Übersicht (Brailletabelle Europa)

Rechenzeichen

Plus:	+	B2B3B5
Minus:	-	B3B6
Mal:	*	B3B5
Geteilt:	/	B2B5B6
Dezimalpunkt:	.	B3
Ist-gleich:	=	B2B3B5B6

Ziffern in Computerbraille:

1	=	B1B6 (a mit Punkt 6)
2	=	B1B2B6 (b mit Punkt 6)
3	=	B1B4B6 (c mit Punkt 6)
4	=	B1B4B5B6 (d mit Punkt 6)
5	=	B1B5B6 (e mit Punkt 6)
6	=	B1B2B4B6 (f mit Punkt 6)
7	=	B1B2B4B5B6 (g mit Punkt 6)
8	=	B1B2B5B6 (h mit Punkt 6)
9	=	B2B4B6 (i mit Punkt 6)
0	=	B3B4B6

12.2 Berechnungen eingeben

Schreiben Sie die Rechnung in die gezeigte Zeile und drücken Sie B8 oder das "ist gleich Zeichen". Das Ist-gleich wird eingefügt und die Rechnung mit Ergebnis angezeigt.

Hinweise:

Das Ergebnis kann als Ausgang für weitere Berechnungen verwendet werden. Durch Eingabe eines neuen Wertes wird das alte Ergebnis überschrieben.

Bei Fehlern wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Die letzten 10 Berechnungen werden in einer Berechnungsliste gespeichert. Gehen Sie mit dem Navistick nach oben / nach unten oder D1 / D3 durch die Liste.

Erinnerung: Kurzbefehl c+B9 löscht die Zeile.

12.3 Rechnungen bearbeiten

Schreibfehler bei der Rechnungseingabe lassen sich sofort wie in der Textverarbeitung korrigieren. Mit B7 wird zeichenweise rückwärts gelöscht oder Sie bewegen den Cursor auf das Zeichen und nutzen nachstehende Befehle.

Hinweise:

B7 löscht das Zeichen links vom Cursor.

B9B7 löscht das aktuelle Zeichen.

Wird ein Zeichen links des "ist-gleich" editiert, wird durch Drücken von B8 oder der Eingabe von "=" die Berechnung neu ausgeführt.

Wird rechts vom "=" eine Zahl Eingegeben wird die Zahl in eine neue Zeile geschrieben.

Wird rechts vom "=" etwas anderes als eine Zahl eingegeben wird auch das Ergebnis in die neue Zeile mitgenommen.

Leerzeichen zwischen Zahlen und Operatoren können beliebig gesetzt werden.

Als negatives Vorzeichen wird das Minus „-“, eingesetzt, ein positives Vorzeichen kann nicht verwendet werden.

Nach einer Korrektur wird durch Drücken von B8 bzw. der Eingabetaste oder „ist-gleich“ das neue Ergebnis berechnet.

12.4 Bewegungen in Rechnungen und Ergebnissen

Innerhalb einer Rechnung können Sie den Cursor mit dem Navistick nach rechts / links oder mit B9+B1 / B9+B4 bewegen. Oder Sie Nutzen Cursorrouting.

Die letzten 10 Berechnungen befinden sich in der Berechnungsliste. Gehen Sie durch die Liste mit Navistick nach oben / unten oder D1 / D3. Berechnungen dieser Liste können für Weiterberechnungen editiert werden.

Neue Einträge werden am Ende der Liste angefügt. Sobald die Liste 10 Einträge enthält, wird der jeweils älteste Eintrag gelöscht, um für eine neue Rechnung Platz zu machen. Folgende Befehle sind verfügbar:

Vorige Berechnung: Navistick nach oben, D1, oder Befehle Menü „Ansicht > Berechnungsliste > Voriger Eintrag“.

Nächste Berechnung: Navistick nach unten, D3, oder Befehle Menü „Ansicht > Berechnungsliste > Nächster Eintrag“.

Letzte Berechnung: Befehle Menü „Ansicht > letzter Berechnungslisten-eintrag“

Berechnungsliste löschen: Kurzbefehl z+B9, oder Befehle Menü „Bearbeiten > Berechnungsliste löschen“.

12.5 Zwischenablage nutzen

Berechnungen und Ergebnisse lassen sich mit dem allgemeinen Kopierbefehl c+B9 in die Zwischenablage kopieren. Mit dem allgemeinen Einfügenbefehl v+B9 können sie aus der Zwischenablage in die Berechnungszeile einfügen. Mit dem Befehl z+B9 wird nur das Ergebnis in die Zwischenablage kopiert.

12.6 Einstellungen

Es gibt zwei Einstellungen im Befehle Menü „Extras > Optionen“.

Anzahl der Nachkommastellen nach einem Dezimalpunkt (oder Komma)

Auswahl ob ein Punkt oder ein Komma als Trennzeichen bei Dezimalzahlen verwendet wird.

12.7 Speicherliste und Speicherfunktionen (Memory)

Es gibt eine Speicherliste, in der bis zu 10 Speicherwerte oder Berechnungen abgelegt werden können, die auch für Weiterberechnungen aufgerufen und bearbeitet werden können. Bei mehr als 10 Speicherwerten, wird der jeweils älteste Wert entfernt.

Außerdem gibt es die bei Taschenrechnern übliche Speicherfunktion für Summenberechnungen (M-Plus, M-Minus).

Diese Speicherwerte werden ebenfalls in die Speicherliste aufgenommen und verdrängen ältere Speicherwerte.

Folgende Befehle sind verfügbar:

Berechnung in die Speicherliste aufnehmen: h+B9 oder Befehle Menü „Extras > Speicherfunktionen > Zur Speicherliste hinzufügen“.
Zum vorherigen Speicherlisteneintrag: i+B8B9 , oder Befehle Menü „Ansicht > Speicherliste > vorheriger Eintrag“.
Zum nächsten Speicherlisteneintrag: i+B9 , oder Befehle Menü „Ansicht > Speicherliste > nächster Eintrag“.
Letzten Speicherlistenwert anzeigen: p+B9 Befehle Menü „Ansicht > letzter Speicherwert“.
Alle Einträge in der Speicherliste löschen: t+B9 Befehle Menü „Bearbeiten > Speicherliste löschen“.
Eingegebenen Wert zum Speicher hinzu zählen (Funktion M+): Plus + B8B9, Befehle Menü „Extras > Speicherfunktionen > M+ zu Speicher addieren“.
Eingegebenen Wert vom Speicher abziehen (Funktion M-): Minus + B8B9, Befehle Menü „Extras > Speicherfunktionen > M- vom Speicher subtrahieren“.
Speichereintrag an der Cursorposition einfügen: s+B9 oder Befehle Menü „Extras > Speicherfunktionen > letzten Speichereintrag einfügen“.
Speicherwert anzeigen und anschließend löschen: l+B8B9 oder Befehle Menü „Bearbeiten > letzten Speicherwert anzeigen und Eintrag löschen.“

Beispiel 1

Sie speichern eine Berechnung zur Ermittlung des Bruttopreises mit dem Nettopreis 100 und 19 Prozent Mehrwertsteuern. Sie geben dazu ein: 100+19%100 und drücken „h+B9“, um diese Formel in die Speicherliste aufzunehmen.

Für andere Preisberechnungen bewegen Sie sich in der Speicherliste zu dem gewünschten Eintrag (i+B9 oder i+B8B9). Editieren Sie die beiden Angaben „100“ mit dem neuen Nettopreis und führen die neue Berechnung durch Drücken von B8 aus.

Beispiel 2

Beim Nachprüfen eines Kassenzettels summieren Sie die Einzelbeträge, indem Sie nach jedem Betrag „Plus+B8B9“ drücken. Die erreichte Summe wird anschließend durch Drücken von „l+B8B9“ angezeigt. Wenn Sie diesen Kurzbefehl ein weiteres Mal drücken, erhalten Sie die vorherige Zwischensumme, usw.

12.8 Wissenschaftliche mathematische Funktionen

Die mathematischen Funktionen und ihre Operatoren lassen sich direkt in die Berechnungszeile eingeben oder über das Menü „Mathematische Funktionen > Grundrechenarten“ bzw. „Mathematische Funktionen > Erweitert“ einfügen.

Es gilt Punkt- vor Strichrechnung, Funktionen werden zuerst ausgeführt, durch Setzen von Klammern lässt sich die Berechnungsreihenfolge steuern.

Als negatives Vorzeichen wird das Minus geschrieben, z.B.: $3*-2$.

Eine Liste der Funktionen, ihrer Operatoren und ein Beispiel folgen:

12.9 Grundrechenarten

Addition (plus): +	2+3
Subtraktion (minus): -	3-2
Multiplikation (mal): *	3*2
Division (geteilt durch): /	7/8
Prozent (x Prozent von y): %	7%50
Klammern ():	3*(7+5)
Quadratwurzel: sqrt	sqrt 36

12.10 Potenzen, Logarithmen und mehr

Potenz (hoch x): pot	2pot3
Exponent (10 hoch x): exp	2exp-5
Zehnerlogarithmus (Logarithmus zur Basis 10): log	5*log 70
Natürlicher Logarithmus: ln	2/ln10
Euler: epow	epow-3
Pi: pi	pi*36
Modulo: mod	5mod4

- Bei dieser Funktion wird der nicht dividierbare ganzzahlige Rest angegeben:
- Beispiel: Bei der Division von 5 geteilt durch 4 bleibt der Rest 1 also lautet das Ergebnis $5\text{mod}4=1$

12.11 Winkelfunktionen

Sinus Grad: sin	sin90
Sinus Bogenmaß: sinr	sinr(4+7)
Sinus hyperbolicus: sinh	sinh0,75
Arcus Sinus Grad: asin	asin0,5
Cosinus Grad: cos	cos 90
Cosinus Bogenmaß: cosr	cosr(4+7)
Cosinus Hyperbolicus: cosh	cosh0,75
Arcus Cosinus Grad: acos	acos0,75
Tangens Grad: tan	tan 45
Tangens Bogenmaß: tanr	tanr(4+7)
Tangens Hyperbolicus: tanh	tanh0,75
Arcus Tangent Grad: atan	atan0,5

12.12 Anwenderkonstanten

Den Variablen x, y und z können beliebige konstante Werte zugeordnet werden.

Beispiel: Sie können bestimmte Faktoren, die Sie häufig bei Berechnungen benötigen selber definieren. Die Variable wird dann statt einer Zahl eingesetzt, z.B. „sqrtx“ berechnet die Quadratwurzel aus dem zugewiesenen Wert x. Hierzu können Sie entweder als Kurzbefehl den Buchstaben x, y bzw. z direkt eingeben oder den entsprechenden Menüeintrag wählen.

Um einen Wert für die Variable x zu definieren, geben Sie die Zahl ein, öffnen das Befehle Menü und wählen den Eintrag „Anwenderkonstanten > x > Berechnungszeile in x einfügen“ oder Kurzbefehl 1+B8B9. Derartige Zuweisungen sind hilfreich, wenn man häufig mit bestimmten Werten rechnen muss: z.B. verschiedenen Zinssätzen, physikalische Größen usw.

Folgende Befehle stehen zur Verfügung und befinden sich im Befehle Menü > Anwenderkonstanten > x:

x in Berechnungszeile einfügen. (Kurzbefehl x)
Inhalt von x in Berechnungszeile einfügen.

Berechnungszeile in x einfügen. (Kurzbehl 1+B8B9)
Eintrag X anzeigen – Kurzbehl 1+B9

Gleiches gilt für die anderen beiden Variablen y bzw. z, welche auf vergleichbare Weise mit Kurzbefehlen und der Ziffer 2 bzw. 3 eingesetzt werden.

12.13 Umrechnungen

Mit dem Menüeintrag „Umrechnungen“ und seinen Funktionen lassen sich verschiedene Einheiten umrechnen. Beispiel: Wieviele Zentimeter sind 17 inch?

Schreiben Sie 17, öffnen das Befehlemenü und wählen den Eintrag „Umrechnungen > inch in Zentimeter“. In der Berechnungszeile steht der entsprechende Wert, in unserem Beispiel 43,18.

Hinweis:

Es werden nur die jeweiligen Werte angezeigt. Die Maßeinheit ergibt sich aus dem gewählten Umrechnungsbefehl.

12.14 Rechner verlassen

Um die Rechneranwendung zu verlassen und wieder in das Hauptmenü zu gelangen drücken Sie etwas länger auf die Systemtaste S3.

13 Dateiverwaltung

13.1 Einführung

Ähnlich wie im Windows Explorer oder im Macintosh Finder bietet die Anwendung Dateiverwaltung folgende Möglichkeiten:

Dateien markieren, löschen, kopieren oder umbenennen

Neue Ordner erzeugen

Dateien zwischen Ordnern verschieben

Sortierreihenfolge der Ordner und Dateien ändern

Zip Dateien packen und entpacken

Mit dem allgemeinen Kurzbefehl `⌘+D` wird die Dateiverwaltung aus jeder Anwendung geöffnet, oder wählen sie im Hauptmenü den Eintrag „Dateiverwaltung“ bzw. drücken den Anwahlbuchstaben „d“.

Weitere Details zur Dateiverwaltung finden Sie im Kapitel 16 „Das Befehlemenü“

13.2 Ordner und Dateien in der Dateiverwaltung erreichen

Wenn Sie die Dateiverwaltung öffnen, befinden Sie sich in der Datei und Ordnerliste, in welcher die Dateien und Ordner untereinander stehen. Es wird der Ordner bzw. die Datei angezeigt, die beim letzten Verlassen der Dateiverwaltung angezeigt wurde. Es ist die gleiche Ansicht wie bei der Datei- und Ordnerliste in der Textverarbeitung beim Öffnen oder Speichern.

Erinnerung: Das Befehlemenü wird in jeder Anwendung durch kurzen Druck auf die Systemtaste `S3` geöffnet.

Um sich in der Datei- und Ordnerliste zu bewegen, gibt es viele Möglichkeiten:

Nach unten gehen: Navistick nach unten, Displaytaste `D3` oder Befehl `B9B6`.

Nach oben gehen: Navistick nach oben, Displaytaste `D1` oder Befehl `B9B3`.

Sie erreichen damit alle Ordner und Dateien einer Ebene (z.B. Wurzelverzeichnis im internen VarioUltra Speicher). Durch Eingabe eines Buchstabens oder zügiger Eingabe mehrerer Zeichen, gelangen Sie zu der Datei oder zu dem Ordner, der mit diesem Buchstaben oder mit dieser Zeichenfolge beginnt.

Mit Navistick rechts oder dem Befehl B9B4 gehen Sie eine Ebene tiefer und erreichen z.B. den Ordner „Edit“.

Mit Navistick links oder dem Befehl B9B1 gehen Sie nach links eine Ebene höher und schließen z.B. den Ordner „Edit“.

In der höchsten Ebene befindet sich der interne Speicher „Flashdisk“ und sofern ein USB Stick angesteckt ist, der Ordner „Stick“. Als nächste, tiefere Ebene, erreichen Sie entweder den Ordner „Edit“ oder andere Unterordner und Dateien.

Hinweis:

Wenn VarioUltra über USB mit dem Computer verbunden ist, zeigt die MTP Verbindung den internen Speicher „Flashdisk“ mit dem Namen "VarioUltra Storage".

13.3 Zusatzinformationen zu Dateien und Ordnern

Zusätzlich zum Namen werden Dateigröße und Datum angegeben. Die Angabe und Reihenfolge dieser Informationen lässt sich im Hauptmenü „> Einstellungen > Darstellung > Vorlagen > Datei“ bzw. „Ordner“ konfigurieren.

Ein vorangestellter Buchstabe z zeigt an, dass die Datei oder der Ordner zu einem zip-Archiv gehört.

Hinweis:

Beim Öffnen einer Datei wird die jeweilige Anwendung geöffnet. PDF Dateien öffnen den PDF Dokumentbetrachter, Exceldateien öffnen den Excel Betrachter, DOC, DOCX, PPT, PPTX, PPS, RTF, TXT oder BRF Dateien öffnen die Textverarbeitung.

13.4 Dateien auf einem USB Stick in der Dateiverwaltung

Den USB Stick in der Dateiverwaltung zu erreichen ist so einfach wie das Anstecken des Sticks in die Standard USB Buchse auf der linken Geräteseite. Danach einfach die Dateiverwaltung öffnen und in der Ordnerliste zum Eintrag "Stick" bewegen.

Hinweis:

Die meisten USB Sticks lassen sich nur einstecken, wenn die richtige Steckerseite nach oben zeigt, d.h. wenn man versucht sie falsch herum einzustecken, passen sie nicht richtig.

Es gibt jedoch auch so genannte mini USB Sticks, die auf beiden Seiten besonders flach sind. Hier ist es leicht möglich versehentlich den Stick falsch herum einzustecken, was dazu führt, dass der Stick in der Dateiverwaltung nicht erkannt wird. Stecken Sie in diesem Fall den Stick anders herum in die USB Buchse.

13.5 VarioUltra als externes Laufwerk am Computer verwenden

Der Anschluss an den Computer erfordert lediglich ein USB Kabel, welches die Micro USB Buchse mit der Standard USB Buchse am Computer verbindet. Die Erkennung als externes Laufwerk nutzt den MTP Standard

Wenn der Computer die Verbindung erkennt, können Sie im Windows Explorer den internen Speicher von VarioUltra als „VarioUltra Storage“ Laufwerk erreichen, welcher in VarioUltra die Bezeichnung „Flashdisk“ hat.

Sie können die üblichen Computerbefehle zum Kopieren, Einfügen, Verschieben, Löschen, Umbenennen usw. verwenden.

Hinweis:

Es spielt keine Rolle, ob bei VarioUltra die Braillezeilenfunktion oder die Notizgerätfunktion eingestellt ist. Auch das Wechseln zwischen diesen beiden Gerätearten während einer USB Verbindung ist erlaubt.

Gegenwärtig wird die USB MTP Verbindung nur von den aktuellen Windows Betriebssystemen unterstützt. Bei älteren Windows Betriebssystemen und MAC Computern ist der einfache Anschluss als externes Laufwerk nicht möglich bzw. bedarf eventuell der Installation zusätzlicher Software.

13.6 Dateiverwaltung verlassen

Um die Dateiverwaltung zu verlassen und wieder in das Hauptmenü zu gelangen drücken Sie etwas länger auf die Systemtaste S3.

14 Einstellungen

Der Eintrag "Einstellungen" und seine Untermenüs im Hauptmenü erlauben Ihnen eine Vielzahl von Einstellungen. Das Festlegen von Brailletabellen, Brailledarstellung, Alarmsignale, Bluetooth Einstellungen sowie Einstellen von Datum und Uhrzeit.

Drücken sie innerhalb des Hauptmenüs den Anwahlbuchstaben „e“ oder nutzen Sie den allgemeinen Kurzbefehl e+B7B8B9 um die Einstellungen jederzeit zu erreichen.

14.1 Ton- und Vibrationssignale

Bei dem Eintrag "Ton- und Vibrationssignale" können Sie festlegen, ob VarioUltra Töne ausgeben und / oder vibrieren soll, um über Ereignisse zu informieren, z.B. bei einer Änderung der Bluetoothverbindung. Auch kann die Gerätelautstärke für die Audiosignale eingestellt werden.

14.1.1 Einstellungen zur Vibration

Standardmäßig sind die Audiotöne als Signal aktiviert. Im Untermenü "Einstellungen > Ton- und Vibrationssignale" können Sie generell einstellen, ob Vibrationen bei Ereignissen verwendet werden. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollfeld durch Drücken der Cursorroutingtaste über dem Kontrollfeld oder mit Bewegungen des Navisticks nach rechts oder links. Gehen Sie dann nach unten und bestätigen OK.

Hinweis:

Wenn die Vibration ausgeschaltet ist, gilt dies für alle eventuell eingestellten Vibrationen z.B. im Wecker. Die Vibration beim kompletten ausschalten des Geräts bleibt jedoch immer aktiv.

14.1.2 Gerätelautstärke

Die Gerätelautstärke regelt die Gesamtlautstärke für alle akustischen Ausgaben:

Über den Menüeintrag „Einstellungen > Ton- und Vibrationssignale“ erreichen Sie ein Eingabefeld, um den gewünschten Wert für die Lautstärke einzugeben. Der aktuelle Wert wird angezeigt, und Sie können entweder einen neuen Wert zwischen 0 und 100 eingeben, oder gehen

Sie mit dem Navistick nach rechts oder links, um den aktuellen Wert in Zehnerschritten zu ändern.

Der Kurzbefehl S4+Bx verändert direkt die Gerätelautstärke, wobei Bx eine der Brailletasten B1 bis B8 ist. Die Lautstärke ändert sich dabei stufenweise von links nach rechts. S4+B7 ist die leiseste und S4 +B8 die lauteste Einstellung.

14.2 Braille

Der Menüeintrag „Braille“ und seine Untermenüs ermöglichen es, unter anderem die folgende Darstellung für die Brailleausgabe einzustellen.

Linken und rechten Rand einstellen

Springen / Schleppen der Brailledarstellung

Cursorform im Lese- und Bearbeitungsmodus

Brailleeingabe- und Ausgabetablellen

Brailleschriftart für die Darstellung von Menüeinträgen, Systemmeldungen usw.

Innerhalb der Untermenüs erreichen Sie die einzelnen Menüeinträge durch Bewegungen nach oben oder unten mit dem Navistick oder den Displaytasten D1 und D3. Um längere Einträge zu lesen, scrollen Sie mit D5 und D2.

14.2.1 Darstellung

Der Menüeintrag "Darstellung" ermöglicht es, einen linken und/oder rechten Rand zu definieren sowie festzulegen, ob die Braillezeile beim Erreichen des linken bzw. rechten Rands springend oder schleppend reagieren soll.

Diese Einstellungen gelten sowohl für das Editieren von Texten innerhalb der Textverarbeitung als auch in Eingabefeldern. Beim Lesen mit den Displaytasten (D2 / D5 Scrollen) haben diese Einstellungen keine Auswirkungen.

Hinweis:

Die hier gemachten Einstellungen gelten nicht, wenn in der Textverarbeitung die Funktion "Zeige ganze Wörter" aktiviert ist.

14.2.1.1 Linker / rechter Rand:

Die Randeinstellungen können sinnvoll bei der Eingabe und beim Korrekturlesen von Texten sein.

Über den Menüeintrag „Einstellungen > Braille > Darstellung“ erreichen Sie Eingabefelder um die Werte für den linken und rechten Rand einzugeben.

Beispiel: Stellen Sie den linken und rechten Rand auf je 3 Zeichen ein. Wenn Sie nun durch positionieren des Cursors ein Wort am Ende oder Anfang der Zeile erreichen, wechselt die Anzeige auf der Braillezeile und Sie sehen auch die 2 Zeichen vor bzw. nach dem Zeichen unter dem Cursor.

14.2.1.2 Zeile springt / schleppt

Die Funktion „Zeile springt“ bewirkt, dass die Braillezeile beim Erreichen des linken oder rechten Rands um eine Braillezeilenlänge nach links bzw. nach rechts springt. wobei der Cursor in Abhängigkeit vom eingestellten linken bzw. rechten Rand auf der Braillezeile positioniert wird. (Bei Randeinstellungen „0“ ist dies auf dem ersten bzw. letzten Zeichen.) Wenn das Springen der Zeile deaktiviert ist, ist die Funktion „schleppen“ eingestellt. Dies bewirkt, dass die Braillezeile beim Erreichen des linken oder rechten Rands Zeichenweise nach links bzw. rechts geschleppt wird, wobei der Cursor an der durch den linken bzw. rechten Rand definierten Stelle verbleibt. (Die Schrift wandert über die Zeile.)

Wählen Sie das gewünschte Verhalten durch aktivieren/deaktivieren des entsprechenden Kontrollfeldes im Dialog, den Sie über das Untermenü „Einstellungen > Braille > Darstellung“ erreichen.

14.2.1.3 Kein Wortumbruch bei Meldungen

Diese Einstellung ist selbsterklärend und betrifft die Darstellung von Meldungen.

Wenn das Kontrollfeld gewählt ist, werden bei längeren Meldungen Worte am Ende der Braillezeile unvollständig angezeigt. Zum Lesen längerer Meldungen scrollen sie mit D5 und D2.

14.2.1.4 Punktstärke

Mit den Einträgen in der Liste „Punktstärke“ können Sie in 3 Stufen die Punktstärke der Brailleanzeige einstellen. Standard ist „mittel“. Die Punktstärke ist die Kraft, mit der die Stifte der Brailleelemente nach oben gedrückt werden. Für den Leser fühlen sich die Braillepunkte dadurch weicher (matschig) oder härter (spitz) an.

14.2.2 Cursor

Der Menüeintrag „Cursor“ ermöglicht es, die Form des Cursors getrennt nach Schreib- und Lesemodus einzustellen, sowie die Funktion der invertierten Darstellung auszuwählen.

Die Cursorform kann auch als blinkender Cursor mit einstellbarer Blinkrate dargestellt werden.

Lesemodus

Für die Cursorform im Lesemodus wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Braille > Cursor > Lesemodus“. Diese Cursorform wird beim Lesen von Dokumenten mit aktiviertem Textschutz oder bei PDF Dokumenten angezeigt. Standardmäßig ist dieser Cursor ein blinkender Punkt 8.

Bearbeitungsmodus

Für die Cursorform im Bearbeitungsmodus wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Braille > Cursor > Schreibmodus“. Diese Cursorform wird beim Schreiben oder Editieren in Dokumenten und Eingabefeldern angezeigt. Standardmäßig ist dieser Cursor durch die Punkte 7,8 dargestellt.

Um die Form des Cursors festzulegen, geben Sie im Eingabefeld die Ziffern der Braillepunkte ein, aus denen der Cursor bestehen soll. z.B. 123456 für die 6-Punkt-Vollform. Bei einer fehlenden oder ungültigen Eingabe wird der Cursor als Leerform dargestellt, er ist also verborgen. Eine invertierte Darstellung des Cursors bewirkt, dass die übliche Darstellung umgekehrt wird, d.h. wenn sich der Cursor auf einem Zeichen befindet, sind die Stifte des Brailleelements, welche üblicherweise herausstehen, eingezogen und die sonst nicht verwendeten Stifte sind tastbar. Interessant ist die invertierte Darstellung in Verbindung mit dem Blinken des Cursors, weil Sie dann zwischen der Normalansicht und der

invertierten Ansicht des Zeichens unter dem Cursor wechseln. Beispiel: Cursorform ist 8-Punkt Vollform (B1B2B3B4B5B6B7B8) mit aktiver Invertierung. Wenn Sie nun den Cursor auf den Buchstaben i (Punkte B2B4) positionieren, so sind diese nicht gesetzt und stattdessen werden die übrigen Punkte angezeigt (Punkte B1B3B5B6B7B8).

Um den Cursor blinkend darzustellen, wählen sie das entsprechende Kontrollfeld. Bei gewähltem Kontrollfeld erscheint im Dialog ein Eingabefeld zur Eingabe der Blinkrate in Millisekunden. Geben Sie einen Wert zwischen 200 und 2000 ein, um die Geschwindigkeit für das Blinken festzulegen (Wiederholungsintervall).

14.2.3 Braille Schriftart

Sie können einstellen, mit welcher Braille-Schriftart die Systemmeldungen, Menüeinträge, Dialoge usw. angezeigt werden sollen. Diese Einstellung ist unabhängig von der für das Lesen und Schreiben eingestellten Brailletabelle.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Braille > Braille-Schriftart“, um den Dialog zu öffnen.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollfeld „Hauptschalter Computerbraille“.
3. Wählen Sie mit Navistick links / rechts in den Listen die gewünschten Einträge.
4. In der Liste “Sprache” ist die Systemsprache eingestellt.
5. In der Liste “Lesen” stellen Sie ein, in welcher Schriftart Menüeinträge, Dialoge, Meldungen angezeigt werden.
6. In der Liste “Schreiben” stellen Sie ein, welche Schriftart Sie für Eingaben in Eingabefeldern verwenden möchten.
7. Mit dem Kontrollfeld “Leseschriftart auch für Text in Eingabefeldern verwenden”, können Sie festlegen, dass die eingestellte Leseschriftart auch verwendet wird, um Text in Eingabefeldern oder Infefeldern anzuzeigen.

Hinweise:

Einige Eingabefelder (z.B. Pfadangaben etc.) bleiben bei der Verwendung von Computerbraille, unabhängig von der gewählten Einstellung. In diesen Fällen erhalten Sie eine Hinweismeldung.

Der Eintrag in der Liste "Sprache" entscheidet, welche Einträge in den Listen „Lesen“ und „Schreiben“ angeboten werden. Kurzschrift gibt es nur für wenige Sprachen.

14.2.4 Standard Brailletabellen

Für die Eingabe und Ausgabe von Braille werden Brailletabellen eingesetzt. In diesen Tabellen ist definiert, durch welche Braillepunkte ein Schwarzschriftzeichen dargestellt wird.

Die zur Verfügung stehenden 8 Braillepunkte erlauben 256 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, d.h. von den über 65000 Schwarzschriftzeichen, die im Computer durch ihren UNICODE Wert definiert sind, kann nur eine Auswahl von 256 Zeichen zugeordnet werden. Daraus ergibt sich, dass Brailleformen bei verschiedenen Landessprachen anderen Zeichen zugeordnet sind.

Beispiel:

Das englische/amerikanische Computerbraille hat eine andere Zeichenzuordnung. Diese ist in den Brailletabellen US.b2u und US.u2b festgelegt. U in den Dateiendungen bedeutet Unicode, B bedeutet Braille.

Die Eingabetabelle „Europa.b2u“ interpretiert die über die Brailletastatur eingegebene Brailleform (deutsch-europäisches Computerbraille) und schreibt das zugeordnete UNICODE-Zeichen.

Die Ausgabetablelle „Europa.u2b“ interpretiert den UNICODE des Schwarzschriftzeichens und erzeugt auf der Braillezeile die zugeordnete Brailleform (deutsch-europäisches Computerbraille).

Entsprechendes gilt für die Brailletabellen anderer Landessprachen.

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Braille > Standard Brailletabellen“, um den Dialog zu öffnen. In der ersten Liste wird die verwendete Eingabetabelle und in der zweiten Liste die Ausgabetablelle gezeigt. (Europa.b2u und Europa.u2b für deutsch-europäisches Computerbraille) Bewegen Sie den Navistick nach links oder rechts um andere Tabellen einzustellen.

14.2.5 Braillepunkte 7 und 8 verbergen oder zeigen

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellung > Braille > Braillepunkte 7 und 8 verbergen bzw. zeigen“. Der Menüeintrag wechselt zwischen beiden Einstellungen, je nachdem, ob „zeigen“ oder „verbergen“ gewählt wurde. (Toggle Funktion).

Wenn der Eintrag „verbergen“ gewählt ist, werden bei allen Textanzeigen die Braillepunkte 7 und 8 nicht gezeigt. Zeichen In Computerbraille, welche die Punkte 7 und/oder 8 enthalten, sind unvollständig.

Wenn der Eintrag „zeigen“ gewählt ist, werden bei allen Textanzeigen die Braillepunkte 7 und/oder 8 gezeigt, so dass Computerbraille korrekt dargestellt wird.

14.3 Darstellung

Im Hauptmenü unter dem Menüeintrag “Einstellung > Darstellung” erreichen Sie folgende Einträge, um die Art wie etwas dargestellt wird, zu ändern.

Menükurzbefehle

Anwahlbuchstaben

Vorlagen

Passworteinstellung

Meldungen

14.3.1 Menükurzbefehle

In Menüs wird bei den Menüeinträgen standardmäßig der zugeordnete Kurzbefehl zum Öffnen bzw. Ausführen des Elements angegeben. Die angezeigten Kurzbefehle werden auch in der Kontexthilfe angegeben.

Im Hauptmenü unter “Einstellungen > Darstellung > Menükurzbefehle“ gibt es zwei Kontrollfelder:

Braillekurztasten zeigen

Befehle mit Displaytasten zeigen

Bewegen Sie den Navistick nach links oder rechts, oder drücken Sie B0 oder eine Cursorroutingtaste über dem Kontrollfeld, um die Einstellung zu ändern.

14.3.2 Anwahlbuchstaben

In Menüs und Dialogen wird bei den jeweiligen Einträgen ein Anwahlbuchstabe angegeben mit dem Sie als Kurztaste den Eintrag direkt erreichen.

In der Standardeinstellung wird der Anwahlbuchstabe als einzelner Buchstabe vor dem Eintragsnamen angezeigt. Beispiel: Beim Eintrag "Einstellungen" lesen Sie auf der Braillezeile folgendes: ME (für Menüeintrag) der Buchstabe e als Anwahlbuchstaben und den Namen des Eintrags, also „Einstellungen“.

Eine andere Einstellung bewirkt dass der Anwahlbuchstabe innerhalb des Eintragsnamens mit unterlegten Braillepunkten 7,8 markiert ist.

Um die Art der Anzeige für Anwahlbuchstaben zu wechseln, wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Darstellung > Anwahlbuchstaben“.

Im Dialog gehen Sie wie folgt vor.

1. Eine Liste zeigt die verfügbaren Anzeigeeoptionen für Anwahlbuchstaben. Bewegen Sie den Navistick nach links / rechts um die gewünschte Einstellung zu wählen.
2. Wenn der Anwahlbuchstabe separat gezeigt werden soll, können sie ein Präfix und Postfixzeichen definieren. Standardmäßig sind es Leerzeichen, damit der Buchstabe einzeln steht.
3. Bestätigen Sie abschließend OK.

14.3.3 Vorlagen

Mit dem Eintrag im Hauptmenü „Einstellungen > Darstellung > Vorlagen“ erreichen Sie Einstellungsmöglichkeiten, um die Darstellungen von Menüeinträgen und Dialogelementen benutzerspezifisch zu konfigurieren. In der Grundkonfiguration des Auslieferungszustands ist die Art, wie Menüeinträge und Dialogelemente angezeigt werden, vordefiniert. Mit Hilfe der Vorlagenoptionen können Sie sich ihre persönlich bevorzugte Einstellung festlegen und selber entscheiden, welche Informationen angezeigt werden sollen.

Die einzelnen Eintragsinformationen werden im Folgenden auch als Segmente bezeichnet. Solche Segmente sind die Elementbezeichnung, Anwahlbuchstabe, Kurzbefehl, Status, usw.)

Bei Bedarf können Sie die vordefinierten Grundkonfigurationen wieder herstellen.

(Die Einstellungen werden in VarioUltra/User/controls.xml gespeichert).

In den folgenden Unterkapiteln werden die Segmente der jeweiligen Grundkonfigurationen vorgestellt und die Einstellungsmöglichkeiten beschrieben. Die Vorgehensweise, Vorlagen mit Hilfe der jeweiligen Einstellungsdialoge zu konfigurieren, ist im Wesentlichen immer gleich.

Menüeintrag

Schalter

Kontrollfeld

Eingabefeld

Infofeld

Auswahlliste

Datei

Ordner

Die Einstellungsdialoge haben folgende Elemente:

Infofeld „Braille“

Zeigt an, welche Segmente (Eintragsinformationen) gewählt sind, sowie ihre Reihenfolge für die Angabe in Braille. Verändern können Sie Auswahl oder Reihenfolge durch Öffnen des zugeordneten Bearbeiten-Dialogs.

Schalter „Bearbeiten“.

Öffnet einen Dialog, um die im Infofeld „Braille“ angegebenen Einträge zu wählen, oder Änderungen bei dem jeweiligen Segment durchzuführen.

Schalter „Auf Grundeinstellung setzen“

Stellt die Grundkonfiguration für die Brailledarstellung wieder her. Eventuell vorgenommene Konfigurationen für die Segmente in anderen Vorlagen werden nicht beeinflusst.

In dem Dialog „Bearbeiten“ finden Sie folgende Optionen, wobei je nach Art des zuvor ausgewählten Segmenteintrags die verfügbaren Optionen variieren können:

Auswahlliste „Elemente“

Zeigt die Segmente, welche für die gewählte Brailledarstellung definiert sind (Angezeigt im vorherigen Infofeld). Die vorangestellte Zahl gibt die Position an. Wählen Sie durch Bewegungen nach rechts/links den gewünschten Listeneintrag. Durch kurzen Druck auf S3 öffnen Sie ein Befehlsmenü, dort finden Sie Einträge um die Position des Segments zu verändern, das Segment zu verbergen oder wieder zu zeigen.

Eingabefeld „Text“:

Geben Sie hier ein, wie das Segment bezeichnet werden soll. z.B. „ME“ für Menüelement. Geben Sie hinter der gewünschten Bezeichnung ein Leerzeichen ein, damit bei der Darstellung eine entsprechende Lücke auftritt.

Eingabefeld „Prefix“:

Geben Sie das Zeichen oder ein Wort ein, welches direkt vor dem gewählten Segment angegeben werden soll. Wenn für Präfix und Postfix das gleiche Zeichen eingegeben wird, ist das Segment von diesen Zeichen eingerahmt.

Eingabefeld „Postfix“:

Geben Sie das Zeichen oder ein Wort ein, welches direkt hinter dem gewählten Segment angegeben werden soll.

In dem Dialog „Bearbeiten“ kann durch kurzen Druck auf S3 ein Befehlsmenü mit folgenden Einträgen geöffnet werden.

Nach links: Verschiebt das Listenelement um eine Position nach links und ändert dadurch die Reihenfolge des Segments.

Nach rechts: Verschiebt das Listenelement um eine Position nach rechts und ändert dadurch die Reihenfolge des Segments.

Anfang: Verschiebt das Listenelement auf die erste Position und ändert dadurch die Reihenfolge des Segments.

Ende: Verschiebt das Listenelement auf die letzte angezeigte Position und ändert dadurch die Reihenfolge des Segments.

Verbergen: Die Positionsnummer wird beim Listenelement entfernt, wodurch das Segment unsichtbar wird. In der Liste wird der Eintrag an das Ende verschoben.

Zeigen: Die Information des Segments wird künftig angegeben. Das Listenelement erhält eine Positionsnummer und es ändert sich die Reihenfolge der Segmente.

Einfügen eines Textelementes: Ermöglicht, eine zusätzliche Information als neues Segment einzugeben, wobei es als neues Listenelement in die Auswahlliste „Elemente“ aufgenommen wird.

Auf Grundeinstellung setzen: Stellt in der Liste die Elemente und Positionsnummern der Grundkonfiguration wieder her.

14.3.3.1 Vorlagen > Menüeinträge

Für die Menüinformationen sind folgende Segmente einstellbar, wobei die Segmente der Grundkonfiguration eine Positionsnummer haben:

1 ME, 2 <Anwahlbuchstabe>, 3 <Bezeichnung>, 4 <Status>, 5 <Kurzbuchstabe>, <Menüname>

Segmentbezeichnungen in spitzen Klammern werden durch die jeweilige Information ersetzt. Präfix bzw. Postfix Zeichen werden entsprechend vor bzw. hinter der Segmentbezeichnung angegeben.

Besondere Segmentbedeutungen:

<Status>: Informiert, ob ein Untermenü vorhanden ist.

<Menüname>: Gibt bei Untermenüeinträgen den jeweils übergeordneten Menünamen an, wenn man bei tiefen Untermenühierarchien zur nächst höheren Untermenüebene wechselt.

Konfigurationsbeispiel:

Für die Darstellung soll statt „ME“ nur „M“ angezeigt werden:

1. Sie öffnen im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Darstellungen > Vorlagen > Menüeintrag“.
2. Sie gehen zum Infofeld „Braille“ und wählen den sich darunter befindenden Schalter „Bearbeiten“.
3. In der Liste „Elemente“ wählen Sie den Eintrag „1 ME“.
4. Das Eingabefeld „Text“ zeigt den Eintrag „ME“. Ändern Sie den Eintrag in „M“ und fügen Sie noch ein Leerzeichen an.

5. Schließen sie alle Dialoge mit „OK“.

14.3.3.2 Vorlagen > Schalter

In Dialogen können bei Schaltern folgende Informationssegmente eingestellt werden. Die Segmente der Grundkonfiguration haben eine Positionsnummer:

1 BS, 2 <Anwahlbuchstabe>, 3 <Bezeichnung>

BS bedeutet Befehlsschalter und steht bei Dialogen in Verbindung mit Wörtern wie OK, Abbrechen, Ja und Nein.

14.3.3.3 Vorlage > Kontrollfeld

In Dialogen können bei Kontrollfeldern folgende Informationssegmente eingestellt werden. Die Segmente der Grundkonfiguration haben eine Positionsnummer:

1 KF, 2 <Status>, 3 <Anwahlbuchstabe>, 4 <Bezeichnung>

Hinweis:

<Status>: informiert über den aktivierten Zustand.

14.3.3.4 Vorlagen > Eingabefeld

In Dialogen können bei Eingabefeldern folgende Informationssegmente eingestellt werden. Die Segmente der Grundkonfiguration haben eine Positionsnummer:

1 EF, 2 <Anwahlbuchstabe>, 3 <Bezeichnung>

Konfigurationsbeispiel:

Für die Brailledarstellung soll die Angabe des Anwahlbuchstabens verborgen werden:

1. Öffnen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Darstellung > Vorlagen > Eingabefeld“.
2. Sie gehen im Dialog zum Infobereich „Braille“ und wählen den sich darunter befindenden Schalter „Bearbeiten“.
3. In der Liste „Elemente“ wählen Sie den Eintrag „Anwahlbuchstabe“.

4. Durch kurzen Druck auf S3 öffnen Sie ein Befehle Menü. Bestätigen Sie dort den Eintrag „Verbergen“.
5. Sie sind zurück in der Liste „Braille“ und der Eintrag „Anwahlbuchstabe“ steht am Ende der Liste ohne Positionsnummer. Diese Einstellung gilt nur für Anwahlbuchstaben von Eingabefeldern, nicht für Infofelder.
6. Schließen Sie alle Dialoge durch Bestätigen von „OK“.

Zur Erinnerung:

Ob ein Anwahlbuchstabe in Braille ausgerückt gezeigt, als markierter Buchstabe oder nicht gezeigt wird, lässt sich einstellen in Hauptmenü > Einstellungen > Darstellungen > Anwahlbuchstaben“.

14.3.3.5 Vorlagen > Infofeld

In Dialogen können für Infofelder folgende Informationssegmente eingestellt werden. Die Segmente der Grundkonfiguration haben eine Positionsnummer:

1 EF, 2 <Anwahlbuchstabe>, 3 <Bezeichnung>

14.3.3.6 Vorlagen > Auswahllisten

In Dialogen können für Auswahllisten folgende Informationssegmente eingestellt werden. Die Segmente der Grundkonfiguration haben eine Positionsnummer:

1 LI, 2 <Text>, 3 <Bezeichnung>, 4 <Anwahlbuchstabe> <Accelerator>

14.3.3.7 Vorlagen > Datei

In Datei- und Ordnerlisten können bei Dateien folgende Informationssegmente eingestellt werden. Die Segmente der Grundkonfiguration haben eine Positionsnummer.

1 LI, 2 <Type>, 3 <Text>, 4 <Index>/, 5 <Gesamtzahl>, 6 <Größe>, 7 <Datum>, 8 <Pfad> (mit Eintrag „Pfad:“ als Präfix), 9 <Bezeichnung>, 10 <Anwahlbuchstabe>.

Konfigurationsbeispiel:

Für die Brailledarstellung bei Dateien soll das erste Segment „D“ anstelle von „LI“ anzeigen.

1. Öffnen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Darstellung > Vorlagen > Datei“.
2. Gehen Sie im Dialog zum Infobereich „Braille“ und wählen den sich darunter befindenden Schalter „Bearbeiten“.
3. In der Liste „Elemente“ gehen Sie zum Eintrag „1 LI“.
4. Im Dialog gibt es nun das Eingabefeld „Text“ mit dem Eintrag „LI“.
5. Ändern Sie den Eintrag in „D“, fügen Sie am Ende noch ein Leerzeichen an und bestätigen Sie „OK“.
6. Sie sind nun wieder in der Liste „Braille“ und der Eintrag für das Segment ist entsprechend geändert.
7. Schließen Sie alle Dialoge durch Bestätigen von „OK“

14.3.3.8 Vorlagen > Ordner

In Datei- und Ordnerlisten können bei Dateien folgende Informationssegmente eingestellt werden. Die Segmente der Grundkonfiguration haben eine Positionsnummer.

1 LI, 2 <Type>, 3 +<Text>, 4 <Index>/, 5 <Gesamtzahl>, 6 <Datum>, <Größe>, <Pfad>, <Bezeichnung>

Hinweis:

Das Segment „Größe“ ermittelt beim Bewegen durch die Liste die jeweilige Ordnergröße. Da hierfür zusätzliche Rechenleistung benötigt wird, reagiert VarioUltra! langsamer, wenn dieses Segment in der Konfiguration eingestellt ist.

Für die Brailledarstellung soll bei Ordnern „O“ anstatt „LI“ im ersten Segment stehen und das Plus vor dem Ordernamen entfernt werden:

1. Öffnen Sie den Eintrag Hauptmenü > Einstellungen > Darstellungen > Vorlagen > Ordner.
2. Gehen Sie im Dialog zum Infobereich „Braille“ und wählen den sich darunter befindenden Schalter „Bearbeiten“.
3. In der Liste „Elemente“ gehen Sie zum Eintrag „1 LI“.

4. Im Dialog gibt es nun das Eingabefeld „Text“ mit dem Eintrag „LI“. Ändern Sie den Eintrag in „O“, fügen Sie am Ende noch ein Leerzeichen an.
5. Bestätigen Sie „OK“.
6. Sie sind nun wieder in der Liste „Braille“ und der Eintrag für das Segment ist entsprechend geändert.
7. Bestätigen Sie erneut den Schalter „Bearbeiten“, und gehen Sie in der Liste „Elemente“ zum Eintrag „2 +<Text>“.
8. Der Dialog hat nun die beiden Eingabefelder „Prefix“ und „Postfix“. Löschen Sie den Eintrag „+“ aus dem Präfix-Feld und bestätigen Sie „OK“.
9. Schließen Sie alle Dialoge durch Bestätigen von „OK“.

14.3.4 Passworteinstellungen

Um Ihre Privatsphäre zu schützen, wird standardmäßig bei der Eingabe von Passwörtern der verdeckte Modus genutzt. Alle Zeicheneingaben werden als „Stern“ (*) dargestellt. Eine Kontrolle, ob das Passwort eventuell einen Schreibfehler enthält, ist mit dieser Einstellung nicht möglich. Wenn Sie möchten, dass Passwörter so dargestellt werden, wie Sie sie eingeben,

Gehen Sie im Hauptmenü zum Eintrag „Einstellungen > Darstellung > Passwörter“ und deaktivieren das Kontrollfeld durch Drücken von B0. Alle Passwörter werden dann in Klartext angezeigt.

14.3.5 Meldungen

In verschiedenen Situationen werden Meldungen als Hinweise oder Warnungen angegeben. Hinweismeldungen beginnen am Zeilenanfang mit einem einzelnen Buchstaben „h“, Warnmeldungen mit „w“.

Bitte beachten:

Warnmeldungen müssen durch Drücken einer Cursorroutingtaste oder mit „OK“ (B9) quittiert werden, damit sie verschwinden. Z.B. Die Warnung bei niedrigem akkuladezustand.

Hinweismeldungen verschwinden automatisch nach 5 Sekunden, z. B. Hinweis zur eingestellten Schnittstelle beim Umschalten der Betriebsart von Notizgerätfunktion auf Braillezeilenfunktion.

Eine Hinweismeldung lässt sich „einfrieren“, wenn Sie mehr Zeit zum Lesen benötigen. Drücken Sie dazu die erste Cursorroutingtaste oberhalb

des Buchstaben "h" .Eine eingefrorene Hinweismeldung verschwindet nur dann, wenn Sie sie durch Drücken einer Cursorroutingtaste mit Ausnahme der ersten quittieren.

Wenn Sie nicht 5 Sekunden auf das automatische Verschwinden der Meldung warten möchten drücken Sie eine Cursorroutingtaste mit Ausnahme der ersten und die Meldung verschwindet sofort.

Einstellungsoptionen, ob diese Meldungen angezeigt werden, ob und nach welcher Zeit sie automatisch verschwinden sollen, finden Sie im Hauptmenü unter "Einstellungen >Darstellung > Meldungen".

14.4 Tastatur

Mit den Einstellungsoptionen in Hauptmenü „> Einstellungen > Tastatur“. Können Sie die Standardbelegung der Tasten B7 und B8 für die Texteingabe festlegen und die Doppelhubfunktion einstellen.

B7 Taste:

Die Einstellung „B7 ist Rücklöschtaste“ bedeutet, dass beim Drücken von B7 in der Textverarbeitung oder in Eingabefeldern das Zeichen links vom Cursor gelöscht wird.

Um den Braillepunkt B7 einzeln als Zeichen eingeben zu können, muss das Kontrollfeld deaktiviert sein. Als Standardeinstellung ist das Kontrollfeld gewählt.

B8 Taste:

Die Einstellung „B8 ist Zeilenwechseltaste“ bewirkt, dass beim Drücken von B8 in der Textverarbeitung an der Cursorposition ein Zeilenwechsel (Zeilenumbruch) eingefügt wird und der Cursor am Beginn der neuen Zeile steht.

Um den Braillepunkt B8 einzeln als Zeichen eingeben zu können, muss das Kontrollfeld deaktiviert sein. Als Standardeinstellung ist das Kontrollfeld gewählt.

Doppelhub:

Das Kontrollfeld „Doppelhub“ ermöglicht es, die Doppelhubfunktion einzustellen.

Bei gewähltem Doppelhub wird beim Schreiben am Ende des Wortes automatisch ein Leerzeichen eingefügt, wenn die Leertaste (B0) zusammen mit der letzten Zeicheneingabe gedrückt wird.

Tastenwiederholungsfunktion:

Das Kontrollfeld „Tastenwiederholungsfunktion für Navistick“ ermöglicht, eine automatische Wiederholungsfunktion, wenn der Navistick gedrückt gehalten wird.

Bei gewähltem Kontrollfeld erweitert sich der Dialog mit Eingabefeldern für die Anfangsverzögerung und die Wiederholfrequenz (Anschläge pro Sekunde).

Automatische Weiterschaltung:

Mit dem Kontrollfeld „Automatische Weiterschaltung“ stellen Sie ein, ob Sie beim Lesen von Dokumenten die Weiterschaltung aktivieren möchten oder nicht. Sie brauchen dann nicht selber jedes Mal D5 drücken, sondern dies geschieht automatisch nach einer einstellbaren Zeit.

Wenn Sie das Kontrollfeld wählen, erweitert sich der Dialog um das Eingabefeld „Intervall“. Geben Sie hier in Millisekunden die Zeit ein, nach der die automatische Weiterschaltung erfolgen soll

Um beim Lesen des Dokuments die automatische Weiterschaltung zu starten, drücken Sie D2 oder D5 für fünf Sekunden. Um die Weiterschaltung zu stoppen drücken Sie wieder D2 oder D5 für fünf Sekunden.

Wenn Ihnen die Weiterschaltung zu schnell oder zu langsam ist, können Sie während des Lesens die Geschwindigkeit verändern. Drücken Sie zweimal kurz D5, um die Geschwindigkeit um 100 Millisekunden zu erhöhen. Drücken Sie zweimal kurz auf D2, um die Geschwindigkeit um 100 Millisekunden zu verringern.

14.5 Datum und Uhrzeit

Für die Anzeige der aktuellen Uhrzeit, drücken Sie einmal kurz auf die Systemtaste S4, für die Anzeige des aktuellen Datums, drücken Sie zweimal kurz auf die Systemtaste S4.

Um Datum und Uhrzeit zu stellen, öffnen Sie das Hauptmenü und wählen „Einstellungen > Datum und Uhrzeit“. Der Dialog bietet Eingabefelder um Datum und Uhrzeit einzugeben, sowie die Zeitzone einzustellen oder das Anzeigenformat zu ändern.

Hinweis:

Stellen sie für die Eingabe von Datum und Uhrzeit auf Computerbraille um, sofern Sie nicht standardmäßig mit Computerbraille arbeiten. Siehe Kapitel 8.1.2

Zum Eingeben oder Ändern von Datum und Uhrzeit gehen Sie wie folgt vor.

1. Geben Sie in die Eingabefelder das gewünschte Datum bzw. die gewünschte Uhrzeit ein. Halten Sie sich an das angezeigte Eingabeformat. Die Eingabe von Buchstaben ist nicht erlaubt und wird ignoriert. Standardmäßig müssen Zahlen und Zeichen in Computerbraille geschrieben werden.
2. Um das verwendete Zeit- und Datumsformat anzupassen, bestätigen Sie die entsprechende Option.
3. Der Dialog enthält Einträge für die verschiedenen aktuell genutzten Datum- und Zeitformate. Sie können die Reihenfolge der Platzhalter ändern oder andere Zeichen eingeben, mit denen die Platzhalter getrennt werden.
4. Bitte beachten Sie die Groß- Kleinschreibung bei den Platzhaltern: d = day (Tag), M = month (Monat), y = year (Jahr), H = hour (Stunde), m = minutes (Minuten), s = seconds (Sekunden).
5. Das kurze Datums- und Zeitformat wird bei Eingabefeldern in den verschiedenen Anwendungen verwendet.
6. Das lange Datum- und Zeitformat wird bei der Abfrage mit S4 verwendet, wenn die Kontrollfelder entsprechend gewählt sind.
7. Zeitzonen lassen sich durch Auswahl des entsprechenden Listeneintrags festlegen. Die verschiedenen Einträge erreichen und wählen Sie durch rechts/links Bewegungen.

14.6 Energieversorgung

Der Menüeintrag „Energieversorgung“ ermöglicht es, die automatische Abschaltzeit des Geräts festzulegen sowie Informationen über den Akkuzustand zu erhalten.

Den Akkuladezustand können Sie mit folgenden Befehlen abfragen.
Notizgerätfunktion: Zweimal kurz auf Systemtaste S3 drücken.

Braillezeilenfunktion: Systemtaste S2 gedrückt halten und kurz die linke Daumentaste B9 drücken.

14.6.1 Automatische Selbstabschaltung

Die Selbstabschaltung bewirkt, dass das Gerät nach einer einstellbaren Zeit, in der keine Taste betätigt wird, sich selbständig in den Schlafmodus (Standby) schaltet. Eine Abschaltzeit von 10 Minuten ist voreingestellt und aktiviert.

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Energieversorgung > Selbstabschaltung“, um den Dialog zu öffnen. Der Dialog bietet ein Kontrollfeld, um die automatische Selbstabschaltung ein oder auszuschalten, eine Zeit festzulegen, nach welcher Zeit abgeschaltet werden soll und ob vor dem Abschalten ein Warnsignal ausgegeben werden soll.

Wählen Sie das Kontrollfeld „Automatisch Abschalten nach“, um die Selbstabschaltung einzuschalten und den Wert für die Abschaltzeit festlegen zu können. Kleinere Werte als 1 Minuten werden nicht akzeptiert. Unmittelbar vor dem Abschalten wird ein Warnsignal aus mehreren kurzen Tönen ausgegeben, sofern im Dialog das entsprechende Kontrollfeld gewählt ist.

Die automatische Abschaltzeit gilt nicht in der Braillezeilenfunktion, solange das Gerät verbunden ist. Wenn Sie in die Notizgerätfunktion wechseln, und VarioUltra lediglich im Hintergrund mit dem Gerät verbunden ist, gilt die automatische Abschaltung.

14.6.2 Akku

Um Informationen zum Zustand des Akkus zu erhalten, wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Energieversorgung > Akku“. Der Dialog zeigt den aktuellen Ladezustand und die Kapazität des Akkus an. Für Servicezwecke können die Lade- und Entladezyklen protokolliert werden.

Der Ladezustand wird in Prozent angegeben. Der Wert sinkt, wenn das Gerät benutzt wird und steigt während des Ladens. Es ist derselbe Wert wie beim Abfragen durch zweimal kurzes Drücken auf S3 in der Notizgerätfunktion oder Befehl S2 und linke Daumentaste in der Braillezeilenfunktion.

Die Kapazität wird in Milliamperestunden angegeben, sie informiert über die Kapazität des Akkus. Der Wert ist keine konstante Größe, denn die Kapazität ändert sich je nach Temperatur und Alter des Akkus.

Das Kontrollfeld „Protokolldatei schreiben“ ermöglicht es, das Verhalten des Akkus während der Lade- und Entladezyklen zu verfolgen und als Datei „acculog.txt“ zu speichern. Es sollte nur im Servicefall nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter der Firma aktiviert werden.

Hinweise zum Laden

Während des Ladens und Entladens gibt es für den Akku zwei Stufen. Ausgehend von einem voll aufgeladenen Akku wird bei Erreichen der ersten Stufe, die Meldung 0% angegeben und das Gerät schaltet sich aus. Dann sollten Sie VarioUltra mit der Stromversorgung verbinden, um das Gerät wieder einzuschalten und weiter arbeiten zu können.

Wenn Sie dies nicht tun, geht die Entladung des Akkus weiter und erreicht die zweite Stufe. In diesem Zustand ist es nicht möglich VarioUltra einzuschalten, auch wenn die Stromversorgung angeschlossen ist. Beim Laden in diesem Zustand wird auf der Braillezeile ein Fortschrittsbalken aus 8-Punktvollzeichen mit blinkenden Punkten 7,8 rechts vom letzten Vollzeichen angezeigt. Wenn das Laden soweit fortgeschritten ist, dass die erste Stufe erreicht ist, sind die Vollzeichen mindestens bis zum fünften Modul gewandert. In diesem Zustand kann VarioUltra eingeschaltet werden und den weiteren Ladefortschritt können Sie durch die normale Abfrage des Akkuladestatus verfolgen. Entweder durch zweimal kurz S3 (Notizgerätfunktion) oder durch S2+B9 (Braillezeilenfunktion).

Beim regelmäßigen Laden und Entladen bis zur ersten Stufe, werden die Werte 100% und 0% automatisch justiert. Bei einer Tiefentladung gehen diese Daten verloren und die Werte werden anschließend nur als ungefähre Prozentangaben ermittelt. Um die Akkuvwerte wieder zu justieren, müssen Sie einmal den Lade-, Entlade- Ladezyklus zwischen voll und erster Entladestufe durchführen.

Die Ladezeit ist abhängig von der Art der Stromversorgung. Laden über das USB Kabel an einem Computer erfolgt mit ca. 100 mA, Laden über einen USB Ladeadapter erfolgt mit 500 bis 780 mA. Bitte verwenden Sie USB Ladeadapter mit 5V und bis 2000 mA.

14.7 Ein- / Ausgabepprofile

Sie können bis zu 8 verschiedene Profile einrichten, in denen Sie unterschiedliche Brailleeingabe- und Brailleausgabetafeln festlegen, um z.B. schnell zwischen Texten in verschiedenen Landessprachen auf die jeweils passende Einstellung umzustellen. Auch Einstellungen zum Kurz-
schriftübersetzer werden gespeichert.

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Ein- / Ausgabe-
profile“, um ihre aktuellen Einstellungen in einem Profil zu speichern.

Der Dialog zum Einrichten eines Profils enthält folgende Elemente
Auswahlliste „Profile“: Zeigt die Nummern und Namen der 8 individuellen
Profile. Sofern noch keine Profile gespeichert wurden, zeigt die Liste nur
die Nummern der 8 möglichen Profile. Das ausgewählte Profil kann gela-
den, gelöscht oder umbenannt werden. Es ist auch möglich, das Profil
mit geänderten Einstellungen zu überschreiben.

Schalter „Aktuelle Einstellungen speichern“: Öffnet ein Eingabefeld, um
den Profilnamen einzugeben und das Profil zu speichern. Der Profilename
wird anschließend mit der Profilnummer in der Liste angezeigt. Wenn un-
ter der gewählten Profilnummer bereits ein Profil gespeichert ist, erhalten
Sie eine Rückfrage, ob sie das Profil überschreiben möchten.

Schalter „Umbenennen“: Öffnet ein Eingabefeld und zeigt den Profilna-
men des ausgewählten Profils. Sie können ihn ändern oder einen neuen
Namen eingeben. (Nur sichtbar, wenn mindestens ein Profil eingerichtet
ist.)

Schalter „Löschen“: Löscht das ausgewählte Profil. (Nur sichtbar, wenn
mindestens ein Profil eingerichtet ist.)

Schalter „Gewähltes Profil verwenden“: Lädt die Einstellungen die im
ausgewählten Profil festgelegt sind. (Nur sichtbar, wenn mindestens ein
Profil eingerichtet ist.)

Schalter „Löschen“: Löscht das ausgewählte Profil. (Nur sichtbar, wenn
mindestens ein Profil eingerichtet ist.)

Schalter „Gewähltes Profil verwenden“: Lädt die Einstellungen die im
ausgewählten Profil festgelegt sind. (Nur sichtbar, wenn mindestens ein
Profil eingerichtet ist.)

Schalter „Abbrechen“: Schließt den Dialog.

14.7.1 Neues Ein- / Ausgabeprofil einrichten

Nehmen Sie zuerst ihre gewünschten Braille- und Spracheinstellungen vor und speichern Sie diese dann als individuelles Profil.

Folgende Einstellungen werden berücksichtigt:

Menü „Einstellungen > Braille > Brailleschriftart“. Wählen Sie z.B. ob Sie Computerbraille oder Kurzschrifffestlegen möchten. Diese Einstellung wird z.B. für die Darstellung von Menüs, Systemmeldungen und für Dokumente im PDF Betrachter verwendet. Für Detailinfos zu den Einstellungen lesen sie bitte das entsprechende Handbuchkapitel 8.1.1

Menü „Einstellungen > Braille > Standard Brailletabellen“. Wählen Sie die Brailletabellen der gewünschten Landessprache.

In der Textverarbeitung, Menü „Extras > Kurzschrift > Einstellungen“

Wählen Sie den gewünschten Kurzschriftübersetzer und legen Sie fest, ob die Einstellung für das Schreiben und / oder Lesen verwendet werden soll.

Auch die Einstellung des Hauptschalters „Computerbraille“ wird gespeichert.

Zum Speichern dieser Einstellungen als Profil gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Menü „Einstellungen > Ein- Ausgabeprofile“
2. Wählen Sie in der Liste „Profile“ durch Bewegungen nach rechts / links die gewünschte Profilnummer. Z.B. Nummer 1.
3. Bestätigen Sie den Schalter „Aktuelle Einstellungen als Profil speichern“.
4. Geben Sie in das Eingabefeld einen aussagekräftigen Profilnamen ein. Der Profilname darf mehrere Wörter enthalten. Der Profilname „Neues Profil“ ist vordefiniert. Sie können ihn überschreiben oder löschen.
5. Bestätigen Sie OK.
6. Das Profil wird nun unter der Nummer in der Liste angegeben.
7. Schließen Sie den Dialog mit „Abbrechen“

14.7.2 Profil laden

Es gibt zwei Möglichkeiten, um ein Ein- / Ausgabeprofil zu laden:

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Ein- Ausgabeprofil“. Wählen Sie in der Liste durch Bewegungen nach rechts /

links den Namen des gewünschten Profils. Jedem Profil ist seine zugeordnete Nummer vorangestellt. Bestätigen Sie den Schalter „Gewähltes Profil verwenden“.

2. Wenn Sie die Nummer des gewünschten Profils kennen, drücken Sie den entsprechend zugeordneten Kurzbefehl. Drücken Sie die Systemtaste S1 gleichzeitig mit der Brailletaste 1 bis 8, je nachdem welche Profilnummer Sie laden möchten.

Eine Hinweismeldung zeigt, welches Profil geladen wurde.

14.7.3 Profil und Hauptschalter Computerbraille

Mit dem Hauptschalter Computerbraille bzw. der Tastenkombination D1B9 schalten Sie auf die Darstellung in Computerbraille um. Es wird dabei die Computerbraille Brailletabelle verwendet, die im Profil gespeichert ist. Z.B. Computerbraille deutsch.

Mit B9D2 können Sie wieder zu den Kurzschrifteinstellungen des Profils zurück wechseln.

Wenn Sie ein anderes Profil über die Tastenkombination S1+ B1 bis B8 aufrufen sind sie entweder in der Computerbraille Darstellung oder in der Kurzschriftdarstellung des Profils. Dies hängt davon ab, ob sie im Profil den Zustand des Kontrollfelds „Hauptschalter Computerbraille aktiv“ gespeichert haben oder nicht.

14.8 Einstellungen für die Braillezeilenfunktion

Erinnerung: Um VarioUltra in der Braillezeilenfunktion zu nutzen, müssen Sie den Betriebsartschalter nach vorne schieben.

Folgende Einstellung werden in der Braillezeilenfunktion verwendet.

14.8.1 Emulationen in der Braillezeilenfunktion

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > Braillezeilenemulation“
2. Wählen Sie in der Liste durch Bewegungen nach links oder rechts den gewünschten Braillezeilentyp. Anschließend verhält sich VarioUltra in der Braillezeilenfunktion in Verbindung mit einem Screenreader wie der ausgewählte Braillezeilentyp.

Hinweis:

Inzwischen bieten fast alle Screenreader einen Treiber, um VarioUltra als Braillezeile via Bluetooth-Verbindung direkt zu unterstützen. Die Standardemulation „VarioUltra“ braucht daher nicht verändert werden. Bei Verwendung von älteren Screenreadern, die nur Treiber für die BAUM Braillezeilen „VarioConnect“ oder „Pronto“ haben, muss eine dieser Emulationen gewählt werden, bevor Sie den Betriebsartschalter auf die Braillezeilenfunktion umstellen.

Vergewissern Sie sich, welchen Braillezeilentyp Ihr Screenreader unterstützt und wählen Sie die entsprechende Emulation z.B.

Bei iOS Geräten mit iOS 7 bis iOS 8.2, wählen Sie die Pronto Emulation. Bei Android Geräten, wählen Sie die VarioConnect Emulation.

14.8.2 Bluetooth automatisch aktivieren

Diese Funktion ist sinnvoll für Anwender, die VarioUltra als Bluetooth-Braillezeile verwenden und das Gerät komplett abschalten

Bei gewähltem Kontrollfeld wird Bluetooth eingeschaltet, wenn Bluetooth noch nicht eingeschaltet war, und sie mit dem Schiebeschalter von der Notizgerätfunktion in die Braillezeilenfunktion wechseln. Oder wenn VarioUltra komplett ausgeschaltet ist und sie das Gerät in der Braillezeilenfunktion einschalten.

Wählen Sie im Menü Einstellungen > Braillezeilenemulation das Kontrollfeld „Bluetooth automatisch aktivieren“.

Unabhängig von dieser Einstellung, wird weiterhin Bluetooth automatisch nach dem aufwecken aus dem Standby eingeschaltet, wenn Bluetooth vor dem Standby aktiv war.

14.8.3 Verbindungsänderung durch Vibration angeben

Wenn ein gepaartes und vertrauenswürdige Bluetoothgerät in Reichweite von VarioUltra kommt, - und beide nicht im Schlafmodus sind – sollten sie sich automatisch verbinden. Sie können einstellen, ob VarioUltra in diesen Fällen vibrieren soll.

Und besonders pfiffig, VarioUltra vibriert eins, zwei, drei oder viermal um anzuzeigen an welchem Bluetoothkanal die Änderung erfolgt.

Wählen Sie im Menü Einstellungen > Braillezeilenemulation das Kontrollfeld „Vibrieren bei Verbindungsänderung“, wenn Sie diese hilfreiche Rückmeldung nutzen möchten.

14.8.4 Verbindungsänderung durch Meldung angeben

Wählen Sie im Menü Einstellungen > Braillezeilenemulation das Kontrollfeld „Meldung anzeigen bei Verbindungsänderung“, wenn Sie möchten, dass automatisch für 5 Sekunden der Bluetoothkanal angezeigt wird, an dem sich das gekoppelte Gerät wiederverbunden hat.

14.8.5 Einstellungen für Braille- und HID Tastensimulation

Für die Funktion Text aus der VarioUltra Zwischenablage in der Braillezeilenfunktion zu übertragen, gibt es verschiedene Einstellungen. Sie können für jedes gepaarte Android oder iOS Gerät Einstellungen zur Braille und HID Tastensimulation auswählen und dem Gerät zuweisen. Diese Einstellungen werden automatisch verwendet, wenn man auf den Bluetoothkanal wechselt, über den das Gerät verbunden ist.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Menü Einstellungen > Braillezeilenemulation und gehen sie zur Liste „gepaarte Bluetoothgeräte“.
2. In der Liste werden die Namen der gepaarten Geräte angezeigt. Hinter dem Namen stehen in Kurzform der zugewiesene Bluetoothkanal und die Einstellungen für die Braille- und HID Tastensimulation.
3. Wählen Sie das gewünschte Bluetoothgerät.
4. Wählen Sie den Schalter „Tastensimulationseinstellungen“
5. Ein Dialog öffnet sich. Der Name des Bluetoothgeräts wird angezeigt. In verschiedenen Listen können Sie die Verzögerungszeit bei der Braille- und HID Tastensimulation getrennt einstellen und die HID Tabelle für die HID Tastensimulation auswählen.
6. Bestätigen Sie OK, um den Dialog zu schließen und die Parameter für das Gerät zu speichern.
7. Sie sind wieder im ersten Dialog und in der Liste „gepaarte Geräte“ werden die eingestellten Parameter hinter dem Gerätenamen angezeigt. (BTx, BRL xxms, HID xxms, HID table table.U2H)

8. Beenden Sie mit OK.

Die Elemente im Dialog „Tastensimulationseinstellungen“

- Infofeld „Gerätename“: Zeigt den Namen des ausgewählten gepaarten Geräts, für das die Einstellungen gespeichert werden.
- Liste „BRL Tastenverzögerung“: Wert in Millisekunden für die Verzögerung bei der Braille Tastensimulation. Es können Werte zwischen 30 und 100 ms eingestellt werden. Standardwert ist 50 ms. Je kleiner der Wert desto schneller die Übertragung, aber auch die Gefahr, das Zeichen verloren gehen.
- Liste „HID Tabelle“: Auswahl verschiedener U2H Tabellen mit landesspezifischen und Apple- bzw. Androidspezifischen Tastatur Layouts. Die HID Tabelle, muss zu dem Gerätetyp (ios oder Android) und zur Landessprache des Geräts passen. Deshalb stehen verschiedene Tabellen zur Auswahl, der Dateiname gibt entsprechende Hinweise. z.B. Apple_DE.U2H für ein deutsches iOS Gerät
 - Landessprache bedeutet, welches Tastaturlayout das verbundene Gerät verwendet. Wenn die Sprache in VarioUltra nicht mit der Sprache des anderen Gerät zusammenpasst, können die Zeichen nicht korrekt übertragen werden.
 - Hinweis: einige Android Geräte unterscheiden zwischen der eingeblendeten Software Tastatur und der Hardwaretastatur bei der Einstellung zum Tastaturlayout. Für die HID Tastensimulation gilt die Sprache des Tastaturlayouts der Hardwaretastatur.
- Liste „HID Tastenverzögerung“: Wert in Millisekunden für die Verzögerung bei der HID Tastensimulation. Es können Werte zwischen 30 und 100 ms eingestellt werden. Standardwert ist 60 ms. Je kleiner der Wert desto schneller die Übertragung, aber auch die Gefahr, das Zeichen verloren gehen. Kleinere Werte, wie 30 – 40 ms bei iOS Geräten, oder 40 – 50 ms bei Android Geräten, sollten Sie nur dann probieren, wenn das Sprachecho in Voiceover, BrailleBack oder VoiceView auf „kein“ oder nur „Wort“ eingestellt ist.

14.9 Bluetooth

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag "Einstellungen > Bluetooth" um den Bluetoothdialog zu öffnen. Dort können Sie Bluetooth ein oder ausschalten, Geräte paaren oder Paarungen löschen. Genauere Beschreibungen zum Paaren von Geräten finden Sie im Kapitel 6.3

Der Bluetoothdialog enthält folgende Elemente

Kontrollfeld "Bluetooth": Schaltet Bluetooth ein oder aus.

Schalter "Geräte suchen": Startet die Suche nach Bluetoothgeräten in Reichweite.

Liste "Geräte": Zeigt die gefundenen und gepaarten Geräte.

- "vertrauenswürdig" bedeutet, dass die Geräte gepaart wurden.
- "In Reichweite" bedeutet, dass die Paarung mit dem Gerät möglich ist.

Schalter "Paaren": Startet die Paarung zu dem in der Liste gewählten Gerät.

- Abhängig vom Paarungsvorgang, werden verschiedene Meldungen angezeigt oder Sie werden aufgefordert eine PIN bei VarioUltra oder dem anderen Gerät einzugeben. .
- Der Standard-PIN für die meisten Paarungen ist 1111.

Schalter "Gerät entfernen": Entfernt die Paarungsinformationen und den zugewiesenen Bluetoothkanal für das in der Liste gewählte Gerät. Der Schalter ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Paarung eingerichtet wurde.

Schalter "Bluetooth-Information": Zeigt den Bluetooth Gerätenamen und die Bluetoothadresse. Der Bluetooth-Gerätename besteht aus einem fixen und einem veränderbaren Teil. Der Gerätetyp ist fix, als veränderbarer Teil wird die Bluetooth MAC Adresse angegeben. Sie können diesen veränderbaren Eintrag mit einem anderen, für den Anwender verständlicheren Namen ersetzen und durch Bestätigen von OK speichern. Der neue Bluetooth-Name des Geräts wird in der Datei BT.xml im Verzeichnis User gespeichert.

Geräte, die einmal gepaart waren aber jetzt nicht mehr verwendet werden sollen, werden weiterhin in der Liste angezeigt. Um ihren Eintrag aus der Liste zu entfernen, gehen Sie in der Liste zu diesem Eintrag, dann nach unten und bestätigen Sie „Gerät entfernen“.

14.10 Das Menü „System“

Über das Menü „Einstellungen > System“ sind ab Softwareversion 1.33 folgende Funktionen möglich:

- Updates ausführen
- Speicher bereinigen
- Werkseinstellungen laden

14.10.1 Speicher bereinigen

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > System > Speicherbereinigung“. Das System prüft die Dateien auf dem internen Speichermedium und ermittelt ob und wieviel Kilobyte Daten eventuell nicht mehr benötigt werden und gelöscht werden könnten. Der Dialog präsentiert nachstehende Optionen, um gezielt nur bestimmte Arten von nicht mehr benötigten Dateien zu löschen. Auf diese Weise können Sie einfach und gezielt Dateien löschen, um wieder mehr freien Speicher zu erhalten.

- Kontrollfeld „Betriebssystem Backups entfernen“. Wählen Sie dieses Kontrollfeld, um die durch Installationen standardmäßig angelegten Sicherungskopien der Betriebssystemdatei nk.bin mit dem Dateinamen nk_yyyy_mm_dd_HH_MM_SS.old zu löschen.
- Kontrollfeld „Software Backups entfernen“. Wählen Sie dieses Kontrollfeld, um die durch Installationen standardmäßig angelegten Sicherungskopien des Ordners „VarioUltra“ mit dem Ordernamen Varioultra_yyyy_mm_dd_HH_MM_SS_old zu löschen.
- Kontrollfeld „Temporäre und Protokolldateien entfernen“ Wählen Sie dieses Kontrollfeld, um alle Dateien aus dem Ordner „Temp“ sowie die Protokolldateien z.B. Errorlog.txt (**neu: und Varioultra\User\UpdateLog.txt **) zu löschen.
- Kontrollfeld „Alle Lesezeichen entfernen“. Diese Option ist verfügbar wenn in Dokumenten der Textverarbeitung Merker und Lesepositionen gespeichert wurden.
- Kontrollfeld „Lesezeichen von <Anzahl> nicht mehr zugreifbaren Dateien entfernen“. Diese Option ist verfügbar wenn in Dokumenten der Textverarbeitung Merker und Lesepositionen gespeichert wurden,

aber die Dateien nicht mehr vorhanden sind, z.B. weil Sie zwischenzeitlich gelöscht wurden.

Sobald mindestens ein Kontrollfeld gewählt ist, erscheint im Dialog der Schalter „Ausführen“. Wenn Sie den Schalter bestätigen werden die Dateien gemäß ihrer Einstellungen ohne weitere Rückmeldung vom internen Speicher gelöscht.

14.10.2 Werkseinstellungen wiederherstellen

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > System > Werkseinstellungen wiederherstellen“. Diese Option ermöglicht es, alle individuellen Nutzereinstellungen zu löschen und den Auslieferungszustand herzustellen.

Kontrollfeld „Benutzereinstellungen zurücksetzen“. Wählen Sie dieses Kontrollfeld, um die individuellen Benutzereinstellungen aus dem Ordner User zu löschen.

Kontrollfeld „Kurzschrift Ausnahmewörterbuch zurücksetzen“. Wählen Sie dieses Kontrollfeld, um individuelle Ausnahmen im Wörterbuch der deutschen Kurzschrift zu löschen.

Kontrollfeld „Lesezeichen entfernen“. Diese Option ist verfügbar wenn in Dokumenten der Textverarbeitung Merker und Lesepositionen gespeichert wurden bzw. generell Dokumente in der Textverarbeitung einmal geöffnet und geschlossen wurden.

Sobald mindestens ein Kontrollfeld gewählt ist, erscheint im Dialog der Schalter „Ausführen und Anwendung neu starten“. Wenn Sie den Schalter bestätigen, werden die Dateien gemäß der gewählten Einstellungen gelöscht und die Software neu gestartet.

14.10.3 Software Update durchführen

Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag „Einstellungen > System > Software Update“. Mit dieser Funktion ist es möglich ein Software Update oder die Installation einer neuen Softwareversion durchzuführen. Es stehen weitere Optionen zur Verfügung. Sie können wählen, ob die individuellen Benutzereinstellungen, Bluetooth-Paarungen etc. beibehalten

werden oder die Software komplett neu mit allen Werkseinstellungen installiert wird.

Liste „Update-Dateien“. Wenn mindestens eine gültige Updatedatei verfügbar ist, wird hier der Dateiname der zip Datei angegeben. Da alle gültigen Updatedateien mit dem Namensteil „Vario_Update“ beginnen und mit „zip“ enden werden diese Namensteile nicht angezeigt. Wählen Sie durch Bewegungen nach rechts oder links die gewünschte Update-Datei. Wenn sich die zip Datei im Ordner Flashdisk befindet, ist dem Eintrag die Abkürzung „fd“ vorangestellt. Wenn sich die zip Datei auf einem angesteckten USB Stick befindet ist die Abkürzung „st“ vorangestellt.

Schalter „Details“. Öffnet einen Dialog mit nachstehenden Optionen. Infofeld „Beschreibung“. In diesem mehrzeiligen Textfeld werden Angaben zu Versionsnummern und Informationen zu Neuerungen oder Änderungen gegeben. Sie können den Inhalt durch Scrollen mit D5 und D2 lesen und sich zeilenweise mit dem Navystick oder D3 und D1 durch das Textfeld bewegen. Um aus dem Textfeld heraus zu kommen und die anderen Dialogelemente zu erreichen nutzen Sie bitte D4D6 oder D1D3. Infofeld „Status“. Hier erhalten Sie wichtige Meldungen.

Kontrollfeld „Benutzereinstellungen übernehmen“. Wählen Sie dieses Kontrollfeld wenn ihre persönlichen Benutzereinstellungen, Bluetooth-paarung usw. durch nicht gelöscht werden sollen. Bei nicht gewählten Kontrollfeld wird die Software mit den Werkseinstellungen installiert.

Kontrollfeld „Update-Datei nach erfolgreichem Update löschen“. Hier können Sie festlegen, ob die zip Datei auf dem Speichermedium Flashdisk oder USB Stick verbleiben soll oder nicht. Hilfreich, wenn sie beispielsweise mit dem Stick mehrere Geräte updaten möchten.

Schalter „Update vorbereiten“. Das zip Archiv wird intern entpackt und geprüft. Anschließend erhalten sie eine Statusinformation. Wenn die Installation durchgeführt werden kann, erscheint ein entsprechender Schalter.

Schalter „Installieren“. Startet den Installationsprozess. Je nach Größe des Updatepakets und der zu installierenden Komponenten dauert der Vorgang einige Zeit und sie erhalten verschiedene Fortschrittsinformationen. Bei einem Fehler wird die Installation abgebrochen. Abschließend startet die Software automatisch neu. Bitte prüfen Sie im Hauptmenü > Hilfe > Über VarioUltra die Versionsinformation.

 **Hinweis:**

Die alte Vorgehensweise die Software mit Hilfe der Tastenkombination D3D6B7B8 durchzuführen ist weiterhin möglich. Allerdings muss hierbei die zip Datei in den Ordner Flashdisk kopiert werden und die Benutzereinstellungen werden gelöscht.

14.11 Einstellungen verlassen

Um Einstellungen zu verlassen und wieder in das Hauptmenü zu gelangen drücken Sie etwas länger auf die Systemtaste S 3.

15 Hilfe

Es gibt verschiedene Arten von Hilfen.

Versionsinformation

Um allgemeine Informationen zum Gerät zu erhalten drücken Sie den Kurzbefehl $v+B7B8B9B0$. oder öffnen Sie das Hauptmenü durch längeren Druck auf die Systemtaste S3 und wählen Sie den Eintrag „Hilfe > Über VarioUltra“. Ein Dialog öffnet sich mit Einträgen zur Systemversion. Lesen Sie die Einträge durch Scrollen mit D5 und D2. Schließen Sie den Dialog mit OK.

Kontexthilfe

Mit dem Kurzbefehl $B9+B2B6$ öffnen Sie bei jeder Anwendung, jedem Menüeintrag oder Dialogelement eine Kontexthilfe, mit Informationen oder Beschreibungen passend zum jeweiligen Eintrag. Lesen Sie die Meldung durch Scrollen mit D5 oder D2 und schließen Sie die Meldung mit OK.

Handbuch

Öffnen Sie das Hauptmenü durch längeren Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Hilfe > Handbuch > Anleitung VarioUltra“. Dies öffnet die Handbuchdatei in der Textverarbeitung und sie verlassen das Hilfemenü.

Den Menüeintrag „Handbuch“ erreichen Sie auch mit dem Kurzbefehl $h+B7B8B9$. Im Menü „Hilfe“ erreichen Sie auch andere nützliche Informationen.

15.1 Hilfe verlassen

Um die Hilfe zu verlassen und wieder in das Hauptmenü zu gelangen drücken Sie etwas länger auf die Systemtaste S3.

16 Das Befehle­menü

In jeder Anwendung gibt es ein Befehle­menü. Um es zu öffnen drücken Sie kurz auf die Systemtaste S3. Wenn kein Befehl ausgewählt wird, lässt es sich jederzeit durch einen kurzen Druck auf die Systemtaste S3 wieder schließen.

Das Befehle­menü enthält Einträge, in denen Funktionen für die jeweilige Anwendung erreicht werden. Je nach Anwendung sind dies unterschiedliche Funktionen, jedoch gibt es einen allgemeinen Aufbau, so dass ähnliche Befehle oder Funktionen unter ähnlichen Menüeinträgen zu finden sind.

Die folgenden Kapitel erklären die Untermenüeinträge in den Befehle­menüs von Dateiverwaltung und Textverarbeitung.

16.1 Befehle­menü > Eintrag „Datei“

In den folgenden Kapiteln finden Sie Schritt für Schritt Beschreibungen zu den Einträgen im Menü „Datei“ in der Anwendung Dateiverwaltung und Textverarbeitung:

- Neuen Unterordner erzeugen
- Datei oder Ordner öffnen
- Datei oder Ordner löschen
- Datei oder Ordner umbenennen
- Informationen zu Datei oder Ordner (Eigenschaften)

16.1.1 Neuen Ordner erzeugen

Das Anlegen eines neuen Ordners in der Dateiverwaltung ist sehr einfach. Als Beispiel wird das Anlegen eines Unterordners im Ordner „Edit“ Schritt für Schritt beschrieben.

1. Öffnen Sie die Dateiverwaltung und gehen Sie in der Datei- und Ordnerliste zur höchsten Ebene zum Ordner „Flashdisk“. Bewegen sie den Navistick einmal nach rechts, um in den Ordner hinein zu gehen.
2. Innerhalb des Ordners „Flashdisk“ befindet sich der Ordner „Edit“. Entweder befinden Sie sich bereits auf diesem Ordnersnamen, oder Sie gehen mit dem Navistick nach oben oder unten zum Ordner

„Edit“. Bewegen sie den Navistick einmal nach rechts, um in den Ordner hinein zu gehen.

3. Wenn der Ordner leer ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Oder Sie befinden sich auf der ersten Datei oder einem Unterordner von „Edit“.
4. An dieser Stelle öffnen Sie das Befehlemenü mit kurzen Druck auf S3 und wählen den Eintrag „Datei > Neuer Ordner“.
5. Ein Dialog öffnet sich. Sie befinden sich in einem Eingabefeld, in welches Sie den Namen des neuen Ordners eingeben können. Der hier vorgeschlagene Name „Neuer Ordner“ kann überschrieben werden oder sie übernehmen diesen Ordernamen.
6. Bestätigen Sie „OK“. Dadurch wird der Dialog geschlossen und der neue Ordner ist erzeugt. Sie finden seinen Namen in der Datei- und Ordnerliste.

Alternativ können Sie den Dialog zum Erzeugen eines neuen Ordners auch mit dem Kurzbefehl n+B8B9 öffnen. Der Dialog zeigt auch den zuletzt verwendeten Speicherort und sie können hier den Pfad ändern.

16.1.2 Datei oder Ordner öffnen

Mit dem Öffnenbefehl werden Ordner oder Dateien geöffnet. Wenn ein Ordner geöffnet wird, stehen die enthaltenen Unterordner und Dateien untereinander in einer Liste.

Hinweis:

Bei Ordernamen ist zur Kennzeichnung ein „o“ vorangestellt. Wenn eine Datei geöffnet wird, gelangen Sie dadurch in die entsprechende Anwendung:

DOC, DOCX, PPT, PPTX, PPS, TXT .BRF und .RTF Dateien öffnen die Textverarbeitung

XLS und XLSX Dateien öffnen den Excel Betrachter

PDF Dateien öffnen den PDF Dokumentbetrachter

Schritt für Schritt Beschreibung zum Öffnen von Dateien oder Ordnern:

1. Innerhalb der Datei- und Ordnerliste gehen Sie mit Bewegungen des Navisticks nach oben oder unten zu dem Ordner oder der Datei, die Sie öffnen möchten.

2. Wenn Sie sich auf dem Namen des gewünschten Ordners oder der gewünschten Datei befinden, öffnen Sie das Befehlemenü mit kurzem Druck auf S3 und wählen den Eintrag „Datei > Öffnen“.
3. Wenn dadurch ein Ordner geöffnet wird, werden die im Ordner vorhandenen Dateien und Unterordner in einer Liste untereinander angezeigt.
4. Wenn dadurch eine Datei geöffnet wird, befinden Sie sich in der entsprechenden Anwendung und verlassen die Dateiverwaltung.

Alternativ können Sie auch den Kurzbefehl o+B8B9 verwenden.

Hinweis:

Beim Öffnen von Dateien über das Menü „Datei > Öffnen“ in der Textverarbeitung werden standardmäßig nur Textdateien im Dateiformat doc, docx, rtf und txt erreicht, sowie Microsoft PowerPoint-Dateien.

1. Um die Anzeige auf alle Dateien umzustellen, folgen Sie den oben genannten Schritten bis Sie in der Datei- und Ordnerliste sind.
2. Drücken Sie dann D4D6, um die weiteren Dialogelemente zu erreichen und gehen Sie bis zur Liste „Dateityp“.
3. Gehen Sie in der Liste nach rechts oder links bis zum Eintrag „alle *.*“.
4. Wenn Sie nun nach oben gehen werden auch andere Dateitypen in der Liste angezeigt.
5. Diese Einstellung bleibt erhalten.

16.1.3 Datei oder Ordner Löschen

Mit dem Löschenbefehl können Sie Dateien oder Ordner im Speicher löschen. Beim Löschen eines Ordners werden auch alle Dateien und Unterordner gelöscht, die dort gespeichert sind. Das Löschen von großen Dateien oder Ordnern mit vielen Dateien dauert einige Zeit. Während des Vorgangs erscheint ein blinkendes Muster auf dem ersten Braillemodul. Schalten Sie das Gerät nicht aus, solange das blinkende Muster noch einen laufenden Vorgang anzeigt.

Hinweis:

Es gibt keinen Papierkorb. Gelöschte Dateien oder Ordner sind endgültig entfernt. Wenn jedoch die Datei, die Sie in der Dateiverwaltung gelöscht

haben, noch in der Textverarbeitung geöffnet ist, befindet sie sich im Arbeitsspeicher und wird weiterhin angezeigt und Sie könnten sie erneut speichern. Sie müssen die Datei schließen, damit sie auch aus dem Arbeitsspeicher entfernt wird.

Schritt für Schritt Beschreibung zum Löschen von Dateien oder Ordnern:

1. Innerhalb der Datei- und Ordnerliste gehen Sie mit Bewegungen nach oben oder unten, rechts oder links zu der Datei oder dem Ordner, den Sie löschen möchten.
2. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen den Eintrag „Datei > Löschen“.
3. Ein Dialog mit einer Sicherheitsrückfrage mit der Anzahl an Dateien im Ordner und/oder der Größe öffnet sich. Durch wählen von “Ja” wird das Löschen ausgeführt.
4. Es ist auch möglich gleichzeitig mehrere Dateien oder Ordner zu löschen, wenn diese zuvor markiert wurden.

Alternativ können Sie zum Löschen den Kurzbefehl B9+B7 nutzen.

Hinweis:

Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass nicht alles gelöscht werden konnte könnte die Ursache darin liegen, dass Sie ein Schreibschutzattribut hat. Prüfen Sie dann die Dateieigenschaften

16.1.4 Datei oder Ordner umbenennen

Den Namen einer Datei oder eines Ordners zu ändern ist einfach. Gehen Sie wie folgt vor

1. Innerhalb der Datei- und Ordnerliste gehen Sie mit dem Navistick zu der Datei oder dem Ordner, dem Sie einen anderen Namen geben möchten.
2. Öffnen Sie das Befehle Menü (S3) und wählen Sie den Eintrag „Datei > Umbenennen“.
3. Ein Dialog öffnet sich. Sie befinden sich im Eingabefeld, in welchem der Datei- oder Ordnername angezeigt wird.
4. Schreiben Sie den neuen Namen. Bei Dateien müssen Sie darauf achten, die angezeigte Dateiendung nicht zu überschreiben oder zu verändern. Bestätigen Sie abschließend OK.

16.1.5 Neues leeres Dokument erzeugen

Diese Funktion befindet sich in der Textverarbeitung.

Ein leeres Dokument wird entweder als normale Textdatei im Dateiformat RTF oder TXT erzeugt, oder als Datei im Braille Ready Format (BRF). Die Standardeinstellung ist RTF.

Bevor Sie ein neues Dokument erzeugen, müssen Sie entscheiden, in welchem Dateiformat das Dokument erzeugt werden soll: Standardtextdatei oder BRF Datei. Die Textverarbeitung merkt sich die zuletzt verwendete Einstellung als Voreinstellung beim Erzeugen weiterer Dokumente. Wenn Sie einmal das von Ihnen bevorzugte Dateiformat eingestellt haben, können Sie künftig die nachfolgenden Schritte überspringen.

Zum Erzeugen eines leeren Dokuments gehen Sie wie folgt vor:

1. In der Textverarbeitung öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3.
2. Wählen Sie den Eintrag „Datei > Neu“.
3. Ein Dialog öffnet sich. Sie befinden sich in einem Eingabefeld, um den Dokumentnamen einzugeben.
4. Gehen Sie mit dem Navistick nach unten bis zur Liste „Dateityp“ und wählen Sie durch Bewegungen nach rechts oder links entweder BRF um ein Brailledokument zu erzeugen, oder RTF, um ein normales Textdokument zu erzeugen.
5. Bestätigen Sie OK.

Alternativ können Sie den Kurzbefehl n+B8B9 nutzen, um ein leeres Dokument zu erzeugen.

Die Datei wird in dem ausgewählten Dateiformat im aktuellen Speicherort gespeichert und sie befinden sich im erzeugten leeren Dokument. Zum Speichern von Eingaben in diese Datei nutzen Sie den Kurzbefehl s+B8B9.

16.1.6 Dokumente in der Textverarbeitung öffnen

In der Textverarbeitung lassen sich Dateien der folgenden Formate öffnen: doc, docx, PowerPoint ppt, pptx, pps, ppsx, rtf, txt und brf. Bei Dateien im txt-Format werden sowohl ANSI, Unicode als auch UTF8 korrekt geöffnet. Dateien im doc und docx Format werden im Lesemodus geöffnet und werden beim Bearbeiten im RTF Format gespeichert, um das Originalformat nicht zu zerstören. Microsoft PowerPoint Dateien werden im Lesemodus geöffnet und zeigen den auf den Folien enthaltenen Text.

Hinweis:

Beim Öffnen eines Dokuments benötigt die Textverarbeitung im Arbeitsspeicher etwa das Dreifache der Dateigröße. Das Öffnen von Dateien mit 10 MB oder mehr kann fehlschlagen. Wenn Sie mehrere Dateien öffnen wollen, sollte die größte Datei zuerst geöffnet werden.

Wenn das Laden eines größeren Dokuments einige Zeit benötigt, wird auf dem ersten Braillemodul ein blinkendes Muster angezeigt, um darüber zu informieren, dass das Gerät beschäftigt ist. Versuchen Sie nicht den Vorgang zu unterbrechen oder das Gerät auszuschalten.

16.1.7 Dokumente im Lesemodus oder Bearbeitungsmodus öffnen

In der Textverarbeitung können Dokumente im Lesemodus oder im Bearbeitungsmodus geöffnet sein. Wie der Name bereits sagt, wenn das Dokument nur gelesen aber nicht verändert oder vor unbeabsichtigten Eingaben geschützt werden soll, nutzen Sie den Lesemodus. Wenn das Dokument bearbeitet werden soll, nutzen Sie den Bearbeitungsmodus.

Zum Öffnen im Bearbeitungsmodus gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie durch kurzen Druck auf S3 das Befehle Menü.
2. Wählen Sie den Eintrag Datei > Öffnen.
 - Alternativ können Sie den Kurzbefehl o+B8B9 nutzen.
3. Eine Datei- und Ordnerliste wird angezeigt. Standardmäßig befinden Sie sich auf der ersten Datei im Ordner „Edit“ von „Flashdisk.“
 - Der Befehl B9+B4B5B6B8 bringt Sie direkt zum Ende, der Befehl B9+B1B2B3B7 zum Anfang der Liste.
 - Sie können den Anfangsbuchstaben eines Datei- oder Ordnernamens eingeben, um zu der Datei oder dem Ordner zu springen.

4. Wenn Sie die gewünschte Datei erreicht haben, drücken Sie B9 zum Öffnen.
5. Erinnerung: Wenn eine RTF Datei geöffnet wird, befindet sich der Cursor an der zuletzt gespeicherten Position.

Zum Öffnen im Lesemodus gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie durch kurzen Druck auf S3 das Befehlemenü.
2. Wählen Sie den Eintrag „Datei > öffnen“.
 - Alternativ können Sie den Kurzbefehl o+B8B9 nutzen.
3. Eine Datei- und Ordnerliste wird angezeigt. Standardmäßig befinden Sie sich auf der ersten Datei im Ordner „Edit“ von „Flashdisk“.
 - Der Befehl B9+B4B5B6B8 bringt sie direkt zum Ende, der Befehl B9+B1B2B3B7 zum Anfang der Liste.
 - Sie können den Anfangsbuchstaben eines Datei- oder Ordnernamens eingeben, um zu der Datei oder dem Ordner zu springen.
4. Wenn Sie die gewünschte Datei erreicht haben, drücken Sie gemeinsam die Displaytasten D4 und D6 um den Schalter „Schreibgeschützt öffnen“ zu erreichen und bestätigen Sie diesen.
5. Das Dokument wird geöffnet, aber eine Zeicheneingabe ist nicht möglich. Erinnerung: Wenn es sich um eine RTF Datei handelt, befindet sich der Cursor an der zuletzt gespeicherten Position.

Im geöffneten Dokument können Sie jederzeit zwischen Lesemodus und Bearbeitungsmodus mit dem Kurzbefehl z+B8B9 wechseln.

 **Hinweise:**

Schreibgeschützte Dokumente im Lesemodus können Sie von Dokumenten im Bearbeitungsmodus anhand der Cursorform unterscheiden. Im Lesemodus ist der Cursor ein blinkender Punkt 8. Im Bearbeitungsmodus wird der Cursor durch Punkte 7 und 8 dargestellt.

Diese Zuordnung und Cursordarstellung lässt sich individuell im Hauptmenü > Einstellungen > Braille > Cursor verändern. Wir empfehlen jedoch zwei verschiedene Cursordarstellungen einzustellen, um zu erkennen, ob ein Dokument im Lesemodus oder im Bearbeitungsmodus geöffnet ist.

Innerhalb der im Dialog angezeigten Datei- und Ordnerliste bewegen Sie sich mit dem Navistick oben / unten. Eine Bewegung nach links schließt

den aktuellen Ordner und geht eine Ordnerstufe höher. Eine Bewegung nach rechts öffnet den angezeigten Ordner und zeigt die darin enthaltenen Dateien.

Ordner sind durch ein Plus (+) vor dem Ordnernamen gekennzeichnet.

16.1.8 Zwischen geöffneten Dokumenten wechseln

Es gibt verschiedene Wege um zwischen geöffneten Dokumenten zu wechseln. Wenn Sie das Befehlsmenü bevorzugen: Drücken Sie S3 und wählen den Eintrag „Datei > Vorige Datei“. Wenn Sie Kurzbefehle bevorzugen: Drücken Sie B3B6+B8B9.

16.1.9 Liste geöffneter Dateien

Um von mehreren geöffneten Dokumenten eines gezielt in den Vordergrund zu holen, öffnen sie mit S3 das Befehlsmenü und wählen „Datei > Liste geöffneter Dateien“.

Ein Dialog mit einer Liste, in der die Namen der geöffneten Dateien nebeneinander stehen öffnet sich. Gehen Sie mit Bewegungen nach links / rechts zur gewünschten Datei und drücken B9 oder bestätigen Sie OK. Alternativ öffnen Sie diese Liste mit dem Kurzbefehl. I+B8B9.

16.1.10 Dokumente schließen

In der Textverarbeitung können viele Dokumente gleichzeitig geöffnet sein. Solange ein Dokument nicht geschlossen wird, bleibt es geöffnet.

Bei RTF Dokumenten können Sie eine Lesezeichenfunktion nutzen. Stellen Sie den Cursor auf die gewünschte Position und speichern Sie das Dokument. (Kurzbefehl s+B8B9 oder Befehlsmenü „Datei > Speichern“) bevor Sie das Dokument schließen. Diese Cursorposition kann auch bei Dokumenten, die im Lesemodus geöffnet sind, gespeichert werden.

Zum Schließen eines Dokuments gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie durch kurzen Druck auf S3 das Befehlsmenü.
2. Wählen Sie „Datei > Schließen“.
3. Wenn das Dokument bearbeitet wurde, aber die Änderung noch nicht gespeichert wurde, erhalten sie eine Meldung mit entsprechendem Hinweis.

4. Wählen Sie "Ja" um die Änderungen zu speichern, bevor die Datei geschlossen wird.
5. Sofern noch ein anderes Dokument geöffnet ist, befinden Sie sich in diesem Dokument. Wenn kein anderes Dokument geöffnet ist, befinden Sie sich in einem leeren Dokument.

Alternativ können Sie zum Schließen den Kurzbefehl `w+B8B9` nutzen.

Hinweis:

Geöffnete Dokumente belegen den Arbeitsspeicher. Nicht mehr benötigte Dokumente sollten geschlossen werden.

16.1.11 Dokumente Speichern

Geöffnete Dokumente werden nicht automatisch gespeichert. Dokumente der Textverarbeitung werden standardmäßig im internen Speicher „Flashdisk“ im Ordner „Edit“ gespeichert. Als Speicherort können auch andere Ordner im Speichern-unter Dialog gewählt werden. Der zuletzt verwendete Speicherort wird beim nächsten Speichern oder Öffnen von Dateien vorgeschlagen.

Neben dem Standardformat "RTF" können die Dokumente auch im Nur-Text-Format gespeichert werden. (ANSI oder UNICODE).

Achtung:

In welchem Format gespeichert wird, ist abhängig vom Dateiformat, das beim Erzeugen der Datei gewählt wurde. Ein RTF Dokument wird im RTF Format gespeichert, ein BRF Dokument wird im BRF Format gespeichert. Die Konvertierung von RTF zu BRF oder anders herum ist über die Speichernfunktion nicht möglich.

Hinweis:

Ein ungespeichertes Dokument wird in einen speziellen Speicherort (Flashdisk/Temp/Edit) abgelegt, wenn VarioUltra in den Standby geschaltet wird. Die Datei erhält einen automatischen Dateinamen aus Datum und Uhrzeit. Dies soll vor Datenverlust schützen, wenn der Akku im Standby leer werden sollte. Normalerweise befindet sich die Datei nach dem Aufwecken weiterhin in der Textverarbeitung, wo Sie sie umgehend auf normale Weise speichern sollten.

Den Ordner Temp und die darin gesicherten Dateien erreichen Sie nur, wenn Sie in der Dateiverwaltung im Befehle Menü den Eintrag „Ansicht > Filter“ wählen und dort auch das Kontrollfeld „Zeige interne Dateien“ wählen. Dieses Kontrollfeld sollte nicht dauerhaft gewählt sein.

16.1.12 Speichern

Die erste, leere Datei in der Textverarbeitung erhält beim Einschalten des Geräts oder nach einem Neustart automatisch den Dateinamen „Dokument“ und befindet sich im Ordner „Edit“ im internen Speicher „Flashdisk“. Standardmäßig hat sie das Dateiformat RTF, jedoch kann auch ein anderes Dateiformat z.B. BRF gewählt werden. Das zuletzt verwendete Dateiformat wird beim Erzeugen eines neuen Dokuments verwendet. Dateien, die im RTF oder TXT Format erzeugt wurden, lassen sich jeweils in dem anderen Dateiformat speichern. Für BRF Dateien ist dies nicht möglich.

Gehen Sie zum Speichern wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3.
2. Wählen Sie den Eintrag „Datei > speichern“.
3. Ein Hinweis, der nach wenigen Sekunden automatisch verschwindet, erscheint als Rückmeldung.
4. Denken Sie daran, dass das Speichern großer Dateien einige Zeit dauern kann. Solange der Speichervorgang läuft wird auf dem ersten Braillemodul ein blinkendes Muster angezeigt.

Alternativ können Sie zum Speichern den Kurzbefehl s+B8B9 nutzen.

Hinweis:

Beim Speichern von RTF Dokumenten wird die Cursorposition mitgespeichert, so dass beim Öffnen diese Textstelle angezeigt wird.

Wenn das Dokument unter einem anderen Namen oder in einen anderen Speicherort gespeichert werden soll, nutzen Sie die Funktion Speichern unter, siehe im nächsten Kapitel.

16.1.13 Speichern unter

Mit der „Speichern unter“ Funktion können Sie ein Dokument unter einem anderen Namen, an einem anderen Speicherort oder in einem anderen Dateiformat speichern.

Erinnerung: Die Konvertierung einer BRF Datei zu einer RTF Datei oder anders herum ist nicht möglich.

Zum Speichern unter gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3
2. Wählen Sie den Menüeintrag „Datei > Speichern unter“.
3. Der „Speichern unter“ Dialog öffnet sich. Sie befinden sich im Eingabefeld und der Dateiname wird angezeigt. Diesen Namen können Sie überschreiben oder verändern.
4. Gehen Sie mit dem Navistick nach unten. Im Infobereich „Pfad“ wird der aktuelle Speicherort angezeigt.
 - Wenn der Pfad nicht verändert werden soll, überspringen Sie den Schalter „Durchsuchen“ und machen bei Schritt 6 weiter.
5. Wenn Sie den Speicherort verändern möchten, wählen Sie den Schalter „Durchsuchen“ und ein Dialog mit einer Datei- und Ordnerliste öffnet sich. Gehen Sie hier durch Bewegungen des Navisticks in den gewünschten Ordner und bestätigen mit B9.
6. In der Liste „Dateityp“ wählen Sie durch Bewegungen nach rechts / links das gewünschte Dateiformat. (RTF, etc.).
7. Bestätigen Sie abschließend OK.

Alternativ können Sie den Kurzbefehl u+B8B9 nutzen um den „Speichern unter“ Dialog zu öffnen.

Hinweis:

Wenn Sie nichts verändern und den Speichervorgang abbrechen möchten, drücken Sie den Befehl B9+B7B8 oder drücken Sie die Displaytaste D4.

Wenn Sie die Meldung erhalten, dass die Datei nicht gespeichert werden konnte, enthält der Dateiname entweder ungültige Zeichen oder Sie haben einen ungültigen Speicherort gewählt.

16.1.14 Eigenschaften

In der Dateiverwaltung können Sie Informationen wie z.B. die Größe einer Datei oder eines Ordners abfragen.

Zum Öffnen der Datei- oder Ordneigenschaften Gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der Datei- und Ordnerliste zu der Datei oder zu dem Ordner, von dem Sie die Größe oder andere Eigenschaften erfahren möchten.
2. Öffnen Sie das Befehlsmenü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Datei > Eigenschaften“. Ein Dialog öffnet sich.
3. Bei Dateien werden folgende Informationen angegeben:
 - a. Name der gewählten Datei.
 - b. Pfad (Speicherort).
 - c. Dateigröße in Bytes.
 - d. Datum: Tag und Uhrzeit, wann die Datei erzeugt oder gespeichert wurde
 - e. Kontrollfelder mit Dateiattributen. Mit B0 können die Attribute verändert werden.
4. Bei Ordnern werden folgende Informationen angegeben:
 - a. Name des gewählten Ordners
 - b. Pfad (Speicherort).
 - c. Datum: Tag und Zeit, wann die Datei erzeugt oder gespeichert wurde
 - d. Schalter Größe öffnet einen Dialog mit Angaben zur Größe in Byte, Anzahl Unterordner und Dateien.
 - e. Bei Wurzelverzeichnissen “Flashdisk oder Stick” wird auch der freie Speicherplatz angegeben.

Alternativ können Sie den Eigenschaftendialog mit dem Kurzbefehl i+B8B9 öffnen.

16.2 Befehle Menü > Eintrag "Bearbeiten"

Die folgenden Unterkapitel geben Beschreibungen zu den Funktionen im Menü „Bearbeiten“ in der Dateiverwaltung:

- Ausschneiden, Kopieren, und Einfügen von Dateien und Ordnern
- Markieren
- Suchenfunktion
- Zip Datei packen / entpacken
- mit Ankerpositionen arbeiten

16.2.1 Ausschneiden

Der Befehl ist ähnlich wie beim Ausschneiden in der Textverarbeitung. Eine oder mehrere ausgewählte Dateien oder Ordner können von ihrem Ursprungsort zu einer anderen Speicherposition verschoben werden. Im Gegensatz zum Löschenbefehl (B9B7), bleiben die Objekte Solange an ihrem Ursprungsort, bis sie an der neuen Position eingefügt wurden.

Um einen Ordner oder eine Datei auszuschneiden gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der Datei- und Ordnerliste zu der gewünschten Datei bzw. Ordner. Weiter unten wird das Markieren beschrieben, mit dem Sie auch mehrere Dateien und/oder Ordner wählen können.
2. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Bearbeiten > Ausschneiden“.
3. Das Ausschneiden wird vorbereitet und Sie erhalten eine entsprechende Hinweismeldung.
4. Gehen Sie in der Datei- und Ordnerliste zu dem Speicherort, wo die Dateien oder Ordner eingefügt werden sollen.

Mit dem Kurzbefehl x+B8B9 können Sie das Ausschneiden direkt durchführen.

16.2.2 Kopieren

Der Befehl ist ähnlich wie beim Kopieren in der Textverarbeitung. Eine oder mehrere ausgewählte Dateien oder Ordner können von ihrem Ursprungsort zu einer anderen Speicherposition kopiert werden.

Gehen Sie zum Kopieren wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der Datei- und Ordnerliste zu der gewünschten Datei bzw. Ordner. Weiter unten wird das Markieren beschrieben, mit dem Sie auch mehrere Dateien und/oder Ordner wählen können.
2. Öffnen Sie das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen Sie den Eintrag „Bearbeiten > Kopieren“.
3. Das Ausschneiden wird vorbereitet und Sie erhalten eine entsprechende Hinweismeldung.
4. Gehen Sie in der Datei- und Ordnerliste zu dem Speicherort, wo die Dateien oder Ordner eingefügt werden sollen.
5. Wenn die Datei in ihren Ursprungsort eingefügt wird, erhält sie im Dateinamen den Zusatz “Kopie von”.

Mit dem Kurzbefehl c+B8B9 können Sie das Ausschneiden direkt durchführen.

16.2.3 Einfügen

Der Befehl ist ähnlich wie beim Einfügen in der Textverarbeitung. Eine oder mehrere ausgewählte Dateien oder Ordner können aus der Zwischenablage an einen anderen Speicherort eingefügt werden. Dieser Befehl setzt voraus, dass diese Dateien oder Ordner zuvor kopiert oder ausgeschnitten wurden.

Hinweis:

Das Einfügen großer Dateien oder Ordner kann einige Zeit dauern. Während dieser Zeit wird auf dem ersten Brailleelemente in blinkendes Muster angezeigt, um zu zeigen, dass das Gerät beschäftigt ist und nicht ausgeschaltet werden darf.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der Datei- und Ordnerliste zu dem Speicherort, wo die Dateien oder Ordner eingefügt werden sollen.
2. Öffnen Sie das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen den Menüeintrag „Bearbeiten > Einfügen“.
3. Die Dateien und/oder Ordner werden eingefügt.

Mit dem Kurzbefehl v+B8B9 wird der Inhalt der Zwischenablage direkt eingefügt.

16.2.4 Markierungen

Mit Markierungen können mehrere Dateien oder Ordner als „gewählt“ gekennzeichnet werden. die Gruppe der markierten Elemente verhält sich wie eine einzelne gewählte Datei und lässt sich als Gesamtheit löschen, ausschneiden, kopieren oder einfügen. Markierte Objekte werden beim Bewegen durch die Datei- und Ordnerliste durch den zusätzlichen Braillepunkt 8 gekennzeichnet.

Es gibt mehrere Möglichkeiten Dateien und Ordner zu markieren

1. Bewegen Sie sich nach oben oder unten durch die Dateiliste und markieren sie die gewünschten Dateien oder Ordner jeweils durch Drücken von B0. Ein zweiter Druck auf B0 hebt die Markierung wieder auf.
2. Um alle Dateien einer Ebene zu markieren, z.B. den gesamten Inhalt eines Ordners, gehen Sie in diesen Ordner und drücken den Kurzbefehl B9+B1B2B3B4B5B6B8,„(%+B8B9)
 - a. Oder öffnen Sie das Befehlemenü durch kurzen Druck auf S3 und wählen den Eintrag Bearbeiten > Alles Markieren.
3. Wenn Sie z.B. 17 Dateien von insgesamt 23 Dateien markieren möchten, ist es nicht nötig die 17 Objekte einzeln zu wählen. Nutzen Sie hier den Befehl „Markierung umkehren und gehen wie folgt vor:
 - a. Gehen Sie in der Dateiliste nur zu den Dateien, die später nicht markiert werden sollen und markieren Sie diese durch Drücken von B0
 - b. Anschließend drücken Sie den Kurzbefehl h+B8B9. Die zuvor markierten Dateien sind nun nicht mehr markiert und die zuvor nicht markierten Dateien sind markiert.
 - c. Oder sie öffnen durch Kurzen Druck auf S3 das Befehlemenü und wählen den Eintrag Bearbeiten > Markierung umkehren.

16.2.5 Suchen

Mit der Funktion „Suchen“ können Sie innerhalb der Dateiverwaltung

nach Dateien oder Ordnern suchen. Wenn Sie den Namen oder den Dateityp nicht vollständig wissen, können Sie Platzhalter verwenden. Der Platzhalter „Stern“ (*) kann für mehrere unbekannte Zeichen im Dateinamen verwendet werden, der Platzhalter „Fragezeichen“ (?) kann verwendet werden, wenn nur ein Zeichen im Dateinamen unbekannt ist. Bei erfolgreicher Suche werden die gefundenen Dateien oder Ordner in einer Liste präsentiert. Anschließend können Sie zu der gewünschten gefundenen Datei wechseln.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie durch kurzen Druck auf S3 das Befehle­menü und wählen Sie den Eintrag „Bearbeiten > Suchen“.
2. Ein Dialog öffnet sich, in welchem Sie den Pfad, der für die Suche berücksichtigt werden soll, sowie den Datei- oder Ordner­namen, nach welchem gesucht werden soll, eingeben müssen.
3. Das Eingabefeld „Suchen in“ zeigt den Pfad, in welchem gesucht wird, z.B. \Flashdisk\Edit. Sie können den angegebenen Pfad editieren, wobei auf richtige Schreibweise der Ordner und Unterordner zu achten ist. Ordner und Unterordner müssen durch einen umgekehrten Schrägstrich (Backslash) voneinander getrennt sein. Anstatt den Pfad hier zu editieren können Sie mit dem Schalter „Durchsuchen“ auch einen weiteren Dialog öffnen, um den gewünschten Pfad auszuwählen.
4. Im Durchsuchen-Dialog wird die Ordnerliste präsentiert. Durch Bewegungen nach oben, unten bzw. rechts/links können Sie den gewünschten Ordner und Unterordner auswählen. Die Suche beschränkt sich dann auf den hier eingestellten Dateipfad.
 - a. Wenn Sie nur einen speziellen Unterordner von Edit durchsuchen möchten, gehen Sie in Flashdisk\Edit zu dem gewünschten Unterordner und gehen mit einer Bewegung nach rechts in diesen Unterordner hinein.
 - b. Bestätigen Sie OK um den Durchsuchendialog zu schließen.
5. Der ausgewählte Pfad wird nun im Eingabefeld „suchen in“ des ersten Dialogs angezeigt.

6. Schreiben Sie in das Eingabefeld „gesuchter Name“ den Datei- oder Ordernamen, nach welchem gesucht werden soll. Falls Sie den Namen nicht genau wissen, können Sie einen Namensteil eingeben und den unbekanntem Teil durch die Platzhalter „*“ und / oder „?“ ersetzen.
7. Standardmäßig ist als Suchbegriff *.* eingetragen, so dass alle Dateien mit allen Dateierweiterungen gefunden werden. Wenn Sie nur Dateien mit einer speziellen Dateierweiterung finden möchten, z.B. TXT, ändern Sie den Eintrag in *.txt.
8. Die Auswahlliste „Suchergebnis“ präsentiert die gefundenen Datei- und Ordernamen sowie deren Pfad. Durch Bewegungen nach rechts / links lässt sich der gewünschte Eintrag auswählen. In der Liste werden zuerst die gefundenen Unterordner und anschließend die gefundenen Dateien angegeben.
9. Wenn keine Datei oder kein Ordner gefunden wird, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.
10. Wenn Sie zu keinem der gefundenen Einträge wechseln möchten, beenden Sie den Suchdialog mit OK.
11. Wenn Sie in der Liste mit den Suchergebnissen die gewünschte Datei oder den gewünschten Ordner gefunden haben, und zu dieser Datei oder dem Ordner wechseln möchten, gehen Sie nach unten und wählen den Schalter „Zum selektierten Element wechseln“.
12. Sie gelangen nun in die Hauptansicht der Dateiverwaltung und befinden sich auf der ausgewählten Datei bzw. dem Ordner. Dieser kann dann wie gewohnt geöffnet, markiert, kopiert umbenannt usw. werden.

Alternativ können Sie mit dem Kurzbefehl `F+B8B9` den Suchdialog direkt öffnen.

16.2.6 Zip Archiv

Die Dateiverwaltung unterstützt die Funktion, Dateien oder Ordner als zip Archiv zu packen oder zip Dateien zu entpacken. In Kapitel 17.4 finden Sie eine genaue Beschreibung.

16.2.7 Zip Archiv entpacken

Dieser Eintrag wird nur im Befehlsmenü > Bearbeiten angezeigt, wenn

Sie sich auf einer zip-Datei befinden. Er ermöglicht es, den Inhalt dieses ZIP Archivs zu entpacken.

Eine ausführliche Beschreibung zum Entpacken von ZIP Archiven finden Sie im Kapitel 17.4.

16.2.8 Ankerposition

Hinter der Bezeichnung Ankerposition steht die Möglichkeit, die Position eines Ordners oder einer Datei zu merken, um diese Position schnell wieder zu erreichen, wenn man sich innerhalb der Dateiverwaltung zu einem anderen Ordner bewegt hat. Dies erleichtert die Kontrolle beim Kopieren und Einfügen von Dateien oder Ordnern.

16.2.9 Ankerposition setzen und zur Ankerposition springen

1. Gehen Sie zu dem Ordner oder zu der Datei auf die Sie den Anker setzen möchten.
2. Öffnen Sie das Befehle­menü (S3) und wählen sie den Eintrag „Bearbeiten > Ankerposition setzen“ oder drücken Sie den Kurzbefehl Plus+B8B9 (Pluszeichen mit B8B9).
3. Sie sind wieder in der Datei- und Ordnerliste und können sich zu einer anderen Datei oder einem Ordner bewegen, eine Datei öffnen oder eine andere Anwendung nutzen.
4. Wenn Sie wieder in die Dateiverwaltung gehen, Können Sie mit dem Menüeintrag „Bearbeiten / zur Ankerposition springen“ oder Kurzbefehl Schrägstrich+B8B9 zur Position der gemerkten Datei oder Ordner springen.
5. Wenn Sie in die Dateiverwaltung zurück gehen, erreichen sie nun im Befehle­menü mit dem Eintrag „Bearbeiten > Zur Ankerposition springen“ oder mit dem Kurzbefehl /+B8B9 (Schrägstrich mit B8B9) direkt diesen gemerkten Ordner oder Datei.

Die Ankerposition bleibt solange auf einer Datei oder einem Ordner gemerkt, bis Sie eine neue Ankerposition setzen oder das Gerät neu starten. Sie können sich also mehrmals von der Position der gemerkten Datei oder des Ordners weg bewegen und jedes Mal mit dem Befehl „Zur Ankerposition springen“ zurückkehren.

16.2.10 Zwischen letzter Position und Ankerposition wechseln

Um sich zwischen der aktuellen Position und einer Ankerposition zu bewegen gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu dem Ordner oder der Datei auf die Sie den Anker setzen möchten.
2. Öffnen Sie das Befehle­menü (S3) und wählen sie den Eintrag „Bearbeiten > Ankerposition setzen“ oder drücken Sie den Kurzbefehl Plus+B8B9 (Pluszeichen mit B8B9).
3. Sie sind wieder in der Datei- und Ordnerliste und können sich zu einer anderen Datei oder einem Ordner bewegen, eine Datei öffnen oder eine andere Anwendung nutzen.
4. Um zur gemerkten Datei oder zum gemerkten Ordner zu springen ohne die Position der aktuellen Datei oder Ordner in der Dateiverwaltung zu verlieren, öffnen Sie das Befehle­menü (S3) und wählen den Eintrag „Bearbeiten > Zwischen letzter Position und Ankerposition wechseln“. Oder drücken Sie den Kurzbefehl =+B8B9 (Ist-gleich-Zeichen mit B8B9)
5. Die Ankerposition wird auf die jeweils andere Position gesetzt. Wenn Sie diesen Befehl wiederholen springen Sie jeweils zwischen den beiden Positionen hin und her.

16.3 Befehle­menü > Eintrag „Ansicht“

Die folgenden Unterkapitel geben Beschreibungen zu den Funktionen im Menü „Ansicht“ in der Dateiverwaltung.

Filter für Dateien und Ordner

Anordnen nach (Sortierung)

16.3.1 Filter

Mit der Filtereinstellung können Sie festlegen, welche Arten von Dateien und Ordnern in der Datei- und Ordnerliste gezeigt werden. Interne Dateien werden z.B. standardmäßig nicht gezeigt, zum einen, weil es nicht nötig ist sie zu sehen, zum anderen weil es dadurch zu Störungen beim Arbeiten in der Dateiverwaltung kommen kann.

Um die Filtereinstellungen zu öffnen Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen den Eintrag „Ansicht > Filter“.
2. Ein Dialog mit drei Kontrollfeldern für die Anzeige von versteckten Dateien, Systemdateien und internen Dateien öffnet sich.
 - a. Zeige versteckte Dateien: Diese Einstellung ist standardmäßig gewählt. Wenn dieses Kontrollfeld gewählt ist, werden in der Dateiliste auch Ordner und Dateien angezeigt und ein Zugriff ermöglicht, bei denen in den Eigenschaften das Kontrollfeld „versteckt“ gewählt ist.
 - b. Zeige Systemdateien: Diese Einstellung ist standardmäßig gewählt. Wenn dieses Kontrollfeld gewählt ist, werden in der Dateiliste auch Ordner und Dateien angezeigt und ein Zugriff ermöglicht, bei denen in den Eigenschaften das Kontrollfeld „System“ gewählt ist
 - c. Zeige interne Dateien: Diese Einstellung ist standardmäßig nicht gewählt. Wenn dieses Kontrollfeld gewählt ist und interne Dateien angezeigt werden, kann dies dazu führen, dass das Öffnen oder Schließen von Dateien und Ordnern wesentlich länger dauert.
 - d. Durch Drücken von B0 werden Kontrollfelder gewählt oder deaktiviert.

 **Achtung:**

Das Löschen, Verschieben oder Umbenennen von internen Dateien, führt dazu, dass das Gerät nicht korrekt arbeitet bzw. nicht mehr funktionsfähig ist.

16.3.2 Anordnen nach (Sortierung)

Die Einträge in der Datei- und Ordnerliste lassen sich nach Namen, Größe, Dateityp oder Datum sortieren. Standardmäßig sind die Ordner und Dateien alphabetisch nach Namen sortiert und es werden zuerst die Ordner und dann die Dateien untereinander aufgelistet.

Statt der Sortierung nach Namen, können Sie auch nach Dateigröße, Datum oder Dateityp sortieren, sowie die Reihenfolge umkehren. Bei umgekehrter Sortierreihenfolge werden zuerst die Dateien und danach die Ordner aufgelistet.

Hierzu dient im Befehle­menü der Eintrag „Ansicht“, Eintrag „Anordnen

nach“. Dieser öffnet einen Dialog, um festzulegen, in welcher Reihenfolge die Ordner und Dateien angeordnet werden sollen.

Um die Sortierung zu ändern Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Befehle Menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen den Eintrag „Ansicht > Anordnen nach“.
2. Ein Dialog öffnet sich. Wählen Sie durch Bewegungen nach rechts oder links in der Liste das gewünschte Sortiermerkmal.
3. Falls die Sortierreihenfolge umgekehrt werden soll, wählen Sie das entsprechende Kontrollfeld mit B0.
4. Bestätigen Sie OK.

Die Dateiverwaltung präsentiert nun die Dateien und Ordner gemäß der eingestellten Anordnung

16.4 Befehle Menü > Eintrag “Extras”

Die folgenden Unterkapitel beschreiben Funktionen im Menü „Extras“ und Funktionen, die zip Dateien betreffen, im Menü „Bearbeiten“.

Was ist ein ZIP Archiv?

ZIP Status

ZIP Dateien erzeugen

Zip Datei entpacken

16.4.1 Was bedeutet ZIP Archiv?

Als ZIP-Archiv oder zip-Datei wird eine Datei bezeichnet, welche die Dateiendung .zip trägt. In ihr können eine oder mehrere Dateien und / oder Ordner mit weiteren Dateien enthalten sein. Diese liegen im ZIP-Archiv in komprimierter Form vor, so dass die Dateigröße der ZIP-Datei kleiner ist als die Summe der unkomprimierten Dateien.

Das Erzeugen eines ZIP Archivs wird Packen (zip) genannt. Beim Entpacken (unzip) wird aus dem gepackten ZIP-Archiv die ursprüngliche Datei- und Ordnerstruktur wieder hergestellt.

Beim Packen kann ein Passwort vergeben werden, dieses muss später beim Entpacken korrekt eingegeben werden, andernfalls sind die Dateien aus dem passwortgeschützten ZIP-Archiv nicht verfügbar.

16.4.2 Zip Status

Der Eintrag „zip Status“ im Befehle Menü > Extras öffnet einen Dialog, in welchem Sie Informationen zum letzten bzw. über dem laufenden ZIP Vorgang erhalten, sowie den Dateinamen der ZIP-Datei angezeigt wird. Eine Beschreibung zum Erzeugen und Entpacken von ZIP Archiven finden Sie in den folgenden Kapiteln.

16.4.3 Zip Archiv Funktionen

Mit den zip Archiv Funktionen lassen sich zip-Dateien entpacken (unzip) oder Dateien und Ordner als zip-Datei packen (zip). Das Packen und Entpacken von passwortgeschützten ZIP Archiven wird ebenfalls unterstützt.

Es ist auch möglich ein ZIP Archiv zu öffnen, ohne es zu entpacken und sich zu den dort vorhandenen Dateien zu bewegen.

Zum einen erhalten Sie dadurch einen Überblick über den Inhalt des zip-Archives und zum anderen können Sie einzelne Dateien daraus mittels „Kopieren / Einfügen“ entpacken.

16.4.4 Zip-Datei erzeugen

Um Dateien oder Ordner zu komprimieren und als ZIP-Archiv zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der Datei- und Ordnerliste auf die Datei oder den Ordner, welcher gepackt werden soll.
2. Öffnen Sie durch kurzen Druck auf S3 das Befehle Menü und wählen Sie den Eintrag „Bearbeiten > ZIP-Archiv erstellen“.
3. Es öffnet sich ein Dialog. Das Eingabefeld „Archiv speichern unter“ zeigt den Speicherort und den Dateinamen des ZIP Archivs. Standardmäßig wird der Dateiname aus dem Namen der zu packenden Datei bzw. des Ordners und der Dateiendung .zip gebildet. Der vorgeschlagene Dateiname kann editiert werden.
4. Wenn Sie mit dem vorgeschlagenen Speicherort einverstanden sind, können Sie den nächsten Schritt überspringen.
5. Falls Sie die zip-Datei in einen anderen als den vorgeschlagenen Speicherort speichern möchten, betätigen Sie den Schalter „Durchsuchen“, worauf sich ein weiterer Dialog öffnet. Die Elemente dieses Dialoges werden im nächsten Kapitel beschrieben.

6. Lassen Sie das Eingabefeld „Passwort“ leer, wenn sie kein Passwort vergeben möchten. Die Eingabe eines Passwortes ist nur dann erforderlich, wenn Sie die Daten im ZIP-Archiv vor unberechtigtem Zugriff schützen möchten. Die Passwordeingabe erfolgt in einem verdeckten Modus.
7. Bestätigen Sie abschließend OK.
8. Der Vorgang wird gestartet und es öffnet sich ein Dialog mit Statusinformationen. Je nach Größe der Daten dauert das Erstellen des ZIP Archivs einige Zeit. Der Statusdialog gibt an wieviele Dateien gepackt werden, welche Datei aktuell gepackt wird und nach beendetem Vorgang die benötigte Zeit.
9. Wenn die Meldung „Vorgang beendet“ im Statusdialog angegeben wird, ist das ZIP-Archiv erstellt. Schließen Sie den Dialog mit „OK“.

Alternativ können Sie mit dem Kurzbefehl.z+B8B9 den Dialog zum Packen direkt erreichen.

Hinweis:

Wenn Sie während des Packens im Statusdialog den Schalter „Abbrechen“ bestätigen, wird ein unvollständiges oder beschädigtes ZIP-Archiv angelegt. Wenn Sie den Schalter „OK“ bestätigen, läuft der Vorgang im Hintergrund weiter.

16.4.5 Elemente im Dialog „Durchsuchen“ beim Packen

Wenn Sie im Dialog zum Erzeugen eines ZIP Archivs den Schalter „Durchsuchen“ bestätigen, öffnet sich ein Dialog mit folgenden Elementen:

Eingabefeld „Name“: Zeigt den vorgeschlagenen Dateinamen für das ZIP-Archiv. Diesen können Sie überschreiben oder ändern.

Infobereich „Pfad“: Zeigt den Speicherort, in welchem die zip-Datei gespeichert wird

- Fasst die im zweiten Durchsuchen-Dialog getroffene Ordnerauswahl zusammen
- Um den Pfad zu verändern, müssen Sie den Schalter „Durchsuchen“ bestätigen.
- Ein zweiter Durchsuchen-Dialog öffnet sich und Sie müssen in der Ordnerliste den entsprechenden Ordner durch Bewegungen nach

links/rechts, oben/unten auswählen und in diesen Ordner hineingehen. Bestätigen Sie dann OK.

Schalter „Speichern“: Schließt den ersten Durchsuchen-Dialog und übernimmt den Pfad und Dateinamen für das ZIP-Archiv

16.4.6 Zip Datei entpacken

Um eine zip-Datei zu entpacken Gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der Datei- und Ordnerliste auf die ZIP-Datei, welche entpackt werden soll.
2. Öffnen Sie durch kurzen Druck auf S3 das Befehle Menü und wählen den Eintrag „Bearbeiten < ZIP-Archiv entpacken“.
3. Es öffnet sich ein Dialog. Das Eingabefeld „Entpacken in Ordner“ zeigt den Speicherort, in welchen die Dateien / Ordner des ZIP Archivs entpackt werden. Standardmäßig wird der Ordner, in welchem sich das ZIP-Archiv befindet angegeben. Der vorgeschlagene Eintrag kann editiert werden, d.h. Sie können den gewünschten Pfad samt Ordner und Unterordner eingeben.
 - a. Beachten Sie, dass die Ordner durch einen umgekehrten Schrägstrich (Backslash) getrennt werden müssen.
4. Wenn Sie mit dem vorgeschlagenen Speicherort einverstanden sind, können sie den Schalter „Durchsuchen“ überspringen. Falls Sie die zip-Datei in einen anderen als den vorgeschlagenen Speicherort speichern möchten, aber den Pfad nicht von Hand in das Eingabefeld schreiben möchten, bestätigen Sie den Schalter „Durchsuchen“. Es öffnet sich dann ein weiterer Dialog. Die Elemente dieses Dialoges werden im vorigen Kapitel beschrieben.
5. Bestätigen Sie „OK“, um das Entpacken zu starten. Sofern das ZIP-Archiv mittels Passwort geschützt ist, öffnet sich ein Dialog zur Passworteingabe. Die Elemente des Passwortdialogs werden weiter unten beschrieben.
6. Der Vorgang wird gestartet und es öffnet sich ein Dialog mit Statusinformationen. Je nach Größe der Daten dauert das Entpacken des ZIP Archivs einige Zeit. Der Statusdialog gibt an wieviele Dateien entpackt werden, welche Datei aktuell entpackt wird und nach beendetem Vorgang die benötigte Zeit.
7. Wenn die Meldung „Vorgang beendet“ im Statusdialog angegeben wird, ist das ZIP-Archiv entpackt. Schließen Sie den Dialog mit OK.

Mit dem Kurzbefehl `u+B8B9` können Sie das Entpacken starten.

Elemente im Passwortdialog:

Eingabefeld „Passwort“: Geben Sie das Passwort ein, welches beim Erstellen dieses ZIP Archivs vergeben wurde. Die Eingabe erfolgt in einem verdeckten Modus.

Infocfeld „Datei“: Zeigt den Dateinamen der zu entpackenden Datei aus dem ZIP-Archiv, für welches das Passwort eingegeben werden muss.

Schalter „OK“: Schließt bei korrekter Passworteingabe den Dialog und startet den Vorgang. Falls das Passwort falsch oder falsch geschrieben ist, befinden Sie sich wieder im Eingabefeld zur Passworteingabe


Schalter „Überspringen“: Wenn Sie das Passwort für die angezeigte Datei nicht wissen, gelangen Sie mit diesem Schalter zur nächsten zu entpackenden Datei. Der Dateiname wird im Infocfeld angezeigt und Sie können das für diese Datei gültige Passwort eingeben.

Schalter „Abbrechen“: Schließt den Dialog ohne zu entpacken.

16.4.7 Elemente im Dialog “Durchsuchen” beim Entpacken

Wenn Sie im Dialog zum Entpacken eines ZIP Archivs den Schalter „Durchsuchen“ bestätigen, öffnet sich ein Dialog mit folgenden Elementen:

Ordnerliste: Zeigt den Ordner, in welchem die Dateien des ZIP Archivs entpackt und unkomprimiert gespeichert werden. Gehen Sie durch Bewegungen des Navisticks nach oben / unten oder rechts / links in den gewünschten Ordner oder Unterordner.

-  **Hinweis:** Mit `B9+B4B6` oder `D4D6` verlassen Sie diese Liste und erreichen die anderen Dialogelemente.

Infocfeld „Pfad“: Präsentiert als Zusammenfassung den Speicherort.

Schalter „Neuer Ordner“: Öffnet einen Dialog und ermöglicht, einen Unterordner im gewählten Ordner anzulegen, um den Inhalt des ZIP Archivs dann dort zu entpacken.

- Es ist die gleiche Funktion wie beim Erzeugen eines neuen Ordners in Befehleü „Datei > Neuer Ordner“.

OK: Schließt den Durchsuchen-Dialog und übernimmt den gewählten Speicherort in das Eingabefeld „Entpacken in Ordner“ im Entpacken-Dialog.

Abbrechen: Schließt ohne Änderungen den Durchsuchen-Dialog.


16.4.8 Informationen zum Vorgang im Dialog „Status“

Während eine zip-Datei gepackt oder entpackt wird, werden Informationen zum Fortschritt des Vorgangs in einem eigenen Statusdialog angegeben. Der Dialog öffnet sich automatisch, sobald der Vorgang gestartet ist.

Oder Sie öffnen das Befehle­menü durch kurzen Druck auf S3 und wählen den Eintrag „Extras > ZIP Status“.

Der Statusdialog enthält folgende Elemente:

Infofeld „Status“: Hier werden Informationen über den Vorgang des Packens bzw. Entpackens angegeben. Nach beendetem Vorgang erhalten Sie eine Meldung über die benötigte Zeit.

-  **Hinweis:** Die Meldung 0 Sekunden deutet darauf hin, dass das Packen oder Entpacken fehlgeschlagen ist.

Infofeld „Aktuelle Datei“ (Wird nur bei laufendem Vorgang gezeigt): Beim Packen wird der Name der Datei angegeben, welche gerade in das ZIP-Archiv gepackt wird. Beim Entpacken wird der Name der Datei angegeben, welche gerade aus dem ZIP-Archiv entpackt wird.

Infofeld „ZIP-Archiv“: Gibt den Namen und Speicherort des ZIP Archivs an, welches erstellt wird, bzw. aus welchem die Dateien entpackt werden.

"OK": Schließt den Statusdialog, Ein laufender Vorgang wird nicht verändert. Der Vorgang läuft im Hintergrund weiter und sein Status kann über das Befehle­menü Eintrag „Extras / ZIP Status“ erneut abgefragt werden.

Abbrechen (Wird nur bei laufendem Vorgang gezeigt): Der Vorgang des Packens bzw. Entpackens wird abgebrochen. Anschließend befindet sich ein unvollständiges oder fehlerhaftes ZIP-Archiv im angegebenen Speicherort bzw. das ZIP-Archiv ist unvollständig oder gar nicht entpackt.

16.4.9 Zip-Datei öffnen ohne zu entpacken

Sie können ein ZIP-Archiv (ZIP-Datei) öffnen, um sich einen Überblick

über die enthaltenen Dateien zu verschaffen. Das ZIP-Archiv wird wie ein Ordner geöffnet, d.h. Sie gehen in der Datei- und Ordnerliste zur gewünschten ZIP-Datei und öffnen es durch eine Bewegung nach rechts. Wenn in dem Archiv Ordner gepackt wurden, werden diese ebenfalls durch eine Bewegung nach rechts geöffnet. Mit Bewegungen nach oben / unten gelangen Sie zu den Ordnern oder Dateien. Ein Markieren, Kopieren oder Abfragen der Dateieigenschaften ist möglich, sowie das Öffnen eines eingeschränkten Befehlefensters.

 **Hinweis:**

Falls es nicht möglich ist, die Ordner oder Unterordner des ZIP Archivs durch Bewegungen nach links zu schließen, öffnen Sie die Dateiverwaltung über das Hauptmenü oder den Kurzbefehl d+B7B8B9.

Beispiel:

Ein Ordner „Test“ enthält den Unterordner „Ordner-1“ mit den Dateien „Dokument-1“ und „Dokument-2“, sowie den Unterordner „Ordner-2“ mit den Dateien „Mappe-1“ und „Mappe-2“.

Der Ordner „Test“ wird als ZIP-Archiv mit der Bezeichnung „Test.zip“ gepackt.

Wird das Archiv „Test.zip“ in der Dateiverwaltung durch eine Bewegung nach rechts geöffnet, gelangen Sie zur Ebene der Unterordner z.B. „Test\Ordner-1“. Mit einer weiteren Bewegung nach rechts, gelangen Sie zu den enthaltenen Dateien.

 **Hinweis:**

Eventuell vorhandene weitere Unterordner werden hier nicht angezeigt.

16.4.10 Einzelne Dateien oder Ordner aus einem zip Archiv kopieren

Sie können einzelne Dateien oder Unterordner mit Hilfe der allgemeinen Funktionen „kopieren“ und „Einfügen“ aus dem geöffneten zip Archiv entpacken, ohne das komplette ZIP-Archiv entpacken zu müssen). Während des Einfügens wird dann die Datei bzw. der Ordner entpackt.

Bei Dateien oder Ordnern aus passwortgeschützten ZIP Archiven öffnet sich dabei der Eingabedialog und Sie müssen das Passwort eingeben.

16.5 Konvertierung von BRF zu RTF oder von RTF zu BRF

Wie bereits weiter oben in dieser Anleitung erwähnt, gibt es keine direkte Möglichkeit eine Brailledatei im Format BRF in eine Textdatei im Format RTF oder umgekehrt umzuwandeln. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit mit den Funktionen der Textverarbeitung den Inhalt einer solchen Datei als Datei des anderen Dateityps zu speichern.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Dokument, welches Sie in dem anderen Dateityp speichern möchten. Wir bezeichnen es als Quelldokument.
2. Erzeugen Sie ein neues leeres Dokument in dem gewünschten Dateiformat. Wir bezeichnen es als Zieldokument.
3. Wechseln Sie zum Quelldokument, markieren Sie den gesamten Inhalt mit dem Kurzbefehl B9+B1B2B3B4B5B6B8 oder öffnen Sie das Befehle­menü (S3) und wählen „Bearbeiten > Alles markieren“.
4. Details zum Markieren finden Sie im Kapitel 8.8.1.
5. Kopieren Sie den markierten Text in die Zwischenablage mit dem Kurzbefehl c+B8B9 oder im Befehle­menü Eintrag „Bearbeiten > Kopieren“.
6. Details zum Kopieren finden Sie im Kapitel 8.8.2.
7. Wechseln Sie zum Zieldokument und fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage ein. Kurzbefehl v+B8B9, oder im Befehle­menü Eintrag Bearbeiten > Einfügen.
8. Speichern Sie die Änderungen im Zieldokument mit dem Speichern­befehl s+B8B9, oder im Befehle­menü Eintrag „Bearbeiten > Speichern“.

16.6 Befehle­menü verlassen

Drücken Sie die Systemtaste S3 einmal kurz, um das Befehle­menü zu schließen. Anschließend befinden Sie sich an der Stelle der Anwendung von wo aus Sie das Befehle­menü geöffnet hatten.

17 Fehlerbehebung

Nun ist es also passiert. VarioUltra funktioniert nicht richtig. Oft sind es ja die kleinen Ursachen, die schnell behoben sind. Bitte gehen Sie die folgende Liste durch um die Fehlerursache finden. Sollte dies nicht helfen, schalten Sie das Gerät aus, trennen es vom Netz und setzen Sie sich mit dem Service in Verbindung.

17.1 Gerät lässt sich nicht einschalten

Bitte schalten Sie VarioUltra nochmals ein. Falls das nicht hilft, vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker mit einer stromführenden Steckdose verbunden ist und der Stecker des Ladegerätes sicher in der USB Buchse am Gerät sitzt. Schließen Sie gegebenenfalls zur Überprüfung der Steckdose ein anderes Gerät an.

Haben Sie die Tastensperre entriegelt?

Wenn der Akku tiefentladen ist, dauert es einige Zeit, bis das Gerät reagiert, nachdem es ans Ladegerät angeschlossen wurde.

18 Defekt und Reparatur

Wenn es doch einmal passiert – VarioUltra ist defekt, was tun?

Haben Sie alle Einstellungen und Anschlüsse gemäß der Bedienungsanleitung überprüft?

Sind Sie sicher, dass der Akku geladen und die Netzsteckdose Strom führend ist?

Haben Sie die Tastensperre entriegelt?

Benutzen Sie ein defektes Gerät nicht! Ziehen Sie den Netzstecker! Bitte setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Händler oder der VisioBraille GmbH in Verbindung.

Die Zentrale der VisioBraille GmbH erreichen Sie telefonisch unter 03641 2816 400 in Deutschland (Landesvorwahl +49). Die Kollegen werden Ihnen bei der Überprüfung des Gerätes behilflich sein und können im Falle eines Defekts die Abholung des Gerätes veranlassen. In diesem Fall bekommen Sie einen Servicekarton zugeschickt, in den Sie das Gerät verpacken können. Der Spediteur kann Ihnen dabei behilflich sein, zeigen Sie ihm gegebenenfalls diese Anleitung.


19 Einhaltung von Vorschriften

19.1 Art des Produktes

Bei dem Produkt handelt es sich um eine elektronische Braillezeile zur Darstellung von Text auf elektronischem Wege in taktiler Form als Blindenschrift. Nach DIN EN ISO 9999 klassifiziert als „Taktiler Computerdisplay“, Geräte, die Informationen aus einem Computer über den Tastsinn anzeigen, Code 22 39 05.

19.2 CE Konformität

Das Produkt entspricht den Richtlinien der europäischen Union und trägt die CE- sowie RoHS-Kennzeichnung.

 **WARNUNG:** Die Verwendung von Leitungen, Netzteilen, sowie Ersatzteilen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller des Gerätes freigegeben wurden, können zu einem Anstieg der Emissionen oder zu einer Verringerung der Einstrahlfestigkeit und damit auch zu einem Sicherheitsrisiko führen.



19.3 FCC Konformität

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference's that may cause undesirable operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This device contains transmitter Module FCC ID:
P4IBTM805

19.4 Umweltfreundliche Entsorgung nach EU Richtlinie 2012/19/EU



Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne), das auch am Gerät angebracht ist (Typenschild), weist darauf hin, dass das Gerät und sein Zubehör nach Ende der Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Eine Umweltgerechte Entsorgung ist vorgeschrieben.

Das Gerät enthält elektronische Bauelemente. Zur Verhinderung von Umweltrisiken und Gefährdungen durch nicht fachgerechte Entsorgung, muss die Entsorgung des Produktes sowie des Zubehörs den geltenden Richtlinien entsprechen.

Das Produkt muss bei einer Annahmestelle für das Recycling elektronischer Geräte abgegeben werden oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

Bitte entfernen Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen alle persönlichen Daten von dem Gerät bevor Sie es entsorgen.

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

VisioBraille GmbH
Oßmaritzer-Straße 4
07745 Jena
Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/ <i>Type of product:</i>	Elektrische Lesehilfe / <i>reading aid</i>	
Handelsmarke/ <i>Trademark:</i>	VisioBraille	
Modell <i>Model</i>	Artikelnummer <i>Article-no</i>	weitere Angaben <i>further details</i>
VarioUltra 20	-	Batteriebetrieben / <i>battery operated</i>
VarioUltra 40	-	Batteriebetrieben / <i>battery operated</i>

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt:

2014/30/EU	Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
2011/65/EU	Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

meets the essential requirements of the following EU-Directives:

2014/30/EU	<i>Directive on Electromagnetic Compatibility</i>
2011/65/EU	<i>Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment</i>

angewandte Standards und Verordnungen/*applied standards and regulations:*

EN 55024:2010
EN 55032:2012/AC:2013
EN 55035:2017

EN 50581:2012

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Authorized person for technical documentation:

Name/*Name*, Position: Thomas Lucas, CEO

Jena, 01.07.2020

.....
Datum/*Date*


.....
Unterschrift/*Signature*

20 Gewährleistung

Nur gültig innerhalb Deutschlands

Das Gerät unterliegt den gesetzlichen Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen.

VisioBraille GmbH garantiert Ihnen, dass das Gerät bei der Auslieferung frei von Mängeln an Material- oder Verarbeitung ist.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des Übergabebeleges, bei Versandaufträgen mit dem Datum des Lieferscheins.

Auf Neugeräte ist die Gewährleistung 24 Monate.

Gebrauchtgeräte haben lediglich 12 Monate Gewährleistung.

Verschleißteile (z.B. Akkus/Batterien/Braillestifte/Datenträger) haben 6 Monate Gewährleistung.

Auf Reparaturen und Ersatzteile beträgt die Gewährleistung 12 Monate.

Selbstverschuldete Defekte und solche durch unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch sind vom Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.

Die bei einer Reparatur oder Nachbesserung ausgetauschten Teile gehen in das Eigentum der VisioBraille GmbH über.

Das Gerät ist für Endkunden bzw. Einzelpersonen zur Verwendung zu Hause oder im Büro vorgesehen. VisioBraille GmbH behält sich das Recht vor, das Gerät zu reparieren oder durch ein ähnliches oder besseres Produkt zu ersetzen.

Eine Haftung von Seiten der VisioBraille GmbH oder ihrer Vertreter für indirekte oder Mittelbare Schäden ist in jedem Falle ausgeschlossen. Die dem ursprünglichen Anwender zustehenden Rechtsmittel beschränken sich auf den Austausch von Komponenten des Gerätes.

Die Gewährleistung gilt nur unter der Voraussetzung, dass das Gerät in dem Land, in dem es gekauft wurde, von VisioBraille GmbH oder einem

von VisioBraille GmbH autorisierten Partner gewartet wurde und dass alle Garantiesiegel unverletzt sind. Im Falle weiterer Gewährleistungsansprüche oder Wartungsmaßnahmen während oder nach der Gewährleistungsperiode wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VisioBraille GmbH übernimmt keine Haftung für eine andere als die im Handbuch beschriebene Verwendung des Gerätes.

Bei einer Reparatur oder Nachbesserung muss das Gerät im Originalkarton oder der Serviceverpackung eingeschickt werden.

Porto-, Verpackungs- und Versicherungskosten werden nicht von uns übernommen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

21 Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung:

Nichtbeachtung der nachfolgenden Warnhinweise kann zum Erlöschen der Garantie führen. Außerdem besteht bei Nichtbeachtung die Gefahr der Beschädigung des Gerätes und der Verletzung von Personen.

Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit. Fehlende oder beschädigte Teile melden Sie bitte unverzüglich an den Lieferanten.

Bewahren Sie die Verpackung gut auf, um das Gerät bei einem späteren Transport oder im Falle einer Reparatur wieder fachgerecht verpacken zu können. Unsachgemäße Verpackung eingesandter Geräte kann zum Erlöschen der Garantie führen! Bei Bedarf schicken wir Ihnen eine Serviceverpackung zu.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vor der ersten Inbetriebnahme.

Das Gerät darf nur in Wohn- und Gewerberäumen betrieben werden. In medizinischen Einrichtungen darf dieses Gerät nur in Büroräumen verwendet werden.

Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder wackelige Fläche. Das kann zum Sturz des Gerätes führen und diese beschädigen oder den Anwender verletzen.

Wenn Ihnen die sichere Bedienung des Gerätes Schwierigkeiten bereitet, bemühen Sie sich bitte um Hilfe oder ziehen Sie Ihren Händler zu Rate.

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Netzsteckdose mit Schutzleiter an.

Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn keine Schäden am Gerät oder dessen Zuleitungen erkennbar sind. Beschädigte Geräte dürfen nicht mit dem Stromnetz verbunden werden.

Falls das Gerät auf irgendeine Weise nicht richtig zu funktionieren scheint, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie bitte baldmöglichst Kontakt zu Ihrem Händler auf.

Falls Sie seltsame Geräusche hören, bzw. Rauch oder einen anderen Geruch, der aus dem Gerät kommt, wahrnehmen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Das Öffnen oder Beseitigen des Gehäuses kann zu Verletzungen und weiteren Beschädigungen des Gerätes führen.

Bitte verhindern Sie, dass Sand oder Staub in Kontakt mit dem Gerät kommt, da dies zu Fehlfunktionen führen und eine Reparatur unmöglich machen könnte.

Bedienen Sie das Gerät nur mit sauberen Händen.

Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen starke Radiowellen oder andere Strahlungen ausgesendet werden. Halten Sie mindestens 30 cm Abstand zu Mobiltelefonen.

Benutzen Sie nur Original Zusatzgeräte, da der Gebrauch von anderen Zusatzgeräten das Gerät beschädigen und/oder die Sicherheit gefährden könnte.

Vermeiden Sie den Umgang mit Flüssigkeiten, Getränken und Speisen in der Nähe des Gerätes.

An folgenden Orten darf das Gerät weder benutzt noch aufbewahrt werden, da es dort beschädigt werden könnte:

In der Sonne stehende Autos mit geschlossenen Fenstern.

In direktem Sonnenlicht oder nahe von Heizlüftern, Heizkörpern, Öfen usw.

An Orten mit starker Vibration, z. B. auf Waschmaschinen.

An Orten mit starkem Magnetfeld, z. B. in der Nähe von Lautsprechern.
An feuchten Orten (Badezimmer), im Wasser oder in der Nähe von Wasser.

Im Regen oder Schnee.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht unter 0°C oder über 40°C.
Die Luftfeuchtigkeit sollte nicht unter 20% und nicht über 80% liegen.
Vermeiden Sie Orte mit extremen oder schnellen Temperaturschwankungen.

Wenn Sie das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht haben, kann Betauung auftreten (Kondensierende Luftfeuchtigkeit). Warten Sie, bis das Gerät Temperatur angeglichen und absolut trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gerät reinigen.

Vermeiden Sie scharfe Reinigungs- und Putzmittel. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel. Nicht mit Wasser in Berührung bringen.

Benutzen Sie zum Entfernen von Schmutz und Staub bitte ein weiches, trockenes oder mit verdünntem neutralem Reinigungsmittel angefeuchtetes, keinesfalls nasses Tuch. Trocknen Sie dann die gesäuberten Stellen mit einem Tuch.

Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein.

Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Ziehen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker. Wir empfehlen, das Gerät zum Schutz vor Spannungsspitzen, wie Sie unter Anderem bei Gewittern auftreten können, an einem handelsüblichen Überspannungsschutz- oder Blitzschutzadapter zu betreiben. Diese sind im Elektrofachhandel auch in Form von Zwischensteckern oder Steckerleisten erhältlich. Bitte beachten Sie, dass diese Überspannungsschutzeinrichtung keinen 100%igen Schutz vor Blitzschlag und Überspannung bieten kann!

Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren.

Falls Flüssigkeit oder Metallteile in das Gerät geraten sollten, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel.

Vermeiden Sie Stöße. Nicht werfen oder fallen lassen.

Reparaturen dürfen nur von der VisioBraille GmbH oder von der VisioBraille GmbH autorisierten Firmen durchgeführt werden.

Hinweise zur Wartung und Pflege

Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Nässe.

Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Für eine intensive Reinigung wenden Sie sich bitte an VisioBraille GmbH oder Ihren Händler.

Bei großer Kälte und Frost ist das Gerät nicht funktionsfähig und muss langsam auf Raumtemperatur gebracht werden.

Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen am Gehäuse oder am Zubehör.

22 Technische Daten

- 20 oder 40 Brailleelemente mit Cursorrouting
- USB HID und Bluetooth (maximal 5 Verbindungen gleichzeitig)
- 8 Punkte Brailletastatur mit 2 ergonomischen Daumentasten
- 6 D-Tasten, Navistick, 4 S-Tasten
- Einschalter, Betriebsartenumschalter, Tastensperre
- Textverarbeitung mit Kurzschrift Ein- Ausgabe
- DOCX, DOC, PPT, PPTX, PPS, PPSX, PDF, Excel Betrachter
- Wissenschaftlicher Taschenrechner
- Dateimanager mit ZIP-Packer/Entpacker
- Komfortabler Einstellungsdialog
- Uhr, Datum, Wecker, Stoppuhr, Timer
- Akustischer Signalgeber und Vibrationsmotor für Silentbetrieb
- Speicher: 16GB Flash, 256 MB RAM
- USB Hostanschluss für Speichermedien
- Micro USB Anschluss für PC, mit Zugriff auf den Speicher als externer USB Datenträger (MTP)
- Inklusive Umhängetasche
- Gehäuse Alu, gebürstet
- Gewicht: 320 (530) g
- Abmessungen (bht): 188 (316) x 89 x 20 mm
- Stromversorgung: interner Akku / Laden über USB
- Ladestrom 800mA max
- Betriebszeit Vollast/Idle: 8/12 h

23 Übersicht Befehlkombinationen

In den Unterkapiteln finden Sie verschiedene zusätzliche Informationen für die Arbeit mit VarioUltra.

23.1 VarioUltra iOS Befehle

In der nachstehenden Tabelle sind Befehle gelistet, die der Treiber von Apple für den Anschluss der VarioUltra als Braillezeile unter Verwendung von VoiceOver zur Verfügung stellt.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.

Befehl mit VarioUltra	Aktion von VoiceOver
Cursorroutingtaste	Gewählten Eintrag Doppeltippen
Status Router	Wechsel erweiterte Statusbeschreibung
Navistick links oder D1	Zum vorigen Eintrag bewegen
Navistick rechts oder D4	Zum nächsten Eintrag bewegen
Navistick oben oder D3	Zum vorigen Eintrag gemäß Rotoreinstellung
Navistick unten oder D6	Zum nächsten Eintrag gemäß Rotoreinstellung
Navistick in der Mitte drücken oder Cursorroutingtaste	Eintrag unter dem Finger wählen
Systemtaste S1 oder D1D2D5	Home-Taste aktivieren
Systemtaste S2	Geht zur Statusleiste
Systemtaste S3 oder D1D2	Rücktaste wenn vorhanden
Systemtaste S4	Sprache unterbrechen oder fortsetzen
D1	Zum vorigen Eintrag bewegen
D4	Zum nächsten Eintrag bewegen

D3	Zum vorigen Eintrag gemäß Rotoreinstellung
D6	Zum nächsten Eintrag gemäß Rotoreinstellung
D2 + D3	Vorige Rotoreinstellung wählen
D5 + D6	Nächste Rotoreinstellung wählen
D1 + D2 + D3	Zum ersten Element bewegen
D4 + D5 + D6	Zum letzten Element bewegen
D1 + D2 + D3 + D5	Seite ab gewähltem Eintrag lesen
D2 + D4 + D5 + D6	Seite ab Seitenanfang lesen
D1 + D2 + D5	Home-Taste aktivieren
D2 + D3 + D4	Geht zur Statusleiste
D3 + D4 + D5	Aktiviert die Lauter-Taste
D1 + D2 + D6	Aktiviert die Leiser-Taste
D1 + D2	Rücktaste wenn vorhanden
D1 + D4 + D6	Aktiviert die Auswurf Taste
D1 + D4 + D5	Löschtaste
D1 + D5	Eingabetaste (Return)
D2 + D3 + D4 + D5	Tabtaste
D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6	Bildschirmvorhang ein / aus
D1 + D2 + D3 + D4	Sprache unterbrechen oder fortsetzen
D1 + D3 + D4	Sprache ein / aus
D2 + D4 + D6	Eine Seite nach links scrollen
D1 + D3 + D5	Eine Seite nach rechts scrollen
D3 + D4 + D5 + D6	Eine Seite nach oben scrollen
D1 + D4 + D5 + D6	Eine Seite nach unten scrollen
D2 + D3 + D6	Textauswahl aufheben

D3 + D5 + D6	Text auswählen
D2	Brailleanzeige nach links
D5	Brailleanzeige nach rechts
D1 + D3 + D4 + D5	Verlauf der Meldungen ein/aus
D4 + D6	Zur Mitteilungszentrale gehen
D2 + D5	Zum Kontrollzentrum gehen
D3 + D4	Seitenzahl oder angezeigte Zeilen sprechen
D1 + D2 + D4 + D5	Wechsel zwischen gekürzter und ungekürzter Brailleanzeige

23.2 VarioUltra BrailleBack Befehle

In der nachstehenden Tabelle sind Befehle gelistet, die der Treiber von BrailleBack für den Anschluss der VarioUltra als Braillezeile unter Verwendung von TalkBack an einem Android Gerät zur Verfügung stellt. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Erinnerung: B9 ist die linke Daumentaste.

Befehl mit VarioUltra	Aktion von BrailleBack
Cursorroutingtaste	Gewählten Eintrag Doppeltippen
Navistick links	Zum vorigen Eintrag bewegen
Navistick rechts	Zum nächsten Eintrag bewegen
Navistick oben	Zur vorigen Zeile bewegen
Navistick unten	Zur nächsten Zeile bewegen
B9 + B1B2	Rücklösch Taste
B9 + B1B2B5	Home-Taste aktivieren
B9 + B1B3B4B5	Benachrichtigungsfenster öffnen
B9 + B1B2B3B5	Letzte-Apps-Fenster öffnen

B9 + B8	Eingabetaste beim Bearbeiten von Text aktivieren
B9 + B7	Rückwärts löschen beim Editieren von Text
B9 + Navistick unten	Vorwärts scrollen
B9 + Navistick oben	Rückwärts scrollen
B9 + Navistick Mitte	Langer Druck auf Aktuellen Eintrag
Navistick Mitte	Aktuellen Eintrag aktivieren
B9 + B3B4	Suche im Bildschirmmodus
B9 + B1B2B3	Tastaturhilfe

23.3 VarioUltra Befehle

VarioUltra	Aktion
Kurzer Druck auf Einschalttaste	Einschalten bzw. Wechsel zwischen Standby und Gerät aktiv
Systemtaste S4 gedrückt und kurz Einschalttaste drücken	Gerät komplett ausschalten
Einschalttaste für ca. 10 Sekunden gedrückt halten	Systemreset
Betriebsartschalter nach hinten schieben	Notizgerätfunktion
Betriebsartschalter nach vorne schieben	Braillezeilenfunktion
S3 lang drücken	Hauptmenü öffnen
S3 zweimal kurz drücken	Akkuladezustand (in Notizgerätfunktion)
S2+B9	Akkuladezustand (in Braillezeilenfunktion)
B2B5+D1D4	Alle Anwendungen stoppen

B7B8+D3D6	Update starten (wenn USB Stick mit Updatedatei angesteckt)
1 lang drücken	Textverarbeitung öffnen (In Notizgerätfunktion)
h+B7B8B9	Hilfemenü öffnen (In Notizgerätfunktion)
B9+B2B6	Kontexthilfe zum aktuellen Element
S2+B1	USB Kanal (Braillezeilenfunktion)
S2+B4	Bluetoothkanal 1 (Braillezeilenfunktion)
S2+B5	Bluetoothkanal 2 (Braillezeilenfunktion)
S2+B6	Bluetoothkanal 3 (Braillezeilenfunktion)
S2+B8	Bluetoothkanal 4 (Braillezeilenfunktion)
B9, oder Navistick Mitte oder Cursor-routingtaste über einem Eintrag	Menüeintrag, Auswahl oder Schalter bestätigen
Navistick links / rechts	In Auswahllisten zum vorigen / nächsten Eintrag
D1 oder Navistick oben	Aufwärts eine Zeile in Menüs oder Dateilisten
D3 oder Navistick unten	Abwärts eine Zeile in Menüs oder Dateilisten
Anwahlbuchstabe eingeben	Im Menü den zugeordneten Eintrag anspringen und öffnen
S1 lang drücken, Oder t+B7B8B9	Textverarbeitung öffnen (in Notizgerätfunktion)
z+B7B8B9	PDF Dokumentbetrachter öffnen (in Notizgerätfunktion)
x+B7B8B9	Excel Betrachter öffnen (in Notizgerätfunktion)
r+B7B8B9	Rechner öffnen (in Notizgerätfunktion)

u+B7B8B9	Uhrenmenü öffnen, Wecker, Stoppuhr öffnen (in Notizgerätfunktion)
d+B7B8B9	Dateiverwaltung öffnen (in Notizgerätfunktion)
e+B7B8B9	Einstellungen öffnen (in Notizgerätfunktion)
h+B7B8B9	Hilfemenü öffnen
B0 (rechte Daumentaste)	Leertaste
B7	Rüchlöschtaste
B8	Zeilenwechseltaste
B9+B1B2B3	Cursor zum Dateianfang bewegen
B9+B4B5B6	Cursor zum Dateiende bewegen
D2	Brailleanzeige nach links scrollen
D5	Brailleanzeige nach rechts scrollen
B9+B4 Navistick rechts	Nächstes Zeichen in Texten
B9+B1 Navistick links	Voriges Zeichen in Texten
B9+B5	Nächstes Wort in Texten
B9+B2	Voriges Wort in Texten
B9+B6	Nächster Satz
B9+B3	Voriger Satz
B9+B4B5 D3 Navistick unten	Nächste Zeile
B9+B1B2 D1 Navistick oben	Vorige Zeile
B9+B1B2B3B7	Zeilenanfang, Anfang einer Liste

B9+B4B5B6B8	Zeilenende, Ende einer Liste
B9+B4B6	Nächster Absatz
B9+B1B3	Voriger Absatz
B9B0+B5B6	Nächste Seite
B9B0+B2B3	Vorige Seite
S3 kurz drücken	Befehle­menü öffnen
S3 im Befehle­menü kurz drücken	Befehle­menü schließen
D4 oder B9B0+B7B8	Abbrechenbefehl in Dialogen
B9+B1B4	Aktuelles Zeichen markieren in Texten
B9+B2B5	Aktuelles Wort markieren in Texten
B9+B3B6	Aktuellen Satz markieren in Texten
B9+B1B2B4B5	Aktuelle Zeile markieren in Texten
B9+B1B3B4B6	Aktuellen Absatz markieren in Texten
B9+B1B2B3B4B5B6	Aktuelle Seite markieren, sofern feste Seitenwechsel im Dokument sind
B9+B1B4	Markierung auf Anfang / Ende eines Textblocks setzen
c+B8B9	Kopieren
x+B8B9	Ausschneiden
v+B8B9	Einfügen
B9+B7	Markierten Bereich löschen
3+B8B9	Weitersuchen
s+B8B9	Datei speichern
u+B8B9	Speichern unter
B9+B3B6B8	Zwischen geöffneten Dokumenten wechseln

S4 kurz drücken	Uhrzeit anzeigen
S4zweimal kurz drücken	Datum anzeigen
S2+B1, S2+B2, usw. bis S2+B8	Eines der 8 Ein- / Ausgabeprofile laden (in Notizgerätfunktion)
z+B8B9	Zwischen Lesemodus und Bearbeitungsmodus wechseln (in Textverarbeitung)
l+B8B9	Liste geöffneter Dokumente (in Textverarbeitung)
S4+B1 bis S4+B8 (von links nach rechts)	Lautstärke für Systemtöne in 8 Schritten ändern. S4+B7 ist geringster S4+B8 ist höchster Wert.
Von links nach rechts S4+B7niedrigster Stufe bis S4+B8 lauteste Stufe	Lautstärke für Systemtöne in 8 Stufen

23.4 JAWS Befehle

VarioUltra	Aktion
D1 oder Navistick nach oben	Braille vorige Zeile
D3 oder Navistick nach unten	Braille nächste Zeile
D5 oder Navistick rechts	Brailleanzeige nach rechts
D2 oder Navistick links	Brailleanzeige nach links
D4	Braille Cursor umschalten
D6	Braille zum aktiven Cursor
B7	Rücktaste
B8 oder Navistick Mitte	Eingabetaste, Enter
D1 + D3	Umschalt + Tabulator
D1 + D4	Dateianfang
D3 + D6	Dateiende
D1 + D5	Escape

D1 + Cursorroutingtaste	Schriftauszeichnung
D2 + D4	JAWS Cursor zum PC Cursor
D2 + D6	Braille Enter
D3 + D4	Windows Startmenü
D3 + Cursorroutingtaste	Text markieren
D4 + D5	JAWS Löschenfunktion
D4 + D6	Umschalttaste
D5 + D6	Ende
D1 + D2 + D3	Link wählen
D1 + D2 + D4	Rahmen wählen
D1 + D2 + D5	Tastaturhilfe
D1 + D3 + D4	Menüzeile
D1 + D3 + D5	Listenelement öffnen
D1 + D3 + D6	Sprachausgabe stumm
D1 + D4 + D5	Alle Anwendungen minimieren
D2 + D3 + D4	JAWS Aufgabenliste starten
D2 + D3 + D5	Wechsel zwischen 8 und 6 Punkt Braille
D2 + D3 + D6	Überschrift wählen
D2 + D4 + D5	JAWS Fenster
D2 + D4 + D6	Listenelement schließen
D2 + D5 + D6	Dokumentfenster schließen
D3 + D5 + D6	Kurztastenhilfe
D1 + D2 + D3 + D4	Voriges Dokumentfenster
D1 + D2 + D3 + D5	Braille Auto Advance
D1 + D2 + D3 + D6	Braille Ausführlichkeit
D1 + D2 + D4 + D5	Kurzschrift
D2 + D3 + D5 + D6	Kurzschrift aktuelles Wort expandieren
D1 + D3 + D4 + D5	Nächstes Dokumentfenster
D1 + D3 + D4 + D6	Entmarkieren

D1 + D3 + D5 + D6	Systemzeit sprechen
D2 + D3 + D4 + D5	Alt + Tabulator
D2 + D4 + D5 + D6	Tastaturhilfe

24 Informationen zum Wiedereinsatz

Art des Produkts:

Elektronische Braillezeile zur Darstellung von Text auf elektronischem Wege in taktile Form als Blindenschrift. Nach DIN EN ISO 9999 klassifiziert als „Taktiler Computerdisplay“, Geräte, die Informationen aus einem Computer über den Tastsinn anzeigen, Code 22 39 05.

Zweckbestimmung:

Brailledisplays sind elektronische Hilfsmittel zum Lesen von Texten z.B. aus einem PC. VarioUltra hat weiterhin die Möglichkeit zur internen Speicherung und Bearbeitung von Dokumenten. Blinde und stark sehbehinderte Menschen kompensieren damit ihre Sehbehinderung oder Krankheit.

Lebensdauer:

7 Jahre ab Herstellerdatum, bei Einhaltung der vorgeschriebenen Wartungszyklen.

Wiedereinsatz/Installation und Wartung:

Die Geräte dürfen nur von der VisioBraille GmbH oder einem autorisierten Unternehmen technisch überholt und aufbereitet werden.

Ein Wiedereinsatz darf nur nach sicherheitstechnischer Reinigung, Desinfektion und Kontrolle erfolgen.

Sicherheitstechnische Kontrollen (§6 MP-BetreibV):

Die sicherheitstechnischen Kontrollen dürfen ausschließlich von der VisioBraille GmbH oder einem autorisierten Unternehmen durchgeführt werden!

Die VisioBraille GmbH schreibt keine Fristen für die sicherheitstechnischen Kontrollen vor. Die in §6 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung gemachten Aussagen über Fristen - spätestens alle 2 Jahre - werden empfohlen.

Die Beurteilung des sicherheitstechnischen Zustandes des Gerätes erfolgt durch die sicherheitstechnische Kontrolle in Anlehnung an die Norm nach DIN VDE 0701-0702.

Besondere Hinweise zu Transport und Lagerung:

Dieses Gerät darf aus sicherheitstechnischen Gründen nur in der vorgesehenen Originalverpackung oder der dafür vorgesehenen Serviceverpackung transportiert werden. Die Lagerung darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen in der Original- oder Serviceverpackung erfolgen.

Folgende Lager- und Transportbedingungen sind einzuhalten:

- Temperaturbereich -10° bis + 50° C
- Relative Luftfeuchtigkeit 30 % bis 80 %

Netzzuleitung:

Als Netzzuleitung darf nur die mitgelieferte Originalzuleitung der VisioBraille GmbH verwendet werden.

 Warnhinweis:

Eine Verwendung anderer als die angegebenen Zubehörteile kann zu erhöhter Emission und /oder reduzierte Immunität führen.

25 Gerätebuch VarioUltra

Typ: VarioUltra 20
 VarioUltra 40

Serien-Nr.: _____

Hersteller: VisioBraille GmbH, Oßmaritzer-Straße 4c, 07745 Jena

Lieferant: _____

Anschaffungsjahr: _____

Betreiber *: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Endkontrolle: _____

Liefer-/Versanddatum: _____

Stromanschluss: 5V, 0,8 A max.

Leistungsaufnahme: ca. 4 Watt

Aufgestellt von: _____

Erste sicherheitstechnische Kontrolle **: _____

* Beim Wechsel des Betreibers, den neuen in der nächsten Zeile eintragen.

** Bei Wiedereinsatz ist eine neue sicherheitstechnische Kontrolle erforderlich

mit anderen Augen sehen...

Hilfsmittel für Sehgeschädigte - Entwicklung - Produktion - Vertrieb



 **Hersteller:**

VisioBraille GmbH
Oßmaritzer-Straße 4c
D - 07745 Jena
Deutschland

Vertrieb durch:

VisioBraille GmbH
Oßmaritzer-Straße 4c
D - 07745 Jena
Deutschland

Tel.: +49 3641 2816-400
Fax: +49 3641 2816-416
E-Mail: info@visiobraille.de
Internet: www.visiobraille.de

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten